



小柄な方向けの超コンパクト・ティルト&リクライニング車いす



マイチルト-ミニ3D

MH-SR 【標準価格】¥198,000(非課税)

*スイングアウトのみ

TAISコード:00066-000349

現在ご好評いただいている「マイチルト・コンパクト3D」を


小柄な方向けに さらにひとまわり小さくしました。

MH-SR-SE 【標準価格】¥214,000(非課税)

*スイングアウト&エレベータリング仕様

TAISコード:00066-000350

●小柄な女性がしっかり深く座れる
「短い座シート奥行(35cm)」

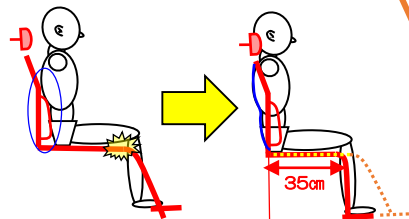

【座シートが長い】
膝の裏と座シート
が当たり、奥まで
座れない。


【座シートが短い】
しっかり奥まで座る
ことができ、すべり座り
のリスクも減らせます。

●低いポジションから前後・左右まで自由に設定可能な
「スネークヘッドサポート」



小柄な方の頭の位置に合わせられるよう、
従来よりも低い位置からの設定が可能です。
また、前後・左右・角度を一度に合わせられる
新しい構造を採用しました。

●円背の方の安定座位をサポートする
「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)

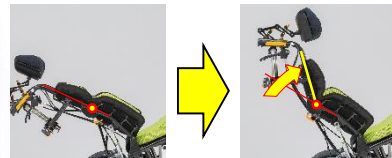

オアシス・ポジティブでも好評の背フレーム前折れ機
構で、円背の方にしやすい肩甲骨のすき間もピタッと
沿わせやすくなります。頭~首の安定にもつながりやす
くなり、食事が取りやすくなるのが期待できます。

●極限まで手前に引き込んだ
「直下構造のフットサポート」
(前後・角度調整式)



「膝が伸びない人」「足関節が変形している(尖足
拘縮)人」も上の写真のようにフットサポートにっ
かりと足を乗せることができます。

※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。



【シート色】



#F-01



#F-02



#B-61

従来の車いすとの姿勢の比較

マイチルト
(座シート奥行40cm)



座シートが長すぎる、膝関節が拘縮で
伸ばせないためフットサポートに足が乗らない。
⇒すべり座りになってしまっている。

マイチルト・コンパクト3D
(座シート奥行38cm)



座シート奥行は多少良くなったが、枕の位
置が高すぎる、フットサポートにもやはり足
が乗らない。

マイチルト・ミニ3D
(座シート奥行35cm)




頭に枕をしっかり合わせることができ、
直下構造のフットサポートにより、フット
サポートに足がしっかりと乗っている。



You Tubeで
シーティング例
動画を配信中。

「室内での移動」に徹底的にこだわった 超コンパクト・ティルト&リクライニング車いす

業界でもっともコンパクトなティルト&リクライニング車いす！

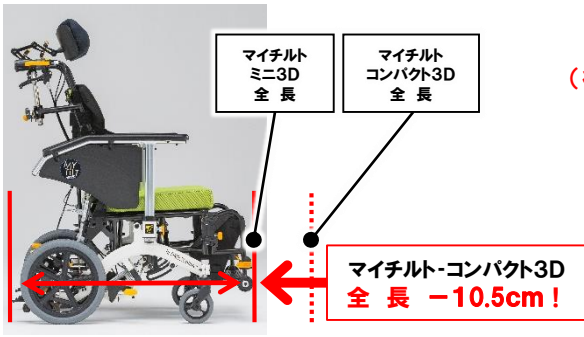

全長: 89cm
(従来品 -10.5cm)

全幅: 53cm
(従来品同等)




ティルト&リクライニング車いすとして、業界でもっともコンパクトな全長89cmです。
全長が短いので、廊下のコーナーがもっとも曲がりやすいティルト&リクライニング車いすです。80cm幅の廊下のコーナーを曲がるのが可能です。リクライニング車いすは大きすぎて使えない、そんな悩みを解消してくれる車いすです。

狭いスペースもさらに使いやすい！リフトアップ機構付きモデル！


MH-SRL 【標準価格】¥218,000(非課税)
*リフトアップ機能付き
*スイングアウトのみ
TAISコード:00066-000351

MH-SRL-SE 【標準価格】¥234,000(非課税)
*リフトアップ機能付き
*スイングアウト&エレベータリング仕様
TAISコード:00066-000352

【マイチルト-ミニ3D リフトアップ時】

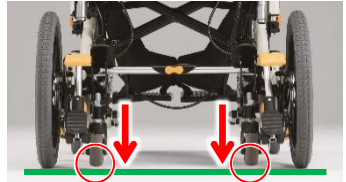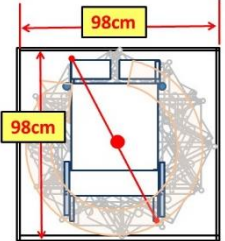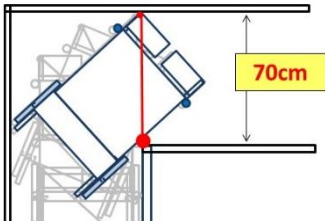

リフトアップキャストを下げると車輪が浮き上がります。

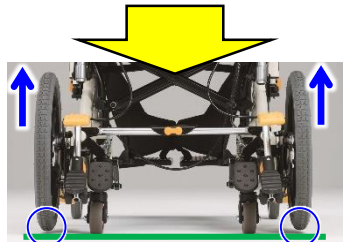

真横への移動、その場での旋回が可能になります！



You Tubeで
室内の使用例
動画を配信中。

リフトアップ仕様で廊下幅70cmのコーナーも曲がれます(マイチルト-コンパクト3Dは廊下幅90cmのコーナーが曲がれます)。直径98cmで旋回可能で狭いスペースでの移動も楽々です。真横への移動も可能になるので、移乗時のベッドへの横付けも楽に行えます。
*移乗時は、リフトアップ機能を解除して必ずブレーキをかけてください。

●マイチルト-ミニ3Dサイズ表 (単位: mm)

品番	シート幅	座面高	アームサポート高さ	バックサポート高さ	フットサポート長	シート奥行	全高	全長	全幅	重量(kg)
MH-SR	400	410	0・140~300	480	260~350	350	1010	890	530	24.7kg
MH-SR-SE	400	410	0・140~300	480	260~350	350	1010	880	530	26.5kg
MH-SRL	400	410	0・140~300	480	260~350	350	1010	890	530	27.0kg
MH-SRL-SE	400	410	0・140~300	480	260~350	350	1010	880	530	29.0kg

お問い合わせ先



株式会社 松永製作所
〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270
URL http://www.matsunaga-w.co.jp