


機種名/品名	DM-81/91/101 車いす	ページ	XQY- WF01A
--------	------------------	-----	------------

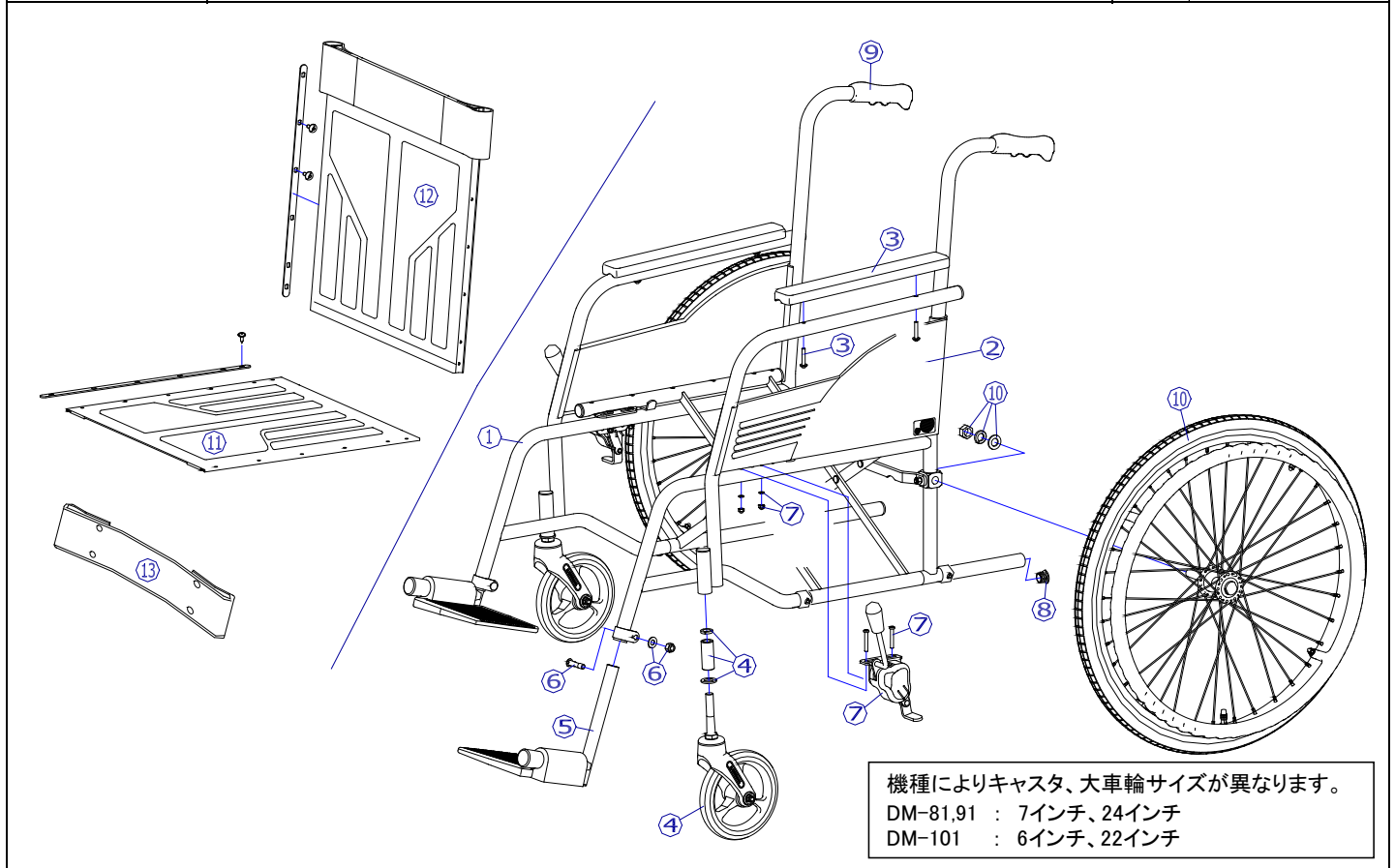

②

機種名/品名		DM-81/91/101 車いす		ページ	XQY- WF01B			
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	本体フレーム (機種により形状が一部異なります。)	---	---	---	---		
2	X-WF01-002L	DM用 側板(左)	1 枚	1				
	X-WF01-002R	DM用 側板(右)	1 枚	1				
3	X-PA02-003	樹脂アームサポートパッド	1 本	2			ボルト付、左右共通	
4	X-PC03-009	6インチソリッドキャスタ Aセット	1 個	2			DM-101の場合	
	X-PC04-009	7インチソリッドキャスタ Aセット	1 個	2			DM-81,91の場合	
キャスタ輪	X-PC03-022	6インチソリッドキャスタ輪(ボルト付セット)	1 個	2			DM-101の場合	
	X-PC04-022	7インチソリッドキャスタ輪(ボルト付セット)	1 個	2			DM-81,91の場合	
5	X-PF01-021L	クランプ固定式φ 19.1用DMタイプフットサポート完成(左)	1 枚	1				
	X-PF01-021R	クランプ固定式φ 19.1用DMタイプフットサポート完成(右)	1 枚	1				
6	X-PF01-020	フットサポート用クランプ固定式ボルトセット	1 本	2				
7	X-PB01-001L	L型鉄タックルブレーキ(左)	1 個	1			ボルト付	
	X-PB01-001R	L型鉄タックルブレーキ(右)	1 個	1				
8	X-PA01-102	7分用中栓	1 個	2			φ 22×t1.2用	
9	X-PA01-004	DXグリップ	1 本	2			接着剤必要	
		↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。						
10	X-PD12-001	22×1-3/8 車輪完成	1 本	2			DM-101の場合	
	X-PD13-001	24×1-3/8 車輪完成	1 本	2			DM-81,91の場合	
		↑ 標準はエアータイヤ仕様となります。						左右共通
タイヤなど	X-PD12-002	22×1-3/8 タイヤのみ	1 本	2			DM-101の場合	
	X-PD12-005	22×1-3/8 チューブ+フラップセット	1 本	2			DM-101の場合	
	X-PD12-006	22×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1 本	2			DM-101の場合	
	X-PD13-002	24×1-3/8 タイヤのみ	1 本	2			DM-81,91の場合	
	X-PD13-005	24×1-3/8 チューブ+フラップセット	1 本	2			DM-81,91の場合	
	X-PD13-006	24×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1 本	2			DM-81,91の場合	
		↑ X-PD12-005、006およびX-PD13-005、006はスーパーバルブセットが付きます。						
11	X-WF01-011-42B16	DM用 座シートセット(芯金・シートビス付) B-16	1 枚	1				
12	X-WF01-012-42B16	DM用 背シートセット(芯金・シートビス付) B-16	1 枚	1				
13	X-WF01-013-42B16	DM用 レッグベルト B-16	1 本	1				
注記								