


シート関係は
シート色を
ご確認ください。

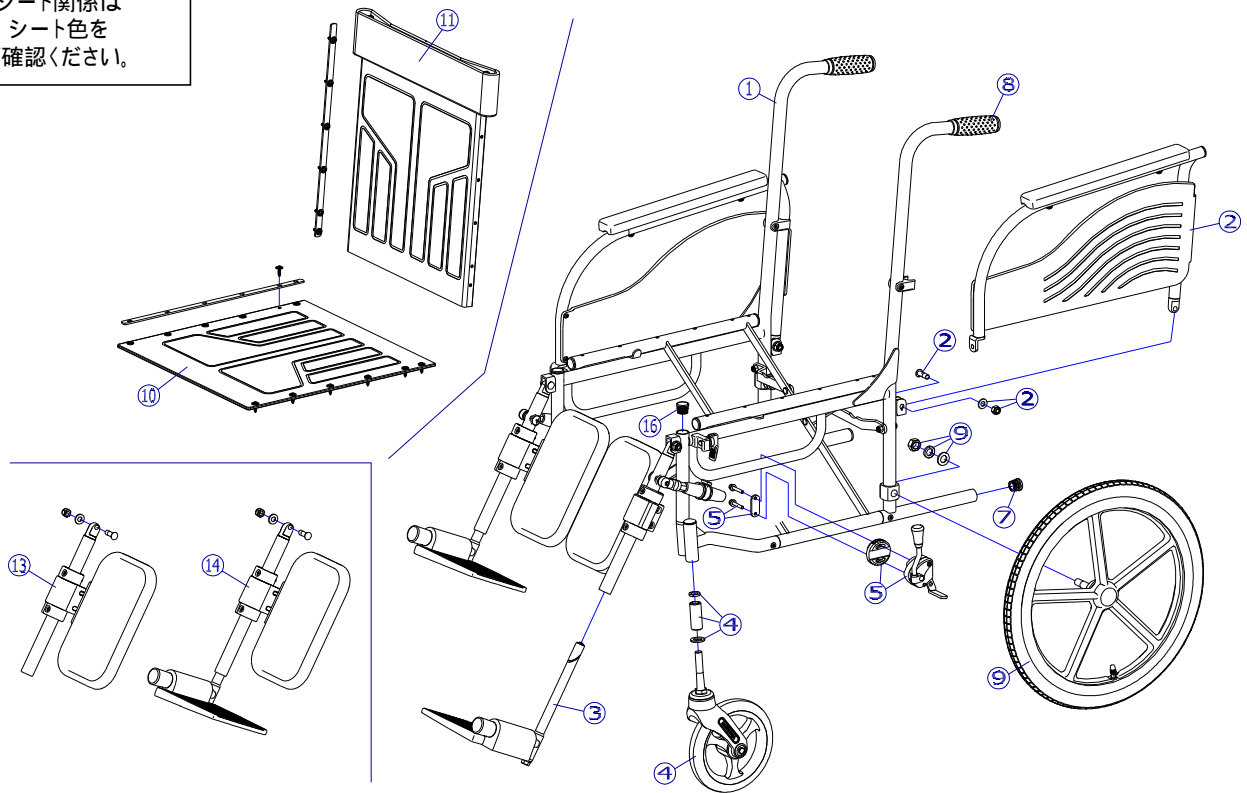

2017/12/11修正A

機種名 / 品名		CM-230 車いす				ページ	XQY- WF04B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	本体フレーム	---	---			
2	X-WF06-008L	CM - 200番台用 肘掛完成(左)	1	個	1		支点ボルト付
	X-WF06-008R	CM - 200番台用 肘掛完成(右)	1	個	1		
3	X-PF01-024L	三角ナット式 19.1ショート用DMタイプフットサポート完成(左)	1	枚	1		ショートタイプ
	X-PF01-024R	三角ナット式 19.1ショート用DMタイプフットサポート完成(右)	1	枚	1		
4	X-PC04-025	7インチソリッドキャスト Eセット	1	個	2		
		7インチソリッドキャスト(シャフト式) + パイプカラーセット					
キャスタ輪	X-PC04-022	7インチソリッドキャスト輪(ボルト付セット)	1	個	2		ボルト付
5	X-PB02-022L	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー紫色)10mm幅出しセット(左)	1	個	1		ボルト付
	X-PB02-022R	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー紫色)10mm幅出しセット(右)	1	個	1		
7	X-PA01-102	7分用中栓	1	個	2		22×t1.2用
8	X-PA01-002	22用グリップ	1	本	2		
		接着剤で取付けていただく事を推奨しております。					
9	X-PD07-001	16×1-3/8 車輪(樹脂タイプ)完成 標準はエアタイヤ仕様となります。	1	本	2		左右共通
タイヤなど	X-PD07-002	16×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2		
	X-PD07-005	16×1-3/8 チューブ+スーパーバルブ セット	1	本	2		スーパーバルブセット付
	X-PD07-006	16×1-3/8 タイヤ+チューブセット	1	本	2		スーパーバルブセット付
10	X-WF02-010-42B35	CM - 200番台用 座シートセット(芯金・シートビス付) B - 35	1	枚	1		
	X-WF02-010-42B36	CM - 200番台用 座シートセット(芯金・シートビス付) B - 36	1	枚	1		
11	X-WF02-011-42B35	CM - 200番台用 背シートセット(芯金・シートビス付) B - 35	1	枚	1		
	X-WF02-011-42B36	CM - 200番台用 背シートセット(芯金・シートビス付) B - 35	1	枚	1		
13	X-WF07-001L	CM - 220 / 230用 エレベーター付フット・レッグサポートセット(左)	1	個	1		支点ボルト付
	X-WF07-001R	CM - 220 / 230用 エレベーター付フット・レッグサポートセット(右)	1	個	1		
14	X-WF07-015L	CM - 220 / 230用 エレベーター付フット部完成(左)	1	個	1		支点ボルト付
	X-WF07-015R	CM - 220 / 230用 エレベーター付フット部完成(右)	1	個	1		
		とのセットになります。					
16	X-PA01-102	7分用中栓	1	個	2		22×t1.2用
注記							