



シート関係は
座幅・シート色を
ご確認ください。

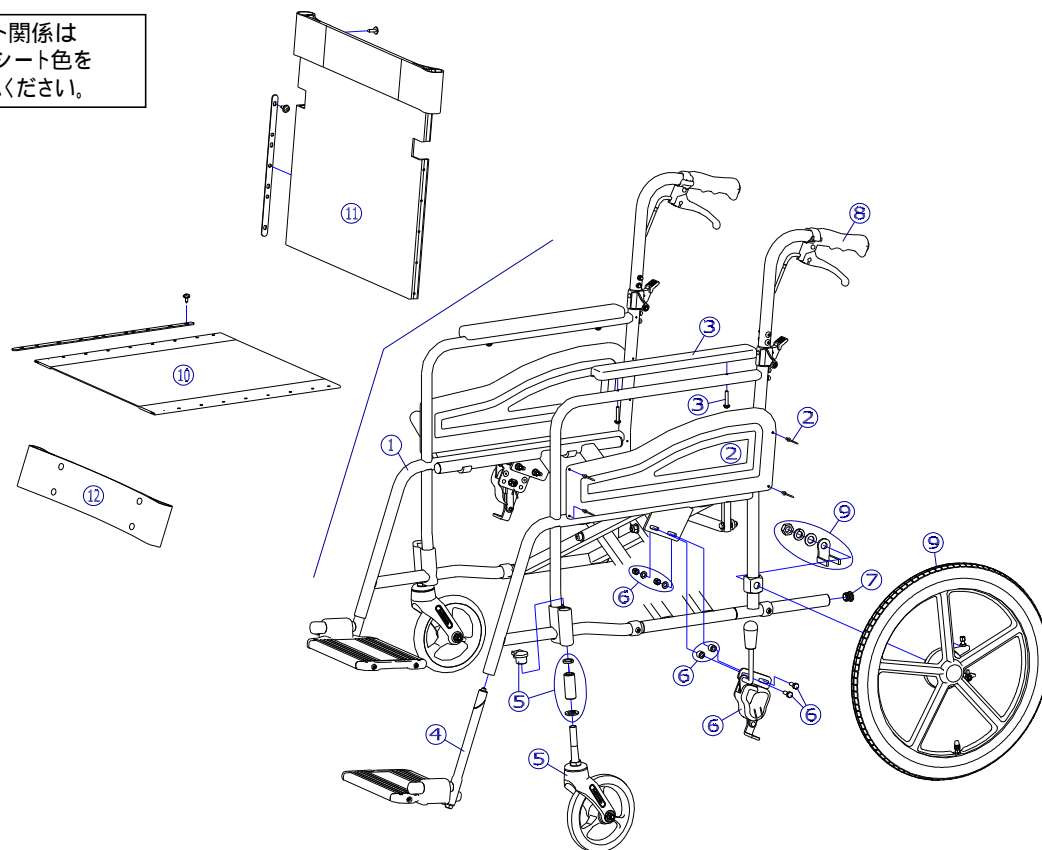

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	本体フレーム	---	---	---		
2	X-WA01-002	AR用 側板セット(リベット付)	1	枚	2		左右共通
3	X-PA02-003	樹脂アームサポートパッド	1	本	2		ボルト付、左右共通
4	X-PF03-022L	RWタイプフットサポート完成 (AR-280 / 380用) (左)	1	枚	1		
	X-PF03-022R	RWタイプフットサポート完成 (AR-280 / 380用) (右)	1	枚	1		
5	X-PC03-010	6インチソリッドキャスト Bセット	1	個	2		
キャスタ輪	X-PC03-022	6インチソリッドキャスト輪(ボルト付セット)	1	個	2		ボルト付
	X-PB01-026L	平型鉄タックルブレーキ[ドラム車輪用] (左)	1	個	1		ボルト付
6	X-PB01-026R	平型鉄タックルブレーキ[ドラム車輪用] (右)	1	個	1		
7	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2		22×t2.8用
8	X-PA01-004	DXグリップ	1	本	2		接着剤必要
	接着剤で取付けていただく事を推奨しております。						
9	X-PD07-021L-2BA	16×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ) [2B-A]完成(左)	1	本	1		ワイヤー無
	X-PD07-021R-2BA	16×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ) [2B-A]完成(右)	1	本	1		
	X-WA07-006L-2BA	16×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ) [2B-A]完成(左) 標準ワイヤーNo.4付	1	本	1		ワイヤー有
	X-WA07-006R-2BA	16×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイプ) [2B-A]完成(右) 標準ワイヤーNo.4付	1	本	1		
標準はエアタイヤ仕様となります。							
タイヤなど	X-PD07-002	16×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2		
	X-PD07-005	16×1-3/8 チューブ+スーパーバルブ セット	1	本	2		スーパーバルブセット付
	X-PD07-006	16×1-3/8 タイヤ+チューブセット	1	本	2		スーパーバルブセット付
	X-PA04-004	標準ワイヤー No.4	1	本	2		
注記	次ページへ続く						

シート関係は
座幅・シート色を
ご確認ください。

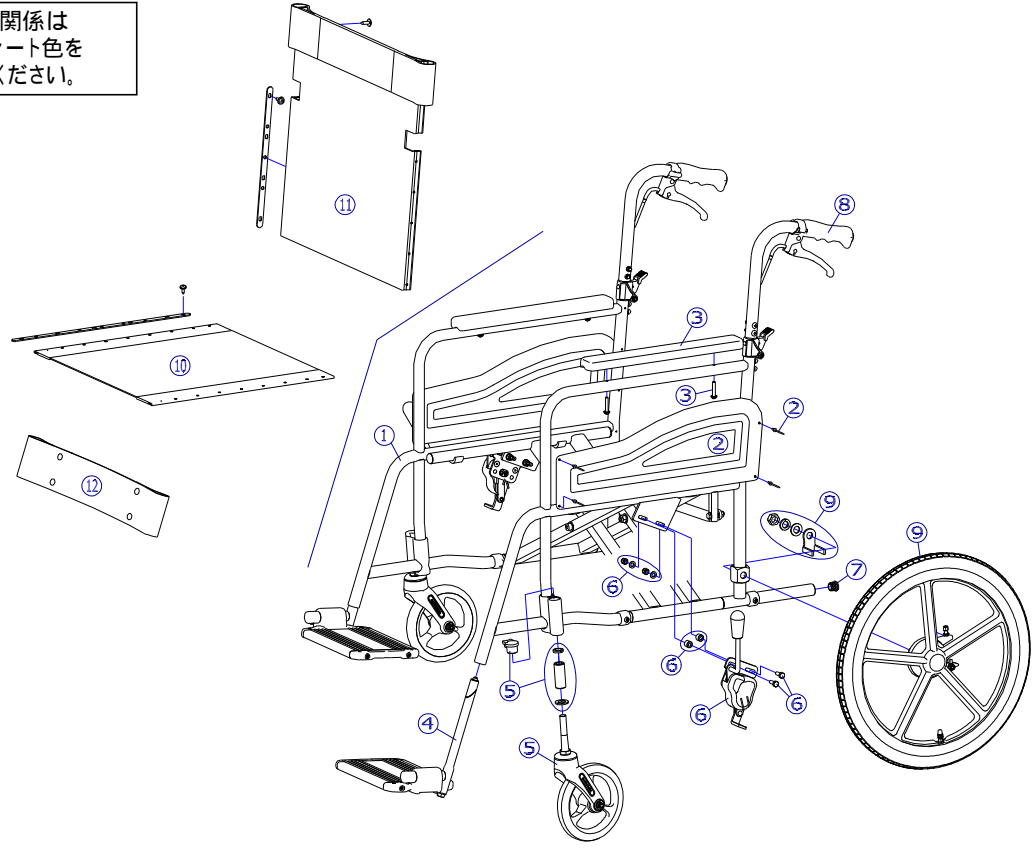

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
10	X-WA06-010-44H51	ARスタンダード幅広用 座シートセット(芯金・シートビス付) 440幅 H-51	1 枚	1			
	X-WA06-010-44S01	ARスタンダード幅広用 座シートセット(芯金・シートビス付) 440幅 S-1	1 枚	1			
	X-WA06-010-44S02	ARスタンダード幅広用 座シートセット(芯金・シートビス付) 440幅 S-2	1 枚	1			
	X-WA06-010-46H51	ARスタンダード幅広用 座シートセット(芯金・シートビス付) 460幅 H-51	1 枚	1			
	X-WA06-010-46S01	ARスタンダード幅広用 座シートセット(芯金・シートビス付) 460幅 S-1	1 枚	1			
	X-WA06-010-46S02	ARスタンダード幅広用 座シートセット(芯金・シートビス付) 460幅 S-2	1 枚	1			
	X-WA06-010-48H51	ARスタンダード幅広用 座シートセット(芯金・シートビス付) 480幅 H-51	1 枚	1			
	X-WA06-010-48S01	ARスタンダード幅広用 座シートセット(芯金・シートビス付) 480幅 S-1	1 枚	1			
X-WA06-010-48S02	ARスタンダード幅広用 座シートセット(芯金・シートビス付) 480幅 S-2	1 枚	1				
11	X-WA06-011-44H51	ARスタンダード幅広背折れ用 背シートセット(芯金・シートビス付) 440幅 H-51	1 枚	1			
	X-WA06-011-44S01	ARスタンダード幅広背折れ用 背シートセット(芯金・シートビス付) 440幅 S-1	1 枚	1			
	X-WA06-011-44S02	ARスタンダード幅広背折れ用 背シートセット(芯金・シートビス付) 440幅 S-2	1 枚	1			
	X-WA06-011-46H51	ARスタンダード幅広背折れ用 背シートセット(芯金・シートビス付) 460幅 H-51	1 枚	1			
	X-WA06-011-46S01	ARスタンダード幅広背折れ用 背シートセット(芯金・シートビス付) 460幅 S-1	1 枚	1			
	X-WA06-011-46S02	ARスタンダード幅広背折れ用 背シートセット(芯金・シートビス付) 460幅 S-2	1 枚	1			
	X-WA06-011-48H51	ARスタンダード幅広背折れ用 背シートセット(芯金・シートビス付) 480幅 H-51	1 枚	1			
	X-WA06-011-48S01	ARスタンダード幅広背折れ用 背シートセット(芯金・シートビス付) 480幅 S-1	1 枚	1			
X-WA06-011-48S02	ARスタンダード幅広背折れ用 背シートセット(芯金・シートビス付) 480幅 S-2	1 枚	1				
12	X-WA06-012-44H51	ARスタンダード幅広用 レッグベルト 440幅 H-51	1 本	1			
	X-WA06-012-44S01	ARスタンダード幅広用 レッグベルト 440幅 S-1	1 本	1			
	X-WA06-012-44S02	ARスタンダード幅広用 レッグベルト 440幅 S-2	1 本	1			
	X-WA06-012-46H51	ARスタンダード幅広用 レッグベルト 460幅 H-51	1 本	1			
	X-WA06-012-46S01	ARスタンダード幅広用 レッグベルト 460幅 S-1	1 本	1			
	X-WA06-012-46S02	ARスタンダード幅広用 レッグベルト 460幅 S-2	1 本	1			
	X-WA06-012-48H51	ARスタンダード幅広用 レッグベルト 480幅 H-51	1 本	1			
	X-WA06-012-48S01	ARスタンダード幅広用 レッグベルト 480幅 S-1	1 本	1			
X-WA06-012-48S02	ARスタンダード幅広用 レッグベルト 480幅 S-2	1 本	1				
注記							