


適合機種
AR-901

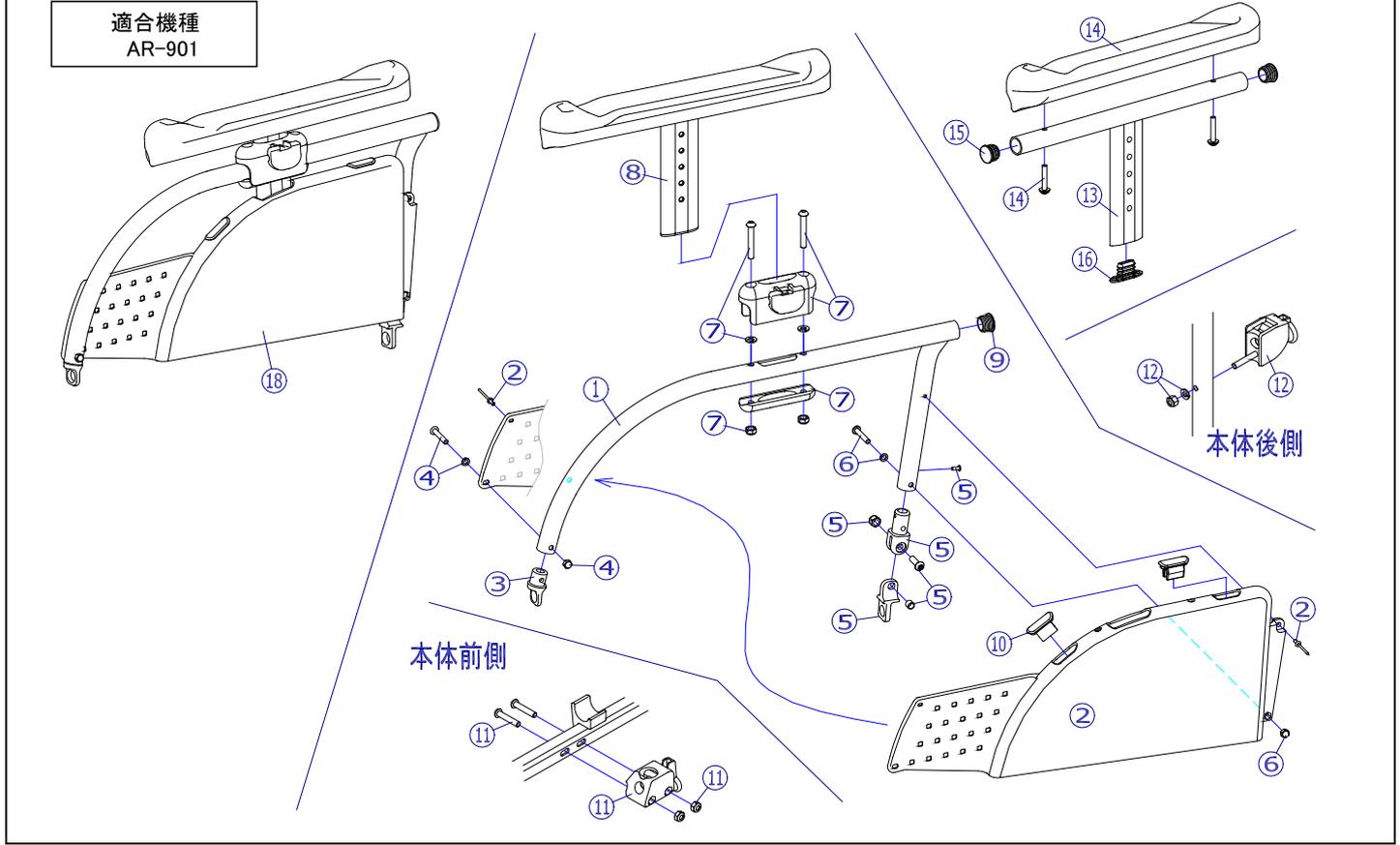

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WA24-001L	AR-901跳ね上げ用 高さ調整アームサポートパイプ(左)	1	本	1		
	X-WA24-001R	AR-901跳ね上げ用 高さ調整アームサポートパイプ(右)	1	本	1		
2	X-WA24-002L	AR/REM跳ね上げ高さ調整アームサポート用 側板(左)	1	枚	1		ボルト付
	X-WA24-002R	AR/REM跳ね上げ高さ調整アームサポート用 側板(右)	1	枚	1		
3	X-WA23-003	AR/REM跳ね上げ用 前側ロックユニット(E) ↑ リベットおよび、④、⑥のボルトが付属します。	1	個	2		ボルト付
	X-WA23-004	AR/REM跳ね上げ用 前側ロックユニット(E)用固定ボルト	1	本	2		
5	X-WA23-005L	AR/REM跳ね上げ用 後側着脱ユニット(G)セット(左)	1	個	1		ボルト付
	X-WA23-005R	AR/REM跳ね上げ用 後側着脱ユニット(G)セット(右) ↑ 組付けた状態となります。リベットおよび、⑥のボルトが付属します。	1	個	1		
6	X-WA23-006	AR/REM跳ね上げ用 後側着脱ユニット(G)用固定ボルト	1	本	1		ナット付
7	X-WA24-007	AR/REM用 肘掛上下ユニット(D)セット	1	個	2		ボルト付、左右共通
8	X-WA24-008L	AR/REM用 高さ調整肘掛セット(左)	1	個	1		
	X-WA24-008R	AR/REM用 高さ調整肘掛セット(右)	1	個	1		
9	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2		
10	X-WA24-010	AR/REM跳ね上げ高さ調整アームサポート用 側板ゴム栓	1	個	4		
11	X-WA26-005L	AR/REM跳ね上げ用 本体前側ロックユニット(F)セット(左)	1	個	1		ボルト付
	X-WA26-005R	AR/REM跳ね上げ用 本体前側ロックユニット(F)セット(右)	1	個	1		
12	X-WA26-006	AR/REM跳ね上げ用 本体後側ロックユニット(H)セット	1	個	1		
14	X-WA24-013	AR/REM用 高さ調整肘掛上下パイプ	1	本	2		左右共通
	X-PA02-004L	DXアームサポートパッド(左)	1	本	1		
	X-PA02-004R	DXアームサポートパッド(右) ↑ 固定用ボルトが付属します。	1	本	1		ボルト付
15	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	4		
16	X-WA24-016	高さ調整肘掛上下パイプ用下部楕円キャップ	1	個	2		
18	X-WA24-018L	AR跳ね上げ用 高さ調節アームサポート完成(左)	1	個	1		
	X-WA24-018R	AR跳ね上げ用 高さ調節アームサポート完成(右)	1	個	1		

注記