


機種によりシートの仕様が異なります。  
 REM-8 : ⑫⑬⑭⑮⑰⑱  
 REM-10 : ⑲⑳㉑

2007年10月頃より  
 一部仕様変更になっております。

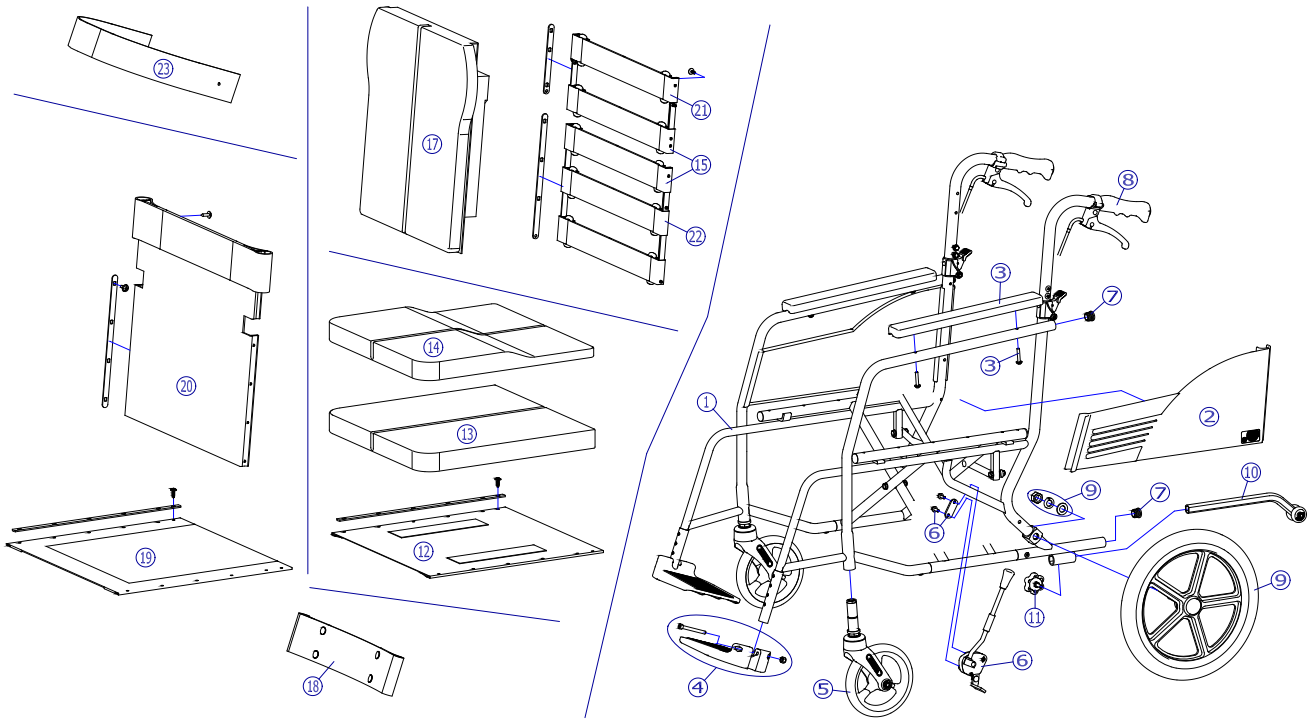

シート関係は座幅・シート色をご確認ください。

2018/2/13修正A

機種名/品名		REM-8/10 車いす				ページ	XQY- WA68D
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
15	X-WA67-015	REM-7/8用 背張り調整ベルト一式(芯金・シートビス付)	1	枚	1		(21)、(22)のセット
21	X-WA67-021	REM-7/8用 背張り調整ベルト上部(芯金・シートビス付)	1	枚	1		
22	X-WA67-022	REM-7/8用 背張り調整ベルト下部(芯金・シートビス付)	1	枚	1		
17	X-WA61-018-00R01	REM用 背クッション【A】 R-1	1	枚	1		
	X-WA61-018-00R02	REM用 背クッション【A】 R-2	1	枚	1		
	X-WA61-018-00R03	REM用 背クッション【A】 R-3	1	枚	1		
18	X-WA67-018-00R01	REM-7/8/9/10用 レッグベルト R-1	1	本	1		
	X-WA67-018-00R02	REM-7/8/9/10用 レッグベルト R-2	1	本	1		
	X-WA67-018-00R03	REM-7/8/9/10用 レッグベルト R-3	1	本	1		
19	X-WA67-019-38R01	REM-9/10用 座シートセット 380幅 R-1	1	枚	1		
	X-WA67-019-38R02	REM-9/10用 座シートセット 380幅 R-2	1	枚	1		
	X-WA67-019-38R03	REM-9/10用 座シートセット 380幅 R-3	1	枚	1		
	X-WA67-019-40R01	REM-9/10用 座シートセット 400幅 R-1	1	枚	1		
	X-WA67-019-40R02	REM-9/10用 座シートセット 400幅 R-2	1	枚	1		
	X-WA67-019-40R03	REM-9/10用 座シートセット 400幅 R-3	1	枚	1		
	X-WA67-019-42R01	REM-9/10用 座シートセット 420幅 R-1	1	枚	1		
	X-WA67-019-42R03	REM-9/10用 座シートセット 420幅 R-3	1	枚	1		
20	X-WA67-020-38R01	REM-9/10用 背シートセット 380幅 R-1	1	枚	1		
	X-WA67-020-38R02	REM-9/10用 背シートセット 380幅 R-2	1	枚	1		
	X-WA67-020-38R03	REM-9/10用 背シートセット 380幅 R-3	1	枚	1		
	X-WA67-020-40R01	REM-9/10用 背シートセット 400幅 R-1	1	枚	1		
	X-WA67-020-40R02	REM-9/10用 背シートセット 400幅 R-2	1	枚	1		
	X-WA67-020-40R03	REM-9/10用 背シートセット 400幅 R-3	1	枚	1		
	X-WA67-020-42R01	REM-9/10用 背シートセット 420幅 R-1	1	枚	1		
	X-WA67-020-42R03	REM-9/10用 背シートセット 420幅 R-3	1	枚	1		
23	X-WA68-023-00R01	REM-8/10用 シートベルト(左右一組) R-1	1	本	1		
	X-WA68-023-00R02	REM-8/10用 シートベルト(左右一組) R-2	1	本	1		
	X-WA68-023-00R03	REM-8/10用 シートベルト(左右一組) R-3	1	本	1		
注記							