


機種名/品名	REM-101 スイングアウト フット・レッグサポート	ページ	XQY- WA83A
--------	-----------------------------	-----	------------

※ 生産時期により①、②形状が異なります。
旧仕様の販売はしていません。(互換性あり)

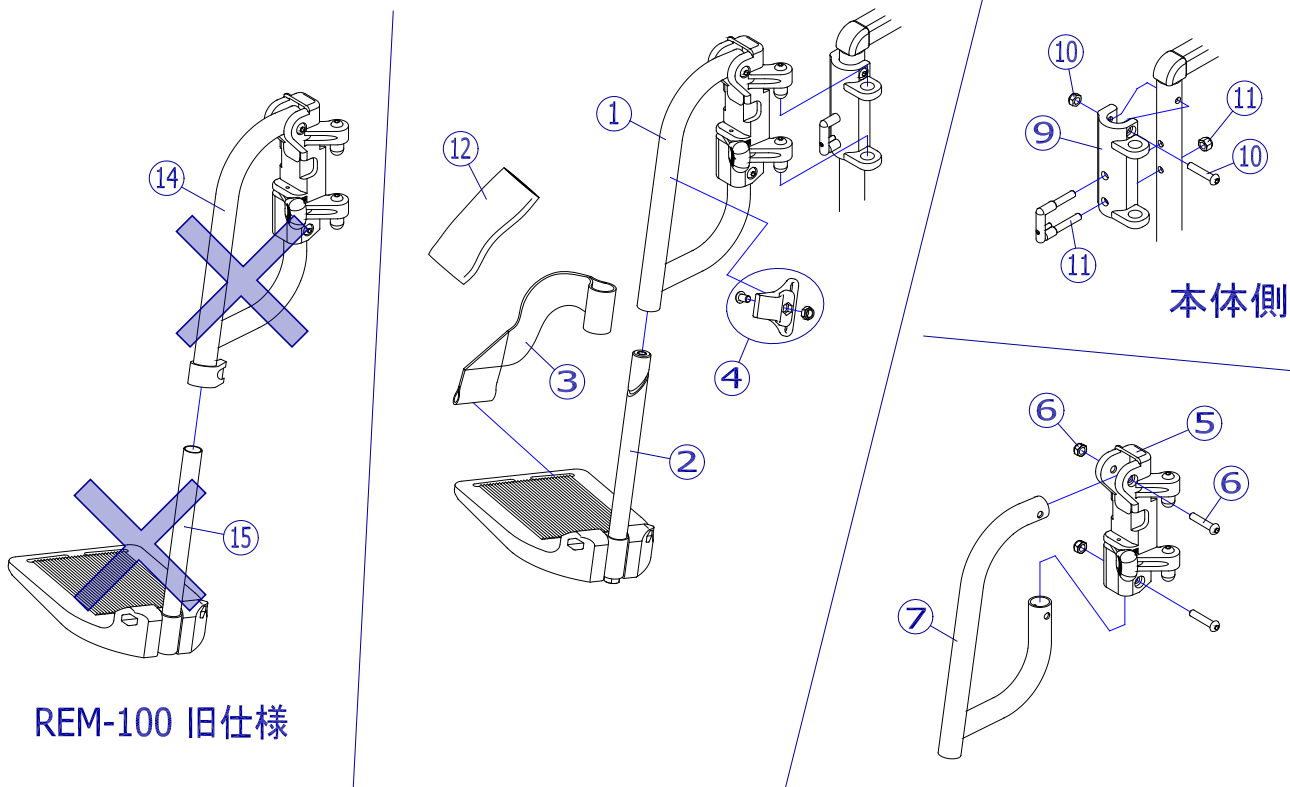

2018/3/27修正A

機種名/品名		REM-101 スイングアウト フット・レッグサポート		ページ	XQY- WA83B		
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WA83-001L	REM-101用 スイングアウトフット・レッグサポート(左)	1 個	1			
	X-WA83-001R	REM-101用 スイングアウトフット・レッグサポート(右)	1 個	1			
2	X-PF04-021L	MAタイプ(Lサイズ穴有) φ15. 9用フットサポート完成(左)	1 枚	1			座幅: 400、420
	X-PF04-021R	MAタイプ(Lサイズ穴有) φ15. 9用フットサポート完成(右)	1 枚	1			
	X-PF04-022L	MAタイプ(Mサイズ穴有) φ15. 9用フットサポート完成(左)	1 枚	1			座幅: 380
	X-PF04-022R	MAタイプ(Mサイズ穴有) φ15. 9用フットサポート完成(右)	1 枚	1			
3	X-PG01-002L	樹脂スイングアウト用 レッグベルト(左)	1 本	1			
	X-PG01-002R	樹脂スイングアウト用 レッグベルト(右)	1 本	1			
4	X-PG01-020	φ20用 レッグベルトホルダー	1 個	2			左右共通、ボルト・ナット付
5	X-PG01-005L	樹脂一体型スイングアウトユニット【黒レバー】(左)	1 個	1			
	X-PG01-005R	樹脂一体型スイングアウトユニット【黒レバー】(右)	1 個	1			
		↑ ⑥固定ボルトが付属します。					
6	X-PG01-006	樹脂一体型スイングアウトユニット用固定ボルトセット	1 本	4			ボルト1本、ナット1個
7	X-WA83-007	REM-101用 フット・レッグサポートパイプ	1 本	2			左右共通、ボルト・ナット付
9	X-PG01-017L	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット(A) (左)	1 個	1			φ22用
	X-PG01-017R	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット(A) (右)	1 個	1			φ22用
		↑ ⑩固定ボルト、⑪コの字金具セットが付属します。					
10	X-PG01-011	本体側樹脂一体型スイングアウトユニット(A)用固定ボルト	1 本	2			
11	X-PG01-012	本体側樹脂一体型スイングアウトユニット コの字金具セット(標準A)	1 個	2			
		↑ 六角穴付き止めボルト、ナットが付属します。					
12	X-WA81-018-00R01	REMスイングアウト用 レッグベルトカバー R-1	1 枚	2			
	X-WA81-018-00R02	REMスイングアウト用 レッグベルトカバー R-2	1 枚	2			
	X-WA81-018-00R03	REMスイングアウト用 レッグベルトカバー R-3	1 枚	2			
14	X-WA83-014L	旧REM-100用スイングアウトフット・レッグサポート(左)	====	====	====		販売終了
	X-WA83-014R	旧REM-100用スイングアウトフット・レッグサポート(右)	====	====	====		販売終了
15	X-WA83-015L	MAタイプ クランプ式 φ15. 9用フットサポート完成(左)	====	====	====		販売終了
	X-WA83-015R	MAタイプ クランプ式 φ15. 9用フットサポート完成(右)	====	====	====		販売終了
注記							