



機種名 / 品名	<b>NEXT-11B/10B/12B 車いす</b>					ページ	XQY- WC01B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	本体フレーム	---	---	---	---	機種により形状異なります	
2	X-PA02-008L	NEXTアームサポートパッド(左)	1	本	1		ボルト付	
	X-PA02-008R	NEXTアームサポートパッド(右)	1	本	1			
3	X-WC21-002L	NEXT用 (Lサイズ)フットサポート完成(左)	1	個	1		NEXT-11B、12Bの場合	
	X-WC21-002R	NEXT用 (Lサイズ)フットサポート完成(右)	1	個	1			
	X-WC21-012L	NEXT低床用 (Lサイズ)フットサポート完成(左)	1	個	1		NEXT-10Bの場合	
	X-WC21-012R	NEXT低床用 (Lサイズ)フットサポート完成(右)	1	個	1			
4	X-WC37-001	NEXT用 6インチPUキャストセット	1	個	2		NEXT-11B、10Bの場合	
5	X-WC37-006	NEXT用 6インチPUアジャスタブルキャストセット	1	個	2		NEXT-12Bの場合	
キャスト輪	X-WC37-010	NEXT用 6インチPUキャスト輪セット	1	個	2			
	X-WC37-002	NEXT用 キャスタケースキャップ	1	個	2			
7	X-WC38-001L	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(左)	1	個	1		ボルト付	
	X-WC38-001R	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(右)	1	個	1			
8	X-WC38-005L	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Bタイプ)(左)	1	個	1		ボルト付 プレート黒色	
	X-WC38-005R	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Bタイプ)(右)	1	個	1			
9	X-WC31-022L	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-WC31-022R	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1			
	X-WC01-023L	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左) ワイヤーNX01付	1	本	1		ワイヤー有	
	X-WC01-023R	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右) ワイヤーNX01付	1	本	1			
	NEXT-11B用となります。							
	X-WC31-020L	NEXT用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-WC31-020R	NEXT用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1			
	X-WC01-021L	NEXT用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左) ワイヤーNX02付	1	本	1		ワイヤー有	
	X-WC01-021R	NEXT用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右) ワイヤーNX02付	1	本	1			
	NEXT-10B用となります。							
	X-WC31-024L	NEXT用 24×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-WC31-024R	NEXT用 24×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1			
X-WC01-025L	NEXT用 24×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左) ワイヤーNX02付	1	本	1		ワイヤー有		
X-WC01-025R	NEXT用 24×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右) ワイヤーNX02付	1	本	1				
NEXT-12B用となります。								
注記	次ページへ続く							

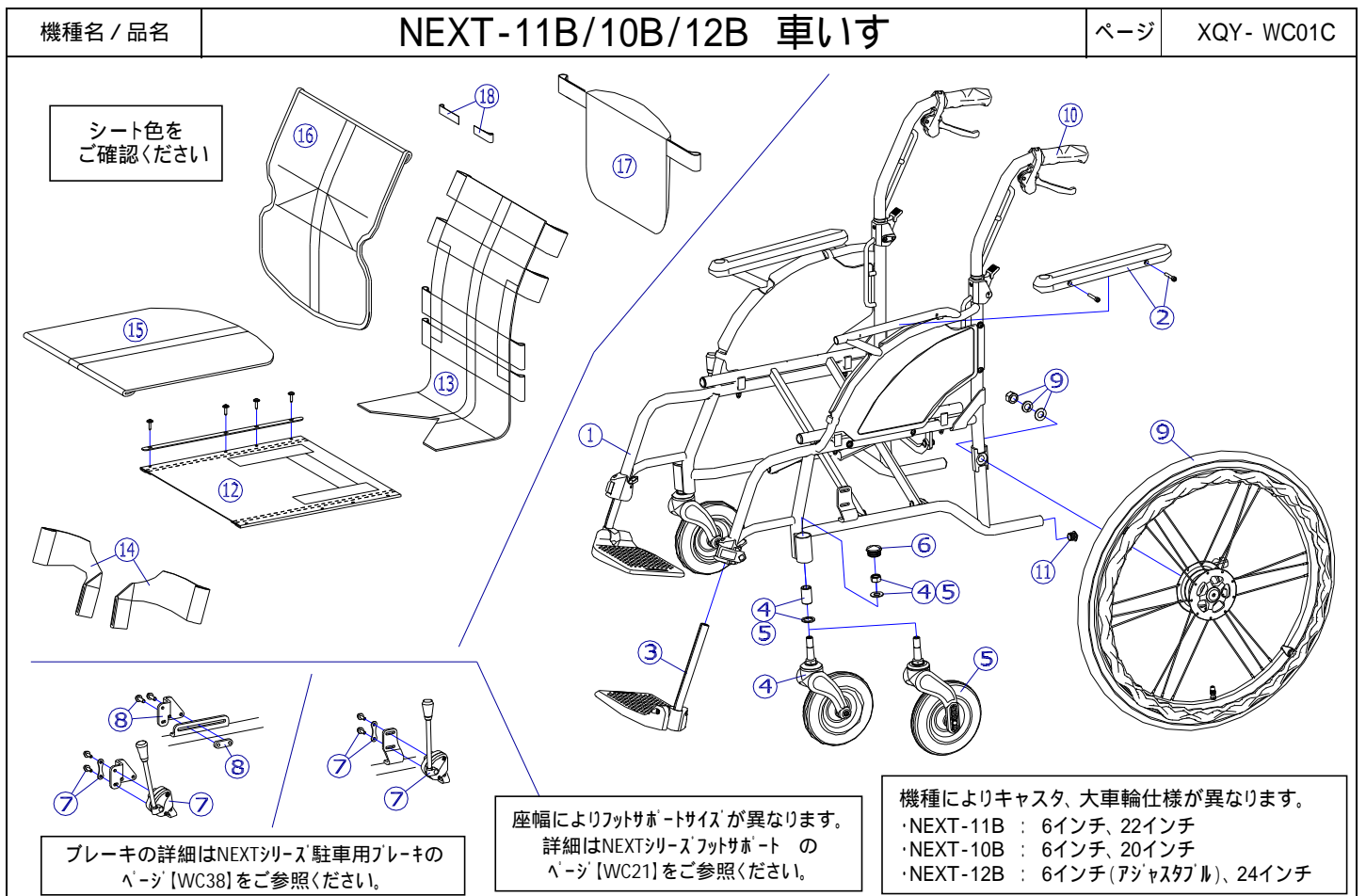

機種名 / 品名	<b>NEXT-11B/10B/12B 車いす</b>					ページ	XQY- WC01D
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
タイヤなど	X-WC31-032	22×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2		
	X-WC31-042	22×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		スーパーバルブセット付
	X-WC31-052	22×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		スーパーバルブセット付
	NEXT-11B用となります。						
	X-WC31-030	20×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2		
	X-WC31-040	20×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		スーパーバルブセット付
	X-WC31-050	20×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		スーパーバルブセット付
	NEXT-10B用となります。						
	X-WC31-034	24×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2		
	X-WC31-044	24×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		スーパーバルブセット付
X-WC31-054	24×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		スーパーバルブセット付	
NEXT-12B用となります。							
10	X-WC35-006	NEXTブレーキワイヤー NX01	1	本	2		NEXT-11Bの場合
	X-WC35-007	NEXTブレーキワイヤー NX02	1	本	2		NEXT-10B/12Bの場合
10	X-PA01-007	NEXTグリップ	1	本	2		接着剤必要
	接着剤で取付けていただく事を推奨しております。						
11	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2		
注記	次ページへ続く						

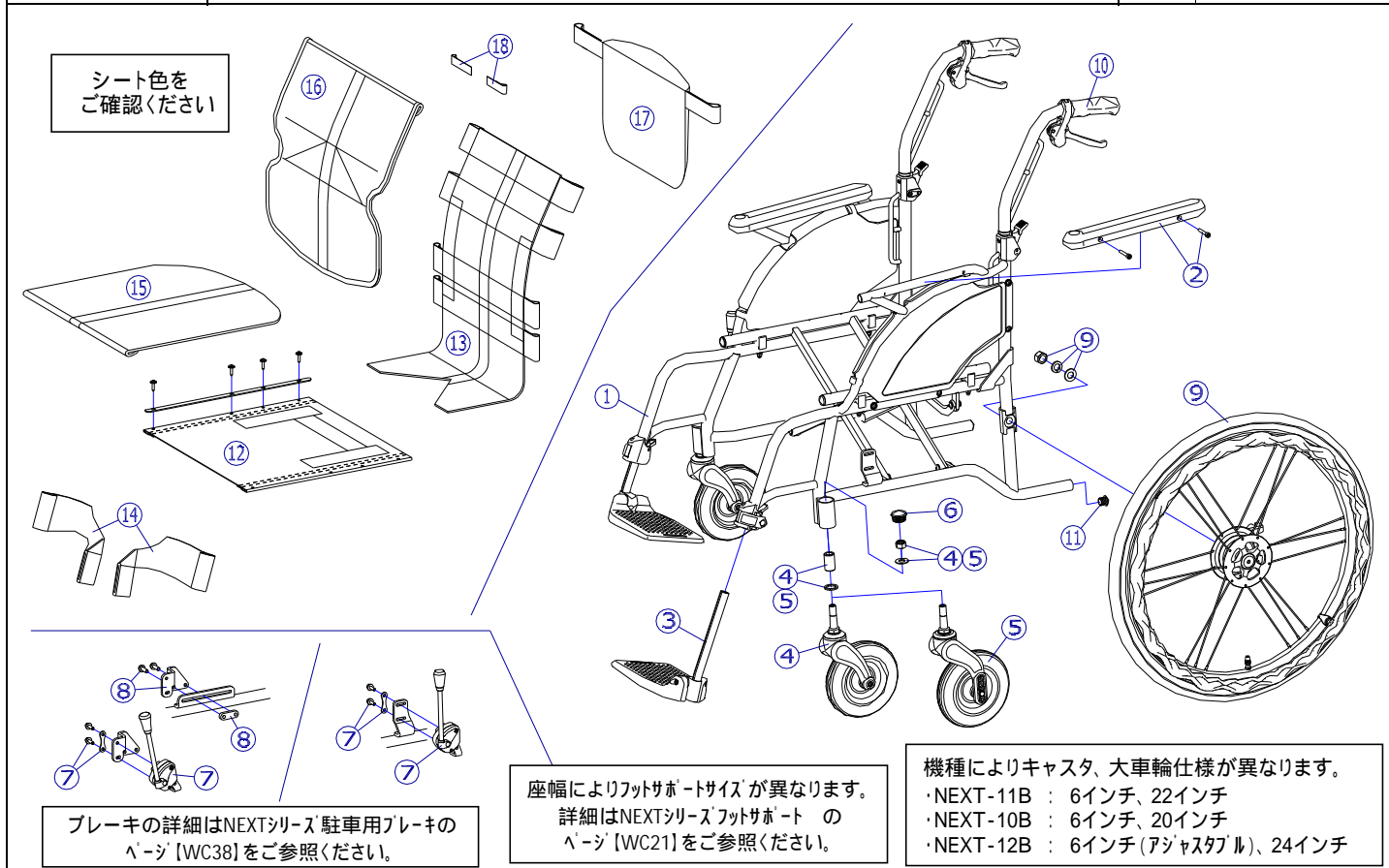

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
12	X-WC01-010-40000	NEXT標準用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 400幅	1	枚	1		NEXT-11Bの場合
	X-WC01-020-40000	NEXT低床用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 400幅	1	枚	1		NEXT-10Bの場合
	X-WC01-030-40000	NEXT高床用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 420幅	1	枚	1		NEXT-12Bの場合
13	X-WC01-013-00000	NEXT用 背張り調整シート	1	枚	1		
	X-WC01-014L	NEXT標準用 レッグベルト(左)	1	本	1		
14	X-WC01-014R	NEXT標準用 レッグベルト(右)	1	本	1		
	15	X-WC01-015-40F01	NEXT用 座カバーシート 400幅 F - 1	1	枚	1	
X-WC01-015-40F02		NEXT用 座カバーシート 400幅 F - 2	1	枚	1		
X-WC01-015-40F03		NEXT用 座カバーシート 400幅 F - 3	1	枚	1		
X-WC01-015-40F04		NEXT用 座カバーシート 400幅 F - 4	1	枚	1		
X-WC01-015-42F01		NEXT用 座カバーシート 420幅 F - 1	1	枚	1		NEXT-12Bの場合
X-WC01-015-42F02		NEXT用 座カバーシート 420幅 F - 2	1	枚	1		
X-WC01-015-42F03		NEXT用 座カバーシート 420幅 F - 3	1	枚	1		
X-WC01-015-42F04		NEXT用 座カバーシート 420幅 F - 4	1	枚	1		
16	X-WC01-016-40F01	NEXT用 背カバーシート F - 1	1	枚	1		
	X-WC01-016-40F02	NEXT用 背カバーシート F - 2	1	枚	1		
	X-WC01-016-40F03	NEXT用 背カバーシート F - 3	1	枚	1		
	X-WC01-016-40F04	NEXT用 背カバーシート F - 4	1	枚	1		
17	X-WC01-017	NEXT用 後付ポケット	1	枚	1		
18	X-WC01-018	NEXT用 ワイヤホルダー(2個セット)	1	個	1		2個セット
シート セット	X-WC01-019-40F01	NEXT用 カバーシートセット 400幅 F - 1 (ポケット付)	1	個	1		NEXT-10B、 11Bの場合 、 のセット
	X-WC01-019-40F02	NEXT用 カバーシートセット 400幅 F - 2 (ポケット付)	1	個	1		
	X-WC01-019-40F03	NEXT用 カバーシートセット 400幅 F - 3 (ポケット付)	1	個	1		
	X-WC01-019-40F04	NEXT用 カバーシートセット 400幅 F - 4 (ポケット付)	1	個	1		
	X-WC01-019-42F01	NEXT用 カバーシートセット 420幅 F - 1 (ポケット付)	1	個	1		NEXT-12Bの場合 、 のセット
	X-WC01-019-42F02	NEXT用 カバーシートセット 420幅 F - 2 (ポケット付)	1	個	1		
	X-WC01-019-42F03	NEXT用 カバーシートセット 420幅 F - 3 (ポケット付)	1	個	1		
	X-WC01-019-42F04	NEXT用 カバーシートセット 420幅 F - 4 (ポケット付)	1	個	1		