


2018/11/9修正D


機種名/品名		NEXT-11B/10B/12B 車いす				ページ	XQY- WC01B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	本体フレーム	---	---	---	---	機種により形状異なります	
2	X-PA02-008L	NEXTアームサポートパッド(左)	1	本	1		ボルト付	
	X-PA02-008R	NEXTアームサポートパッド(右)	1	本	1			
3	X-WC21-002L	NEXT用 (Lサイズ)フットサポート完成(左)	1	個	1		NEXT-11B、12Bの場合	
	X-WC21-002R	NEXT用 (Lサイズ)フットサポート完成(右)	1	個	1			
	X-WC21-012L	NEXT低床用 (Lサイズ)フットサポート完成(左)	1	個	1		NEXT-10Bの場合	
	X-WC21-012R	NEXT低床用 (Lサイズ)フットサポート完成(右)	1	個	1			
4	X-WC37-001	NEXT用 6インチPUキャストセット	1	個	2		NEXT-11B、10Bの場合	
5	X-WC37-006	NEXT用 6インチPUアジャスタブルキャストセット	1	個	2		NEXT-12Bの場合	
キャスト輪	X-WC37-010	NEXT用 6インチPUキャスト輪セット	1	個	2			
6	X-WC37-002	キャストケースキャップ【N】	1	個	2			
7	X-WC38-001L	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(左)	1	個	1		ボルト付	
	X-WC38-001R	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(右)	1	個	1			
8	X-WC38-005L	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Bタイプ)(左)	1	個	1		ボルト付 プレート黒色	
	X-WC38-005R	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Bタイプ)(右)	1	個	1			
9	X-WC31-022L	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-WC31-022R	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1			
	X-WC01-023L	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左) ワイヤーNX01付	1	本	1		ワイヤー有	
	X-WC01-023R	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右) ワイヤーNX01付	1	本	1			
			↑ NEXT-11B用となります。					
	X-WC31-020L	NEXT用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-WC31-020R	NEXT用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1			
	X-WC01-021L	NEXT用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左) ワイヤーNX02付	1	本	1		ワイヤー有	
	X-WC01-021R	NEXT用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右) ワイヤーNX02付	1	本	1			
			↑ NEXT-10B用となります。					
	X-WC31-024L	NEXT用 24×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-WC31-024R	NEXT用 24×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1			
X-WC01-025L	NEXT用 24×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左) ワイヤーNX02付	1	本	1		ワイヤー有		
X-WC01-025R	NEXT用 24×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右) ワイヤーNX02付	1	本	1				
		↑ NEXT-12B用となります。						
注記	次ページへ続く							

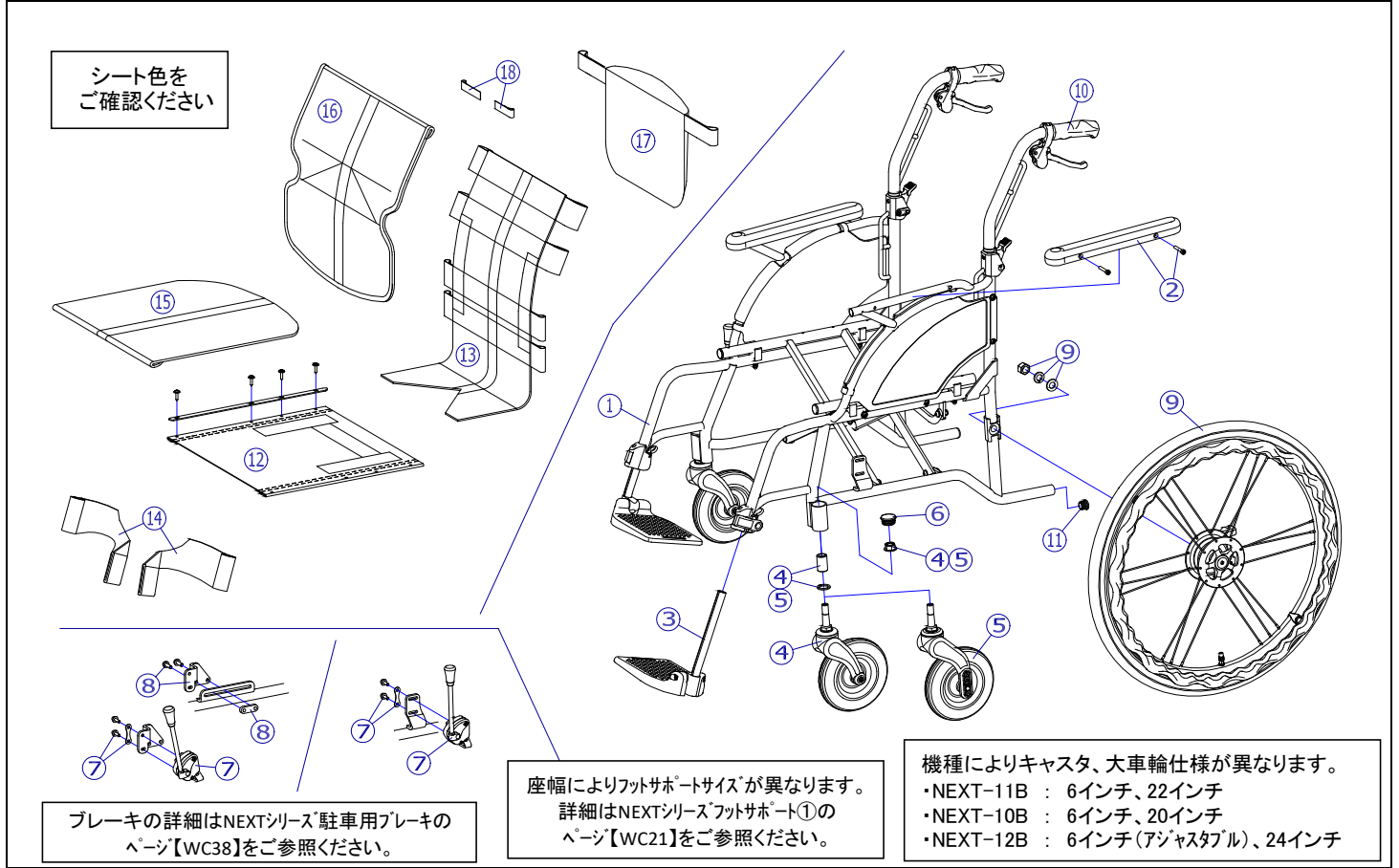

③

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
タイヤなど	X-WC31-032	22×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-042	22×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		スーパーバルブセット付	
	X-WC31-052	22×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		スーパーバルブセット付	
		↑ NEXT-11B用となります。						
	X-WC31-030	20×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-040	20×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		スーパーバルブセット付	
	X-WC31-050	20×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		スーパーバルブセット付	
		↑ NEXT-10B用となります。						
	X-WC31-034	24×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-044	24×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		スーパーバルブセット付	
X-WC31-054	24×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		スーパーバルブセット付		
	↑ NEXT-12B用となります。							
10	X-WC35-006	NEXTブレーキワイヤー NX01	1	本	2		NEXT-11Bの場合	
	X-WC35-007	NEXTブレーキワイヤー NX02	1	本	2		NEXT-10B/12Bの場合	
10	X-PA01-007	NEXTグリップ	1	本	2		接着剤必要	
		↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。						
11	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2			
12	X-WC01-010-38000	NEXT標準用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 380幅	1	枚	1		NEXT-11B 380幅の場合	
	X-WC01-010-40000	NEXT標準用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 400幅	1	枚	1		NEXT-11B 400幅の場合	
	X-WC01-010-42000	NEXT標準用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 420幅	1	枚	1		NEXT-11B 420幅の場合	
	X-WC01-020-40000	NEXT低床用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 400幅	1	枚	1		NEXT-10Bの場合	
	X-WC01-030-42000	NEXT高床用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 420幅	1	枚	1		NEXT-12Bの場合	
13	X-WC01-013-00000	NEXT用 背張り調整シート	1	枚	1			
14	X-WC01-014L	NEXT標準用 レッグベルト(左)	1	本	1			
	X-WC01-014R	NEXT標準用 レッグベルト(右)	1	本	1			

注記 次ページへ続く

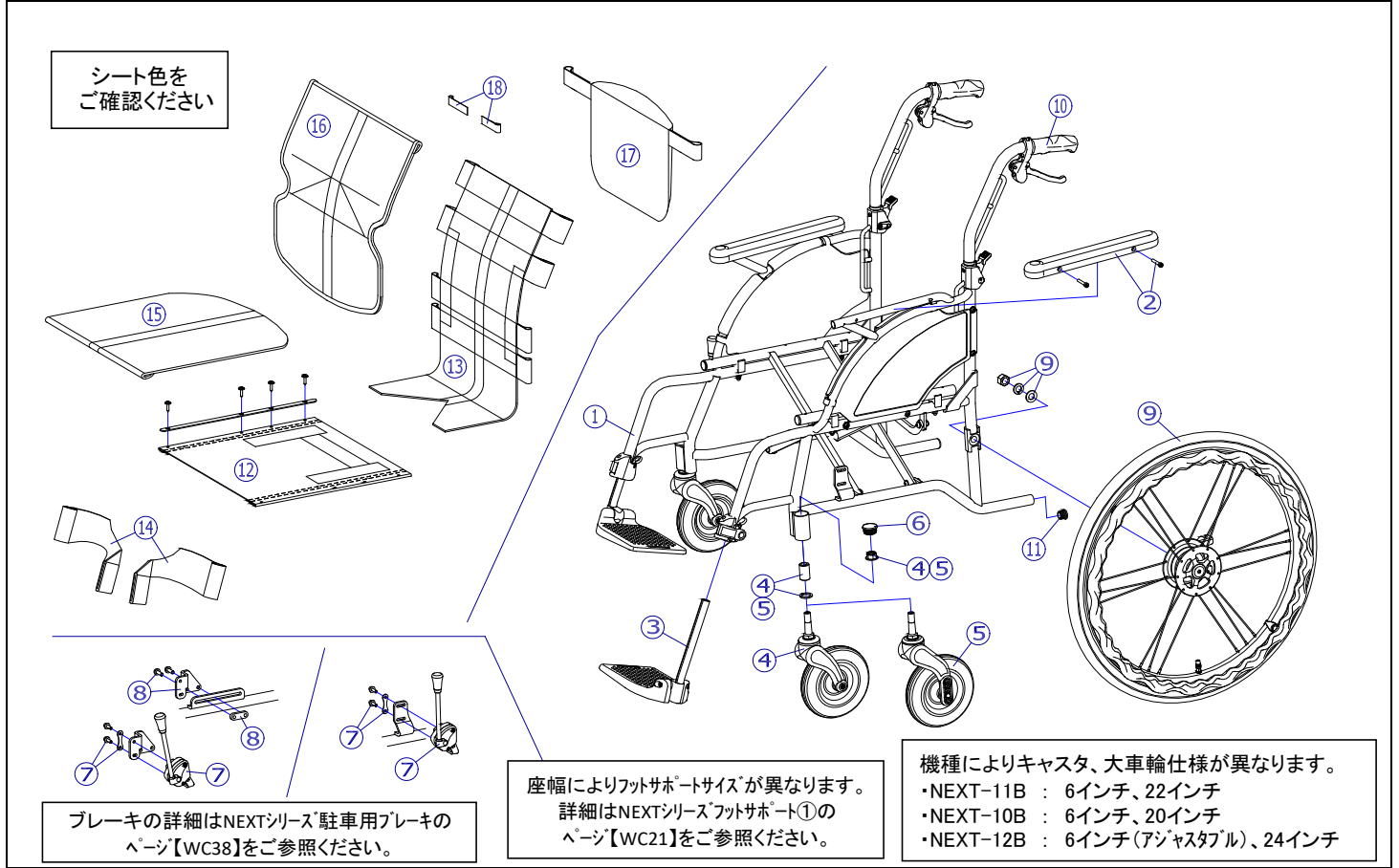

NEXT-11B/10B/12B 車いす

機種名/品名		NEXT-11B/10B/12B 車いす					ページ	XQY- WC01F
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
15	X-WC01-015-38F01	NEXT用 座カバーシート 380幅 F-1	1	枚	1		NEXT-11Bで座幅380の場合	
	X-WC01-015-38F02	NEXT用 座カバーシート 380幅 F-2	1	枚	1			
	X-WC01-015-38F03	NEXT用 座カバーシート 380幅 F-3	1	枚	1			
	X-WC01-015-38F04	NEXT用 座カバーシート 380幅 F-4	1	枚	1			
	X-WC01-015-40F01	NEXT用 座カバーシート 400幅 F-1	1	枚	1		NEXT-10B、11Bで座幅400の場合	
	X-WC01-015-40F02	NEXT用 座カバーシート 400幅 F-2	1	枚	1			
	X-WC01-015-40F03	NEXT用 座カバーシート 400幅 F-3	1	枚	1			
	X-WC01-015-40F04	NEXT用 座カバーシート 400幅 F-4	1	枚	1			
	X-WC01-015-42F01	NEXT用 座カバーシート 420幅 F-1	1	枚	1		NEXT-11Bで座幅420、12Bの場合	
	X-WC01-015-42F02	NEXT用 座カバーシート 420幅 F-2	1	枚	1			
	X-WC01-015-42F03	NEXT用 座カバーシート 420幅 F-3	1	枚	1			
	X-WC01-015-42F04	NEXT用 座カバーシート 420幅 F-4	1	枚	1			
16	X-WC01-016-40F01	NEXT用 背カバーシート F-1	1	枚	1			
	X-WC01-016-40F02	NEXT用 背カバーシート F-2	1	枚	1			
	X-WC01-016-40F03	NEXT用 背カバーシート F-3	1	枚	1			
	X-WC01-016-40F04	NEXT用 背カバーシート F-4	1	枚	1			
17	X-WC01-017	NEXT用 後付ポケット	1	枚	1			
18	X-WC01-018	NEXT用 フイヤーホルダー(2個セット)	1	個	1		2個セット	
シートセット	X-WC01-019-38F01	NEXT用 カバーシートセット 380幅 F-1(ポケット付)	1	個	1		NEXT-10Bで座幅380の場合 ⑮、⑯、⑰のセット	
	X-WC01-019-38F02	NEXT用 カバーシートセット 380幅 F-2(ポケット付)	1	個	1			
	X-WC01-019-38F03	NEXT用 カバーシートセット 380幅 F-3(ポケット付)	1	個	1			
	X-WC01-019-38F04	NEXT用 カバーシートセット 380幅 F-4(ポケット付)	1	個	1			
	X-WC01-019-40F01	NEXT用 カバーシートセット 400幅 F-1(ポケット付)	1	個	1		NEXT-10B、11Bで座幅400の場合 ⑮、⑯、⑰のセット	
	X-WC01-019-40F02	NEXT用 カバーシートセット 400幅 F-2(ポケット付)	1	個	1			
	X-WC01-019-40F03	NEXT用 カバーシートセット 400幅 F-3(ポケット付)	1	個	1			
	X-WC01-019-40F04	NEXT用 カバーシートセット 400幅 F-4(ポケット付)	1	個	1			
	X-WC01-019-42F01	NEXT用 カバーシートセット 420幅 F-1(ポケット付)	1	個	1		NEXT-11Bで座幅420、13Bの場合 ⑮、⑯、⑰のセット	
	X-WC01-019-42F02	NEXT用 カバーシートセット 420幅 F-2(ポケット付)	1	個	1			
	X-WC01-019-42F03	NEXT用 カバーシートセット 420幅 F-3(ポケット付)	1	個	1			
	X-WC01-019-42F04	NEXT用 カバーシートセット 420幅 F-4(ポケット付)	1	個	1			
注記								