


機種名/品名	NEXT-31B 車いす						ページ	XQY- WC03B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	本体フレーム	---	---	---	---		
2	X-WC12-001L	NEXT跳ね上げ用 アームサポート完成(左)	1	個	1			
	X-WC12-001R	NEXT跳ね上げ用 アームサポート完成(右)	1	個	1			
3	X-WC03-003L	NEXT-31/41用 スイングアウト完成(左)	1	個	1		⑫レッグベルト含	
	X-WC03-003R	NEXT-31/41用 スイングアウト完成(右)	1	個	1			
4	X-WC37-001	NEXT用 6インチPUキャスタセット	1	個	2			
	キャスタ輪 X-WC37-010	NEXT用 6インチPUキャスタ輪セット	1	個	2			
5	X-WC37-002	キャスタケースキャップ【N】	1	個	2			
6	X-WC38-001L	NEXT用 ミニタックルプレーキセット(左)	1	個	1		ボルト付	
	X-WC38-001R	NEXT用 ミニタックルプレーキセット(右)	1	個	1			
7	X-WC31-022L	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-WC31-022R	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1			
	X-WC01-023L	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左) ワイヤーNX01付	1	本	1		ワイヤー有	
	X-WC01-023R	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右) ワイヤーNX01付	1	本	1			
		↑ 標準はエアタイヤ仕様となります。						
タイヤなど	X-WC31-032	22×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-042	22×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		スーパーバルブセット付	
	X-WC31-052	22×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		スーパーバルブセット付	
	X-WC35-006	NEXTブレーキワイヤー NX01	1	本	2			
8	X-PA01-007	NEXTグリップ	1	本	2		接着剤必要	
	↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。							
9	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2			
10	X-WC01-010-38000	NEXT標準用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 380幅	1	枚	1			
	X-WC01-010-40000	NEXT標準用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 400幅	1	枚	1			
	X-WC01-010-42000	NEXT標準用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 420幅	1	枚	1			
11	X-WC01-013-00000	NEXT用 背張り調整シート	1	枚	1			
12	X-WC03-012L	NEXTスイング用 レッグベルト(左)	1	本	1			
	X-WC03-012R	NEXTスイング用 レッグベルト(右)	1	本	1			
注記								

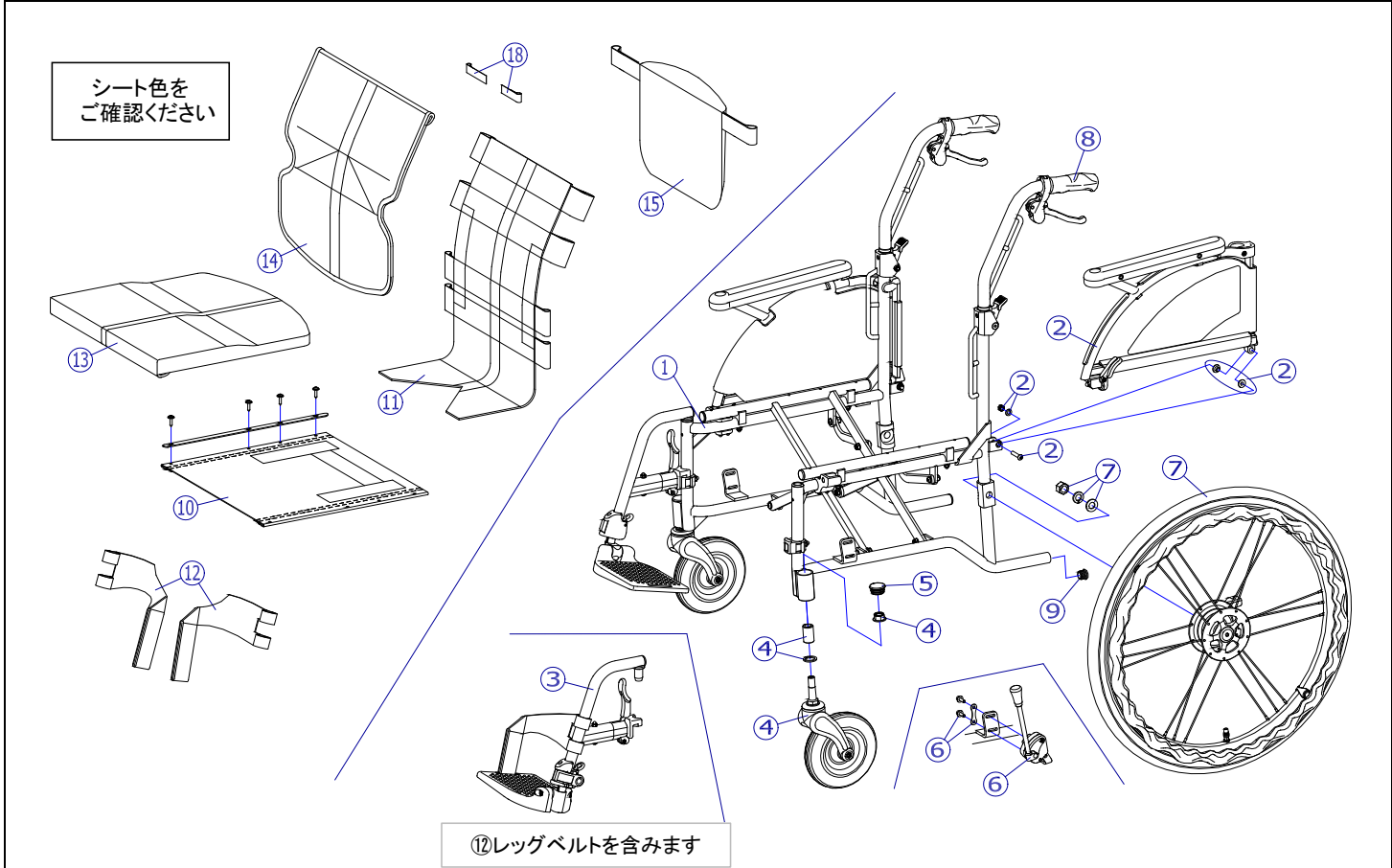

③

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
13	X-WC03-013-38F01	NEXT用 座立体クッション 380幅 F-1	1	枚	1		
	X-WC03-013-38F02	NEXT用 座立体クッション 380幅 F-2	1	枚	1		
	X-WC03-013-38F03	NEXT用 座立体クッション 380幅 F-3	1	枚	1		
	X-WC03-013-38F04	NEXT用 座立体クッション 380幅 F-4	1	枚	1		
	X-WC03-013-40F01	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-1	1	枚	1		
	X-WC03-013-40F02	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-2	1	枚	1		
	X-WC03-013-40F03	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-3	1	枚	1		
	X-WC03-013-40F04	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-4	1	枚	1		
	X-WC03-013-42F01	NEXT用 座立体クッション 420幅 F-1	1	枚	1		
	X-WC03-013-42F02	NEXT用 座立体クッション 420幅 F-2	1	枚	1		
	X-WC03-013-42F03	NEXT用 座立体クッション 420幅 F-3	1	枚	1		
	X-WC03-013-42F04	NEXT用 座立体クッション 420幅 F-4	1	枚	1		
14	X-WC01-016-40F01	NEXT用 背カバーシート F-1	1	枚	1		
	X-WC01-016-40F02	NEXT用 背カバーシート F-2	1	枚	1		
	X-WC01-016-40F03	NEXT用 背カバーシート F-3	1	枚	1		
	X-WC01-016-40F04	NEXT用 背カバーシート F-4	1	枚	1		
15	X-WC01-017	NEXT用 後付ポケット	1	枚	1		
18	X-WC01-018	NEXT用 ファイヤーホルダー(2個セット)	1	個	1		2個セット
シートセット	X-WC03-019-38F01	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 380幅 F-1	1	個	1		⑬、⑭、⑮のセット
	X-WC03-019-38F02	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 380幅 F-2	1	個	1		
	X-WC03-019-38F03	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 380幅 F-3	1	個	1		
	X-WC03-019-38F04	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 380幅 F-4	1	個	1		
	X-WC03-019-40F01	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-1	1	個	1		⑬、⑭、⑮のセット
	X-WC03-019-40F02	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-2	1	個	1		
	X-WC03-019-40F03	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-3	1	個	1		
	X-WC03-019-40F04	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-4	1	個	1		
	X-WC03-019-42F01	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 420幅 F-1	1	個	1		⑬、⑭、⑮のセット
	X-WC03-019-42F02	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 420幅 F-2	1	個	1		
	X-WC03-019-42F03	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 420幅 F-3	1	個	1		
	X-WC03-019-42F04	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 420幅 F-4	1	個	1		

注記	
----	--