


機種名 / 品名		NEXT-61B 車いす				ページ	XQY- WC06B	
番号	品番	品名	注文単位		一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	本体フレーム	---	---	---	---	---	
2	X-WC13-001L	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アームサポート完成(左)	1	個	1			
	X-WC13-001R	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アームサポート完成(右)	1	個	1			
3	X-WC05-003L	NEXT - 51 / 61用 スイングアウト完成(左)	1	個	1			レッグベルト付
	X-WC05-003R	NEXT - 51 / 61用 スイングアウト完成(右)	1	個	1			
4	X-WC37-008	NEXT用 6インチPUショートアジャスタブルキャストセット	1	個	2			
キャスト輪	X-WC37-010	NEXT用 6インチPUキャスト輪セット	1	個	2			
5	X-WC37-002	NEXT用 キャスタケースキャップ	1	個	2			
6	X-WC38-001L	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(左)	1	個	1			ボルト付
	X-WC38-001R	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(右)	1	個	1			
7	X-WC38-005L	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Bタイプ)(左)	1	個	1			ボルト付 プレート黒色
	X-WC38-005R	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Bタイプ)(右)	1	個	1			
8	X-WC32-001L	NEXT用 16×1-3/8軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1			ワイヤー無
	X-WC32-001R	NEXT用 16×1-3/8軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1			
	X-WC06-002L	NEXT用 16×1-3/8軽量ドラム車輪セット(左) ワイヤーNX03付	1	本	1			ワイヤー有
	X-WC06-002R	NEXT用 16×1-3/8軽量ドラム車輪セット(右) ワイヤーNX03付	1	本	1			
		標準はエアータイヤ仕様となります。						
タイヤ など	X-PD07-002	16×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2			
	X-PD07-005	16×1-3/8 チューブ+スーパーバルブ セット	1	本	2			スーパーバルブセット付
	X-PD07-006	16×1-3/8 タイヤ+チューブセット	1	本	2			スーパーバルブセット付
	X-WC35-008	NEXTブレーキワイヤー NX03	1	本	2			
8	X-PA01-007	NEXTグリップ	1	本	2			接着剤必要
		接着剤で取付けていただく事を推奨しております。						
9	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2			
注記								

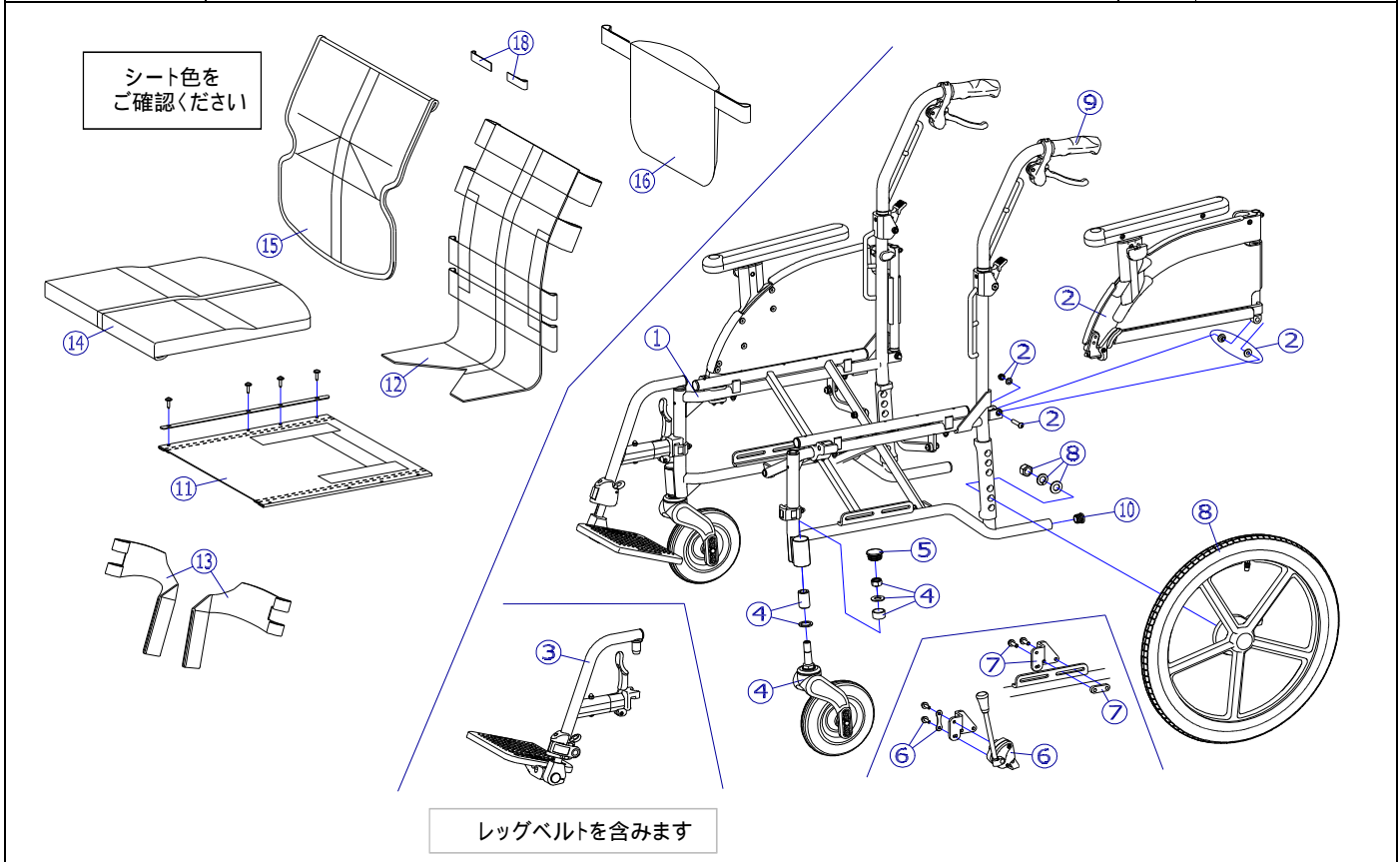

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
10	X-WC01-010-40000	NEXT標準用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 400幅	1 枚	1			
11	X-WC01-013-00000	NEXT用 背張り調整シート	1 枚	1			
12	X-WC03-012L	NEXTスイング用 レッグベルト(左)	1 本	1			
	X-WC03-012R	NEXTスイング用 レッグベルト(右)	1 本	1			
13	X-WC03-014-40F01	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-1	1 枚	1			
	X-WC03-014-40F02	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-2	1 枚	1			
	X-WC03-014-40F03	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-3	1 枚	1			
	X-WC03-014-40F04	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-4	1 枚	1			
14	X-WC01-016-40F01	NEXT用 背カバーシート 400幅 F-1	1 枚	1			
	X-WC01-016-40F02	NEXT用 背カバーシート 400幅 F-2	1 枚	1			
	X-WC01-016-40F03	NEXT用 背カバーシート 400幅 F-3	1 枚	1			
	X-WC01-016-40F04	NEXT用 背カバーシート 400幅 F-4	1 枚	1			
15	X-WC01-017	NEXT用 後付ポケット	1 枚	1			
18	X-WC01-018	NEXT用 ワイヤホルダー(2個セット)	1 個	1			2個セット
シート セット	X-WC03-019-40F01	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-1	1 個	1			、 のセット
	X-WC03-019-40F02	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-2	1 個	1			
	X-WC03-019-40F03	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-3	1 個	1			
	X-WC03-019-40F04	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-4	1 個	1			
注記							