


機種名/品名	NEXT-61B 車いす		ページ	XQY- WC06B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数 見積価格 標準納期 備考	
1	---	本体フレーム	---	---	
2	X-WC13-001L	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アームサポート完成(左)	1 個	1	
	X-WC13-001R	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アームサポート完成(右)	1 個	1	
3	X-WC05-003L	NEXT-51/61用 スイングアウト完成(左)	1 個	1	
	X-WC05-003R	NEXT-51/61用 スイングアウト完成(右)	1 個	1	
4	X-WC37-008	NEXT用 6インチPUショートアジャスタブルキャスタセット	1 個	2	
キャスタ輪	X-WC37-010	NEXT用 6インチPUキャスタ輪セット	1 個	2	
5	X-WC37-002	キャスタケースキャップ【N】	1 個	2	
6	X-WC38-001L	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(左)	1 個	1	
	X-WC38-001R	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(右)	1 個	1	
7	X-WC38-005L	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Bタイプ)(左)	1 個	1	
	X-WC38-005R	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Bタイプ)(右)	1 個	1	
8	X-WC32-001L	NEXT用 16×1-3/8軽量ドラム車輪セット(左)	1 本	1	
	X-WC32-001R	NEXT用 16×1-3/8軽量ドラム車輪セット(右)	1 本	1	
	X-WC02-003L	NEXT用 16×1-3/8軽量ドラム車輪セット(左) ワイヤーNX03付	1 本	1	
	X-WC02-003R	NEXT用 16×1-3/8軽量ドラム車輪セット(右) ワイヤーNX03付	1 本	1	
		↑ 標準はエアタイヤ仕様となります。			
タイヤなど	X-PD07-002	16×1-3/8 タイヤのみ	1 本	2	
	X-PD07-005	16×1-3/8 チューブ+スーパーバルブ セット	1 本	2	
	X-PD07-006	16×1-3/8 タイヤ+チューブセット	1 本	2	
	X-WC35-008	NEXTブレーキワイヤー NX03	1 本	2	
9	X-PA01-007	NEXTグリップ	1 本	2	
	↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。				
10	X-PA01-101	6分用中栓	1 個	2	
11	X-WC01-010-38000	NEXT標準用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 380幅	1 枚	1	
	X-WC01-010-40000	NEXT標準用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 400幅	1 枚	1	
	X-WC01-010-42000	NEXT標準用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 420幅	1 枚	1	
12	X-WC01-013-00000	NEXT用 背張り調整シート	1 枚	1	
13	X-WC03-012L	NEXTスイング用 レッグベルト(左)	1 本	1	
	X-WC03-012R	NEXTスイング用 レッグベルト(右)	1 本	1	
注記					

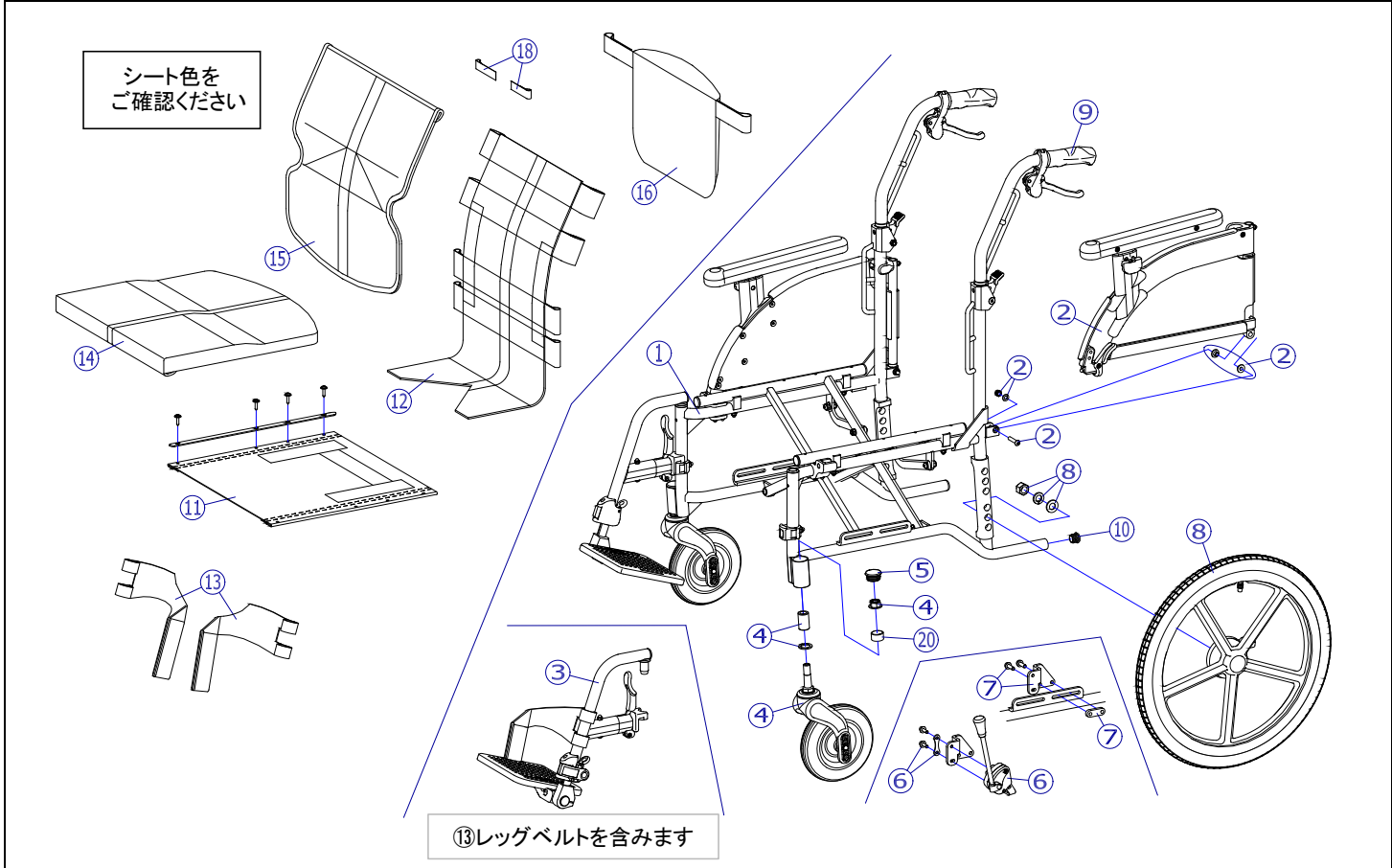

③

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
14	X-WC03-013-38F01	NEXT用 座立体クッション 380幅 F-1	1	枚	1		
	X-WC03-013-38F02	NEXT用 座立体クッション 380幅 F-2	1	枚	1		
	X-WC03-013-38F03	NEXT用 座立体クッション 380幅 F-3	1	枚	1		
	X-WC03-013-38F04	NEXT用 座立体クッション 380幅 F-4	1	枚	1		
	X-WC03-013-40F01	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-1	1	枚	1		
	X-WC03-013-40F02	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-2	1	枚	1		
	X-WC03-013-40F03	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-3	1	枚	1		
	X-WC03-013-40F04	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-4	1	枚	1		
	X-WC03-013-42F01	NEXT用 座立体クッション 420幅 F-1	1	枚	1		
	X-WC03-013-42F02	NEXT用 座立体クッション 420幅 F-2	1	枚	1		
	X-WC03-013-42F03	NEXT用 座立体クッション 420幅 F-3	1	枚	1		
	X-WC03-013-42F04	NEXT用 座立体クッション 420幅 F-4	1	枚	1		
15	X-WC01-016-40F01	NEXT用 背カバーシート F-1	1	枚	1		
	X-WC01-016-40F02	NEXT用 背カバーシート F-2	1	枚	1		
	X-WC01-016-40F03	NEXT用 背カバーシート F-3	1	枚	1		
	X-WC01-016-40F04	NEXT用 背カバーシート F-4	1	枚	1		
16	X-WC01-017	NEXT用 後付ポケット	1	枚	1		
18	X-WC01-018	NEXT用 ファイヤーホルダー(2個セット)	1	個	1		2個セット
シートセット	X-WC03-019-38F01	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 380幅 F-1	1	個	1		⑭、⑮、⑯のセット
	X-WC03-019-38F02	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 380幅 F-2	1	個	1		
	X-WC03-019-38F03	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 380幅 F-3	1	個	1		
	X-WC03-019-38F04	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 380幅 F-4	1	個	1		
	X-WC03-019-40F01	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-1	1	個	1		⑭、⑮、⑯のセット
	X-WC03-019-40F02	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-2	1	個	1		
	X-WC03-019-40F03	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-3	1	個	1		
	X-WC03-019-40F04	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-4	1	個	1		
	X-WC03-019-42F01	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 420幅 F-1	1	個	1		⑭、⑮、⑯のセット
	X-WC03-019-42F02	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 420幅 F-2	1	個	1		
	X-WC03-019-42F03	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 420幅 F-3	1	個	1		
	X-WC03-019-42F04	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 420幅 F-4	1	個	1		
20	X-WC37-014	NEXT用 キャスタブロックカラー	1	個	2		

注記	
----	--