


適応機種：NEXT-50B、60B

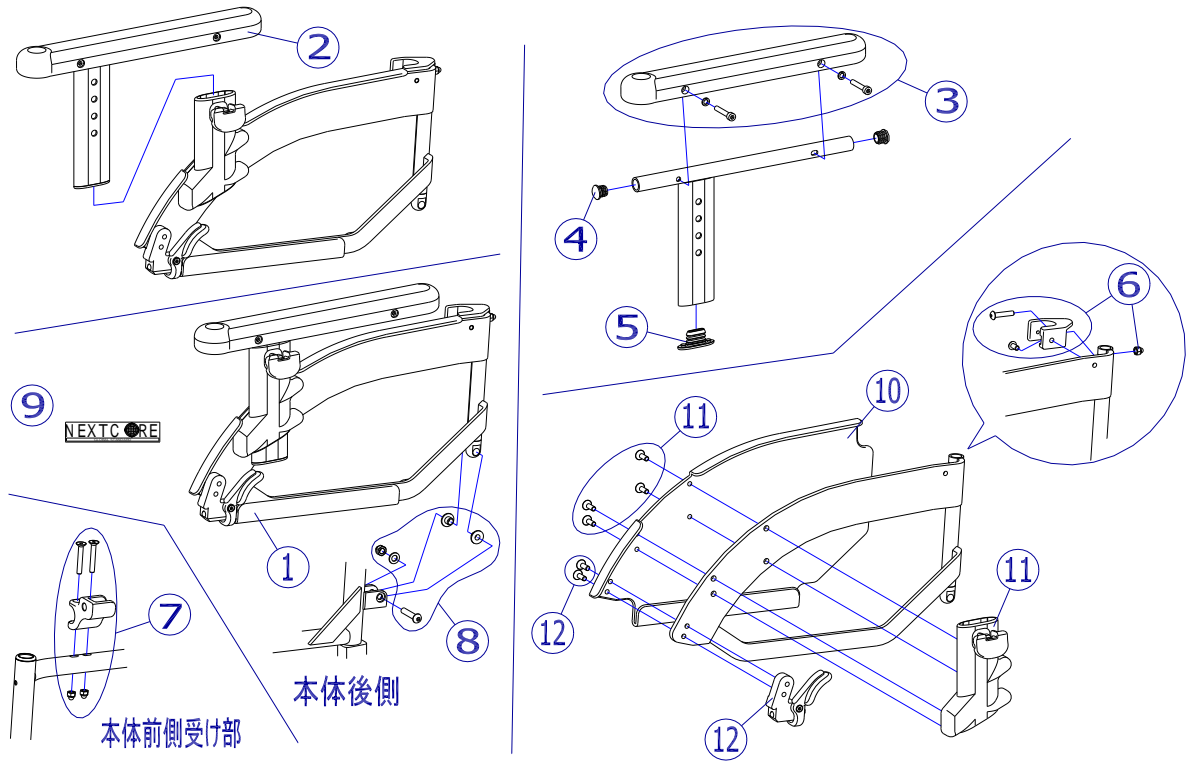

機種名 / 品名		NEXTシリーズ アームサポート				ページ	XQY- WC14B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WC14-001L	NEXT低床跳ね上げ高さ調整用 アームサポート完成(左)	1	個	1		
	X-WC14-001R	NEXT低床跳ね上げ高さ調整用 アームサポート完成(右)	1	個	1		
		肘掛け 支点ボルトが付属します。					
2	X-WC13-002L	NEXT高さ調整用 肘掛セット(左)	1	個	1		
	X-WC13-002R	NEXT高さ調整用 肘掛セット(右)	1	個	1		
3	X-PA02-008L	NEXTアームサポートパッド(左)	1	本	1		ボルト付
	X-PA02-008R	NEXTアームサポートパッド(右)	1	本	1		
4	X-PA01-103	5分用中栓	1	個	4		
5	X-WC13-005	NEXT高さ調整肘掛用 上下パイプ下部楕円キャップ	1	個	2		X-WA24-016と共通
6	X-WC13-006L	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アームサポート部後方ガイドセット(左)	1	個	1		
	X-WC13-006R	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アームサポート部後方ガイドセット(右)	1	個	1		
7	X-WC12-007L	NEXT跳ね上げ用 前側受け金具セット(左)	1	個	1		
	X-WC12-007R	NEXT跳ね上げ用 前側受け金具セット(右)	1	個	1		
8	X-WC12-008	NEXT跳ね上げ用 支点ボルトセット	1	本	2		
9	X-WC11-010	NEXT CORE ステッカー	1	枚	2		
10	X-WC14-010L	NEXT低床跳ね上げ高さ調整用 側板(左)	1	枚	1		
	X-WC14-010R	NEXT低床跳ね上げ高さ調整用 側板(右)	1	枚	1		
11	X-WC14-011L	NEXT低床用 肘掛上下ユニットセット(左)	1	個	1		
	X-WC14-011R	NEXT低床用 肘掛上下ユニットセット(右)	1	個	1		
12	X-WC13-012L	NEXT跳ね上げ高さ調整用 肘掛ロックレバーセット(左)	1	個	1		
	X-WC13-012R	NEXT跳ね上げ高さ調整用 肘掛ロックレバーセット(右)	1	個	1		
注記							