

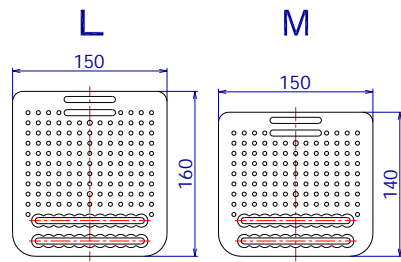


適応機種 : NEXT-51B, 61B
50B, 60B

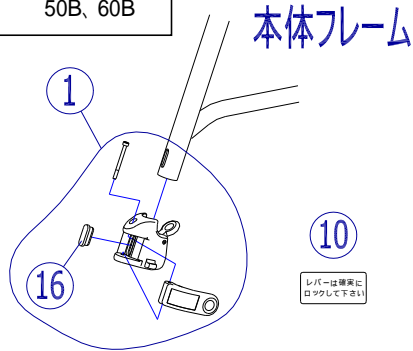

サイズを指定してください。
座幅400, 420mm : Lサイズ
座幅380mm : Mサイズ

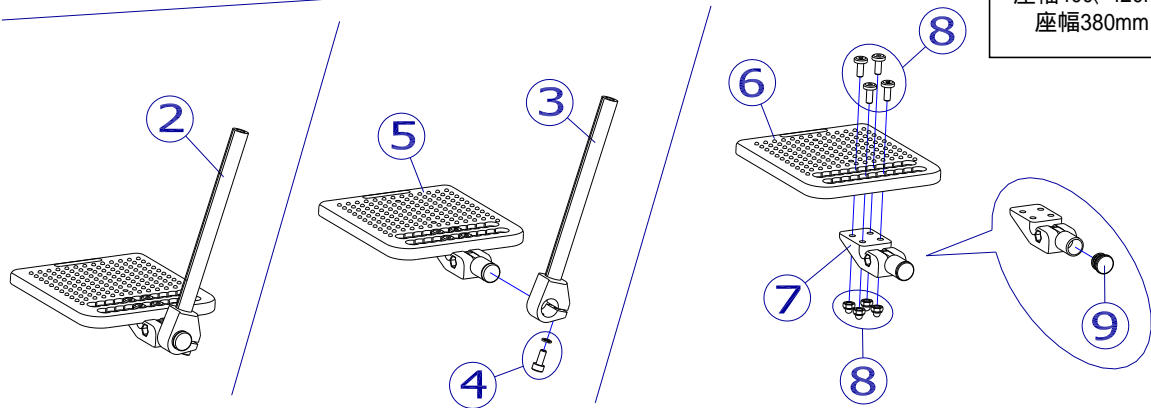

2017/12/12修正A

機種名 / 品名		NEXTシリーズ フットサポート					ページ	XQY- WC22B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-WC21-001L	NEXT用 フットサポート固定部品セット(左)	1	個	1			
	X-WC21-001R	NEXT用 フットサポート固定部品セット(右)	1	個	1			
2	X-WC22-002L	NEXT用 アジャスタブル(Lサイズ)フットサポート完成(左)	1	個	1			
	X-WC22-002R	NEXT用 アジャスタブル(Lサイズ)フットサポート完成(右)	1	個	1			
	X-WC22-012L	NEXT用 アジャスタブル(Mサイズ)フットサポート完成(左)	1	個	1			
	X-WC22-012R	NEXT用 アジャスタブル(Mサイズ)フットサポート完成(右)	1	個	1			
3	X-WC22-001	NEXT用 アジャスタブルフットサポートポストセット ボルトセットが付属します	1	本	2		左右共通	
4	X-WC22-002	NEXT用 アジャスタブルフットサポートポスト下部固定ボルトセット	1	本	2			
5	X-WC22-005L	NEXT用 アジャスタブル(Lサイズ)フットサポート(左)	1	枚	1			
	X-WC22-005R	NEXT用 アジャスタブル(Lサイズ)フットサポート(右)	1	枚	1			
	X-WC22-015L	NEXT用 アジャスタブル(Mサイズ)フットサポート(左)	1	枚	1			
	X-WC22-015R	NEXT用 アジャスタブル(Mサイズ)フットサポート(右)	1	枚	1			
6	X-WC22-006	NEXT用 アジャスタブルフットサポート板 (Lサイズ)	1	枚	2			
	X-WC22-016	NEXT用 アジャスタブルフットサポート板 (Mサイズ)	1	枚	2			
7	X-WC22-007L	NEXT用 アジャスタブルフットサポート基部(左)	1	個	1			
	X-WC22-007R	NEXT用 アジャスタブルフットサポート基部(右)	1	個	1			
8	X-WC22-008	NEXT用 アジャスタブルフットサポート板固定ボルト(4本セット) 4本セット	1	個	2			
9	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2			
10	X-WC21-010	NEXT用 フットレバー ロックシール	1	枚	2		左右共通	
16	X-WC21-016	NEXT用 カムクランプ押さえカラー	1	個	2			
注記								