


機種名 / 品名		NEXT-71B/70B 車いす					ページ	XQY- WC51B
番号	品番	品名	注文単位		一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	本体フレーム	---	---	---	---	---	
2	X-WC53-001L	NEXT6輪自走用 アームサポート完成(左)	1	個	1			
	X-WC53-001R	NEXT6輪自走用 アームサポート完成(右)	1	個	1			
3	X-WC55-002L	NEXT6輪用 フットサポート完成(左)	1	個	1			
	X-WC55-002R	NEXT6輪用 フットサポート完成(右)	1	個	1			プレートサイズ 全長180mm、幅150mm
4	X-WC60-002	NEXT6輪用 キャスタ完成(フロントロングタイプ)	1	個	2			クランプボルト付 71B用
	X-WC60-003	NEXT6輪用 キャスタ完成(フロントショートタイプ)	1	個	2			クランプボルト付 70B用
5	X-WC60-004	NEXT6輪用 キャスタ完成(リアロングタイプ)	1	個	2			クランプボルト付
キャスト輪	X-WC60-011	NEXT6輪用 4インチキャスト輪セット	1	個	2			
7	X-WC57-022L	NEXT6輪用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1			NEXT-71B用(ワイヤ-無)
	X-WC57-022R	NEXT6輪用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1			
	X-WC57-023L	NEXT6輪用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左) ワイヤ-NXL01付	1	本	1			NEXT-71B用(ワイヤ-有)
	X-WC57-023R	NEXT6輪用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右) ワイヤ-NXL01付	1	本	1			
	X-WC57-020L	NEXT6輪用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1			NEXT-70B用(ワイヤ-無)
	X-WC57-020R	NEXT6輪用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1			
	X-WC57-021L	NEXT6輪用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左) ワイヤ-NXL01付	1	本	1			NEXT-70B用(ワイヤ-有)
	X-WC57-021R	NEXT6輪用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右) ワイヤ-NXL01付	1	本	1			
タイヤ など	X-WC31-032	22×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-042	22×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			スーパーバルブセット付
	X-WC31-052	22×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			スーパーバルブセット付
	X-WC31-030	20×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-040	20×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			スーパーバルブセット付
	X-WC31-050	20×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			スーパーバルブセット付
	X-WC35-021	NEXTブレーキワイヤー NXL01	1	本	2			NEXT-71B,70B共用
		NEXT-71B、70B共通です。						
注記	次ページへ続く							

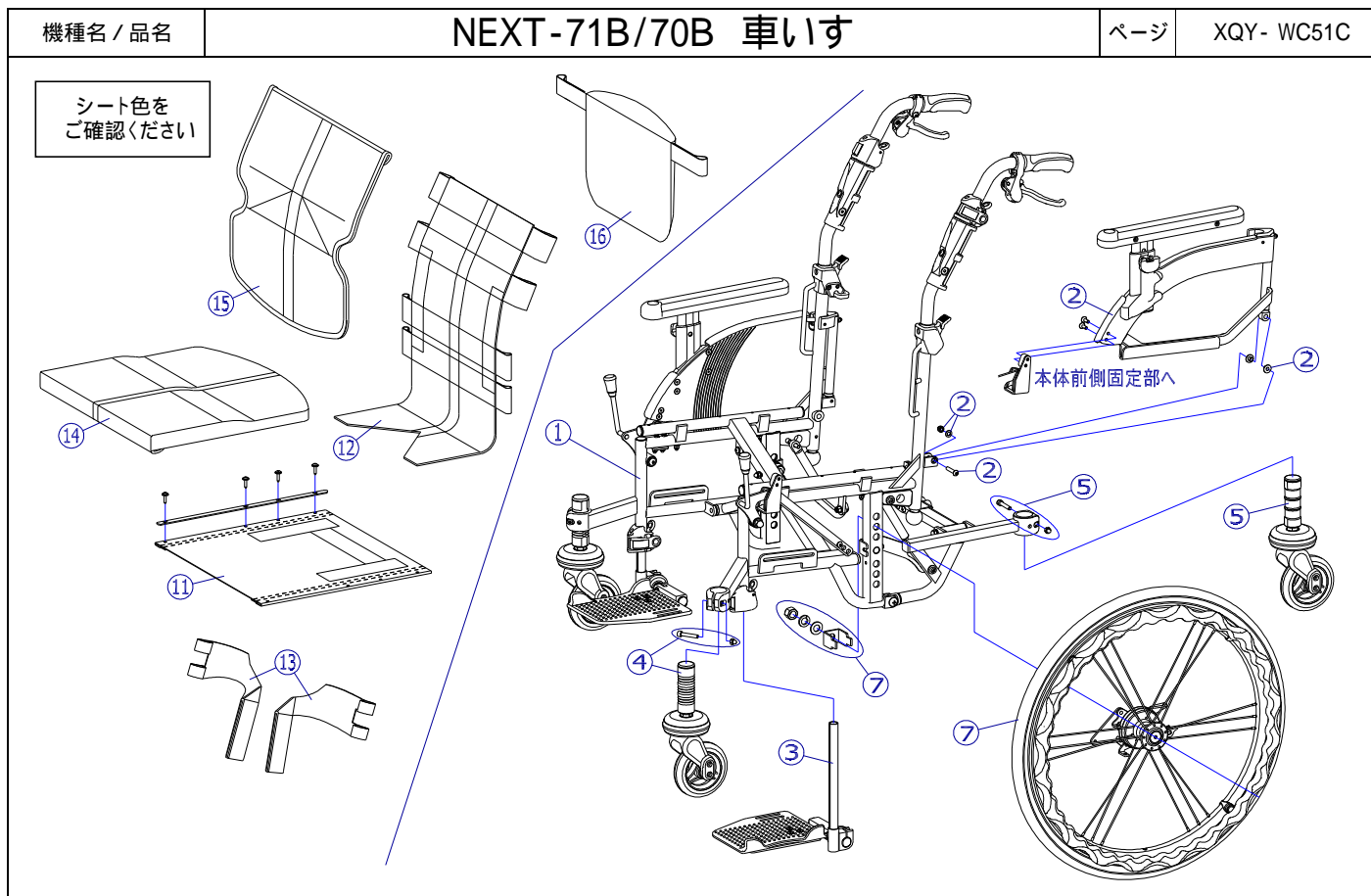

機種名 / 品名		NEXT-71B/70B 車いす					ページ	XQY- WC51D
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
11	X-WC01-020-40000	NEXT低床用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 400幅	1 枚	1				
12	X-WC01-013-00000	NEXT用 背張り調整シート	1 枚	1				
13	X-WC03-012L	NEXTスイング用 レッグベルト(左)	1 本	1				
	X-WC03-012R	NEXTスイング用 レッグベルト(右)	1 本	1				
14	X-WC03-014-40F01	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-1	1 枚	1				
	X-WC03-014-40F02	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-2	1 枚	1				
	X-WC03-014-40F03	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-3	1 枚	1				
	X-WC03-014-40F04	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-4	1 枚	1				
15	X-WC01-016-40F01	NEXT用 背カバーシート 400幅 F-1	1 枚	1				
	X-WC01-016-40F02	NEXT用 背カバーシート 400幅 F-2	1 枚	1				
	X-WC01-016-40F03	NEXT用 背カバーシート 400幅 F-3	1 枚	1				
	X-WC01-016-40F04	NEXT用 背カバーシート 400幅 F-4	1 枚	1				
16	X-WC01-017	NEXT用 後付ポケット	1 枚	1				
シート セット	X-WC03-019-40F01	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-1	1 個	1			、 のセット	
	X-WC03-019-40F02	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-2	1 個	1				
	X-WC03-019-40F03	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-3	1 個	1				
	X-WC03-019-40F04	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-4	1 個	1				
注記								