


機種名/品名	NEXT-81B/80B 車いす	ページ	XQY- WC52B					
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	本体フレーム	---	---	---	---		
2	X-WC54-001L	NEXT6輪介助用 跳ね上げ高さ調整アームサポート完成(左)	1	個	1			
	X-WC54-001R	NEXT6輪介助用 跳ね上げ高さ調整アームサポート完成(右)	1	個	1			
3	X-WC55-002L	NEXT6輪用 フットサポート完成(左)	1	個	1		プレートサイズ	
	X-WC55-002R	NEXT6輪用 フットサポート完成(右)	1	個	1		全長180mm、幅150mm	
4	X-WC60-002	NEXT6輪用 キャスタ完成(フロントロングタイプ)	1	個	2		クランプボルト付 81B用	
	X-WC60-003	NEXT6輪用 キャスタ完成(フロントショートタイプ)	1	個	2		クランプボルト付 80B用	
5	X-WC60-004	NEXT6輪用 キャスタ完成(リアロングタイプ)	1	個	2		クランプボルト付	
キャスト輪	X-WC60-011	NEXT6輪用 4インチキャスト輪セット	1	個	2			
6	X-WC38-001L	NEXT用 ミニタックルプレーキセット(左)	1	個	1		ボルト付	
	X-WC38-001R	NEXT用 ミニタックルプレーキセット(右)	1	個	1			
7	X-WC38-007L	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Cタイプ)(左)	1	個	1		ボルト付	
	X-WC38-007R	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Cタイプ)(右)	1	個	1		プレートシルバー	
8	X-WC58-022L	NEXT6輪用 16×1-3/8ドラム車輪セット(左)	1	本	1		NEXT-81B用(ワイヤー無)	
	X-WC58-022R	NEXT6輪用 16×1-3/8ドラム車輪セット(右)	1	本	1			
	X-WC58-023L	NEXT6輪用 16×1-3/8ドラム車輪セット(左) ワイヤー-NXL02付	1	本	1		NEXT-81B用(ワイヤー有)	
	X-WC58-023R	NEXT6輪用 16×1-3/8ドラム車輪セット(右) ワイヤー-NXL02付	1	本	1			
	X-WC58-020L	NEXT6輪用 12×1-3/8ドラム車輪セット(左)	1	本	1		NEXT-80B用(ワイヤー無)	
	X-WC58-020R	NEXT6輪用 12×1-3/8ドラム車輪セット(右)	1	本	1			
	X-WC58-021L	NEXT6輪用 12×1-3/8ドラム車輪セット(左) ワイヤー-NXL02付	1	本	1		NEXT-80B用(ワイヤー有)	
	X-WC58-021R	NEXT6輪用 12×1-3/8ドラム車輪セット(右) ワイヤー-NXL02付	1	本	1			
		↑ 標準はエアータイヤ仕様となります。						
タイヤなど	X-PD07-002	16×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2		スーパーバルブセット付	
	X-PD07-005	16×1-3/8 チューブセット	1	本	2		スーパーバルブセット付	
	X-PD07-006	16×1-3/8 タイヤ+チューブセット	1	本	2		スーパーバルブセット付	
	X-PD03-002	12×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2			
	X-PD03-005	12×1-3/8 チューブ+スーパーバルブ セット	1	本	2		スーパーバルブセット付	
	X-PD03-006	12×1-3/8 タイヤ+チューブセット	1	本	2		スーパーバルブセット付	
	X-WC35-022	NEXTプレーキワイヤー NXL02	1	本	2		NEXT-81B、80B共用	
注記	次ページへ続く							

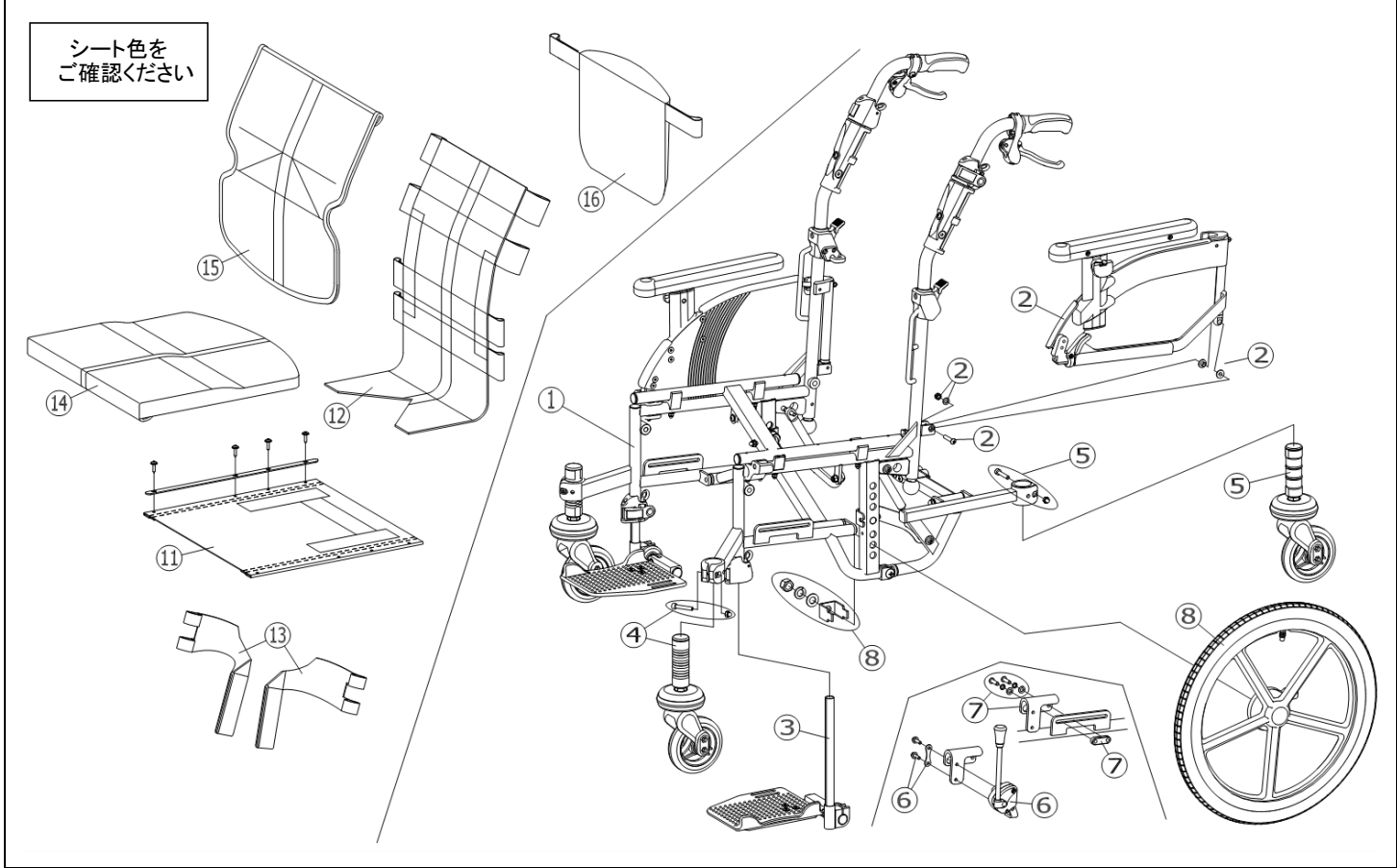

③

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
11	X-WC01-020-40000	NEXT低床用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 400幅	1 枚	1			
12	X-WC01-013-00000	NEXT用 背張り調整シート	1 枚	1			
13	X-WC03-012L	NEXTスイング用 レッグベルト(左)	1 本	1			
	X-WC03-012R	NEXTスイング用 レッグベルト(右)	1 本	1			
14	X-WC03-013-40F01	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-1	1 枚	1			
	X-WC03-013-40F02	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-2	1 枚	1			
	X-WC03-013-40F03	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-3	1 枚	1			
	X-WC03-013-40F04	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-4	1 枚	1			
15	X-WC01-016-40F01	NEXT用 背カバーシート 400幅 F-1	1 枚	1			
	X-WC01-016-40F02	NEXT用 背カバーシート 400幅 F-2	1 枚	1			
	X-WC01-016-40F03	NEXT用 背カバーシート 400幅 F-3	1 枚	1			
	X-WC01-016-40F04	NEXT用 背カバーシート 400幅 F-4	1 枚	1			
16	X-WC01-017	NEXT用 後付ポケット	1 枚	1			
シート セット	X-WC03-019-40F01	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-1	1 個	1			⑭、⑮、⑯のセット
	X-WC03-019-40F02	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-2	1 個	1			
	X-WC03-019-40F03	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-3	1 個	1			
	X-WC03-019-40F04	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-4	1 個	1			

注記	
----	--