


タイヤサイズ
 NEXT-71B : 22×1-1/4
 NEXT-70B : 20×1-1/4

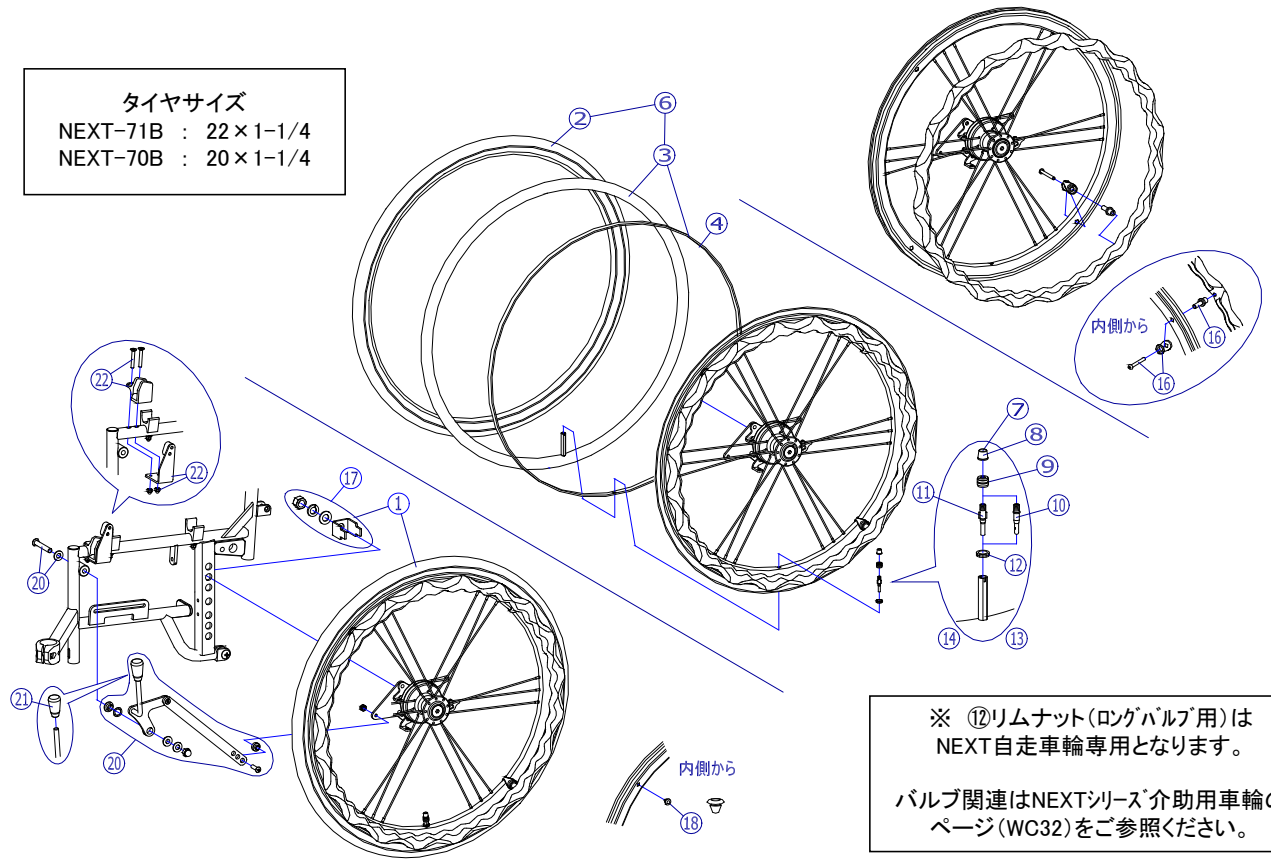

※ ⑫リムナット(ロングバルブ用)はNEXT自走車輪専用となります。
 バルブ関連はNEXTシリーズ 介助用車輪のページ(WC32)をご参照ください。

機種名/品名	NEXT6輪シリーズ 自走用車輪/駐車ブレーキ	ページ	XQY- WC57B				
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WC57-022L	NEXT6輪用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1		NEXT-71B用(ワイヤ-無)
	X-WC57-022R	NEXT6輪用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1		
	X-WC57-023L	NEXT6輪用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左) ワイヤ-NXL01付	1	本	1		NEXT-71B用(ワイヤ-有)
	X-WC57-023R	NEXT6輪用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右) ワイヤ-NXL01付	1	本	1		
	X-WC57-020L	NEXT6輪用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1		NEXT-70B用(ワイヤ-無)
	X-WC57-020R	NEXT6輪用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1		
	X-WC57-021L	NEXT6輪用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左) ワイヤ-NXL01付	1	本	1		NEXT-70B用(ワイヤ-有)
	X-WC57-021R	NEXT6輪用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右) ワイヤ-NXL01付	1	本	1		
2	X-WC31-032	↑ ①が付属します。標準はエア-タイヤ仕様となります。 22×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2		
	X-WC31-030	20×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2		
3	X-WC31-042	22×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		
	X-WC31-040	20×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		
4	X-WC31-082	↑ ⑬スーパーバルブセットが附属します。 22×1-1/4 フラップ(NEXT用ハードタイプ)のみ	1	本	2		ロングバルブタイプ
	X-WC31-080	20×1-1/4 フラップ(NEXT用ハードタイプ)のみ	1	本	2		
6	X-WC31-052	22×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		
	X-WC31-050	20×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		
13	X-WC31-013	↑ ⑬スーパーバルブセットが附属します。 スーパーバルブセット(ロングバルブ用)	1	個	2		ロングバルブタイプ
	X-WC31-062	NEXT用 22インチハンドリム	1	本	2		
15	X-WC31-060	NEXT用 20インチハンドリム	1	本	2		
	X-WC31-016	↑ ボルト⑯は付属しません。 NEXT用 ハンドリム固定ボルト(4本セット)	1	個	2		爪間15mm用
17	X-WC57-017	NEXT6輪用 車輪固定ナットセット	1	個	2		コの字金具、平W、SW付
18	X-WC31-018	NEXTリム用 水抜き穴ゴムキャップ(2個セット)	1	個	2		
20	X-WC57-002L	NEXT6輪自走用 ブレーキセット(左)	1	個	1		
	X-WC57-002R	NEXT6輪自走用 ブレーキセット(右)	1	個	1		
21	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)	1	個	1		
22	X-WC57-003L	NEXT6輪自走用 ブレーキ上部保持カバーセット(左)	1	個	1		
	X-WC57-003R	NEXT6輪自走用 ブレーキ上部保持カバーセット(右)	1	個	1		
注記							