


機種名 / 品名	FR-11R 背フレーム / フットブレーキ	ページ	XQY- WF52A
----------	------------------------	-----	------------

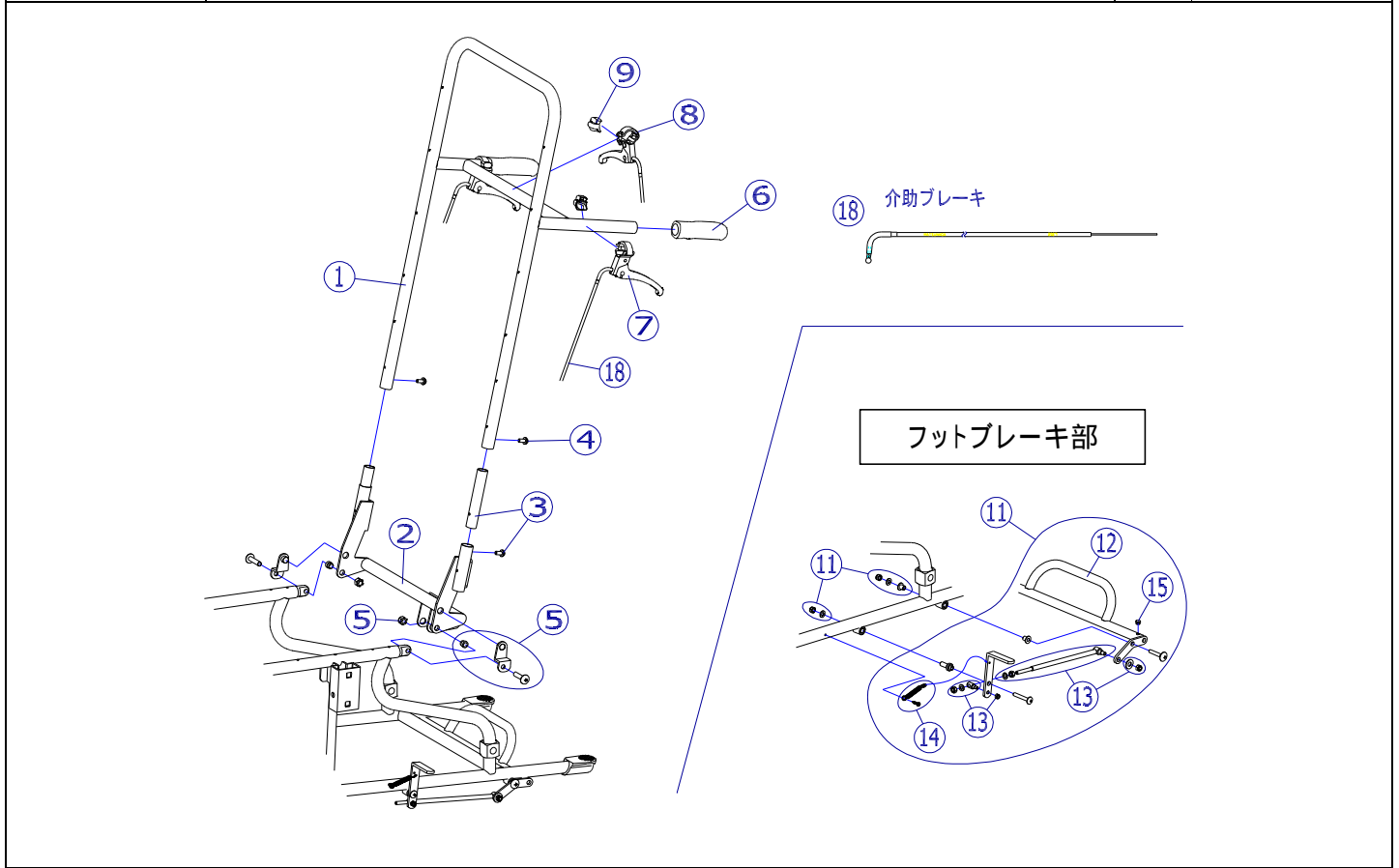

機種名 / 品名	FR-11R 背フレーム / フットブレーキ	ページ	XQY- WF52B
----------	------------------------	-----	------------

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	FR - 11R用 バックサポートフレーム上部	---	---	---		設定無
2	---	FR - 11R用 バックサポートフレーム下部	---	---	---		設定無
3	X-WF52-003	FR - 11R用 背上下連結インナーパイプ 下側固定用のボルトが1本付属します。	1	本	2		
4	X-WF52-004	FR - 11R用 背上下連結部固定ボルト 上側固定用のボルト	1	本	2		
5	X-WF52-005L	FR - 11R用 リクライニング支点部品セット(左)	1	個	1		
	X-WF52-005R	FR - 11R用 リクライニング支点部品セット(右)	1	個	1		
6	X-PA01-003	スリットグリップ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。	1	本	2		
7	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1	個	1		
8	X-WF38-003L	リクライニング用レバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ
9	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	3		左右共通
11	X-WF52-006	FR - 11R用 フットブレーキセット	1	台分	1		
12	X-WF52-007	FR - 11R用 フットブレーキペダルのみ	1	本	1		
13	X-WF52-008	FR - 11R用 フットブレーキロッド	1	本	2		
14	X-WF52-009	FR - 11R用 フットブレーキ 引張バネ(ビス付)	1	本	2		
15	X-WF52-010	FR - 11R用 クッションゴム	1	個	2		
18	X-WF51-002	FR - 11R用 介助ブレーキワイヤー	1	本	2		
		介助ブレーキ					
							

注記	
----	--