



旧仕様
~ 2005年6月頃まで


旧仕様フットブレーキ部

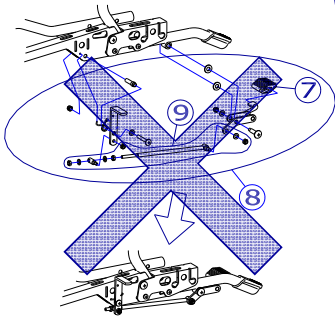

製造終了 現行品をご使用ください。

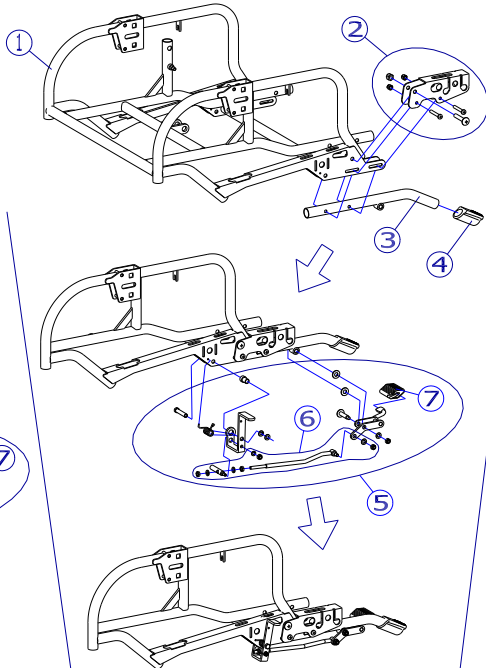

フットブレーキ部

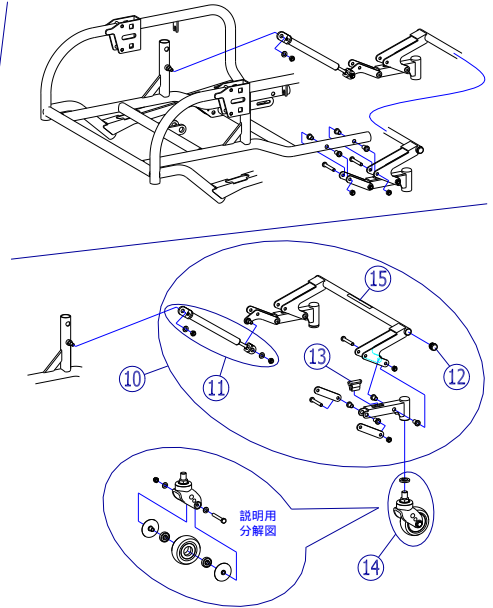

リフトアップ部

注意 リフトアップバー

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	FR-31TR用 ベースフレーム	---	---	---		設定無
2	---	FR-31TR用 車軸部ブラケット	---	---	---		設定無
3	---	FR-31TR用 ティッピングレバー	---	---	---		設定無
4	X-PA01-014	ティッピングキャップ	1	個	2		
5	X-WF64-005L	FR - 31TR用 フットブレーキセット(左)	1	個	1		
	X-WF64-005R	FR - 31TR用 フットブレーキセット(右)	1	個	1		
6	X-WF64-006	FR - 31TR用 フットブレーキロッド	1	本	2		左右共通
7	X-PB03-011	フットブレーキ用ペダルゴム	1	個	2		黒、左右共通
8	X-WF64-008L	FR-31TR用 旧タイプ フットブレーキセット(左)	4	個	4		製造終了
	X-WF64-008R	FR-31TR用 旧タイプ フットブレーキセット(右)	4	個	4		
9	X-WF64-009	FR-31TR用 旧タイプ フットブレーキロッド	4	本	2		製造終了
旧タイプのフットブレーキは製造終了させていただきました。 現行品をご使用ください。ただし、 のセットでの交換となります。(と は互換性ありません)							
10	X-WF64-010	FR - 31TR用 リフトアップユニットセット	1	台分	1		
11	X-WF64-011	FR - 31TR用 リフトアップダンパー	1	本	1		
12	X-PA01-103	5分用中栓	1	個	2		
13	X-WF64-013	FR - 31TR用 リフトアップクッションゴム	1	個	2		
14	X-WF64-014	FR - 31TR用 リフトアップキャスト	1	個	2		65mm
15	X-WF64-015	FR - 31TR用 [注意リフトアップバー]シール	1	枚	1		黄色

注記