



機種名 / 品名	オアシス フット・レッグサポート部				ページ	XQY- WH29B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WH29-001L	OS - 12TR用 スイングアウトフット・レッグサポート(左)	1	個	1		
	X-WH29-001R	OS - 12TR用 スイングアウトフット・レッグサポート(右)	1	個	1		
2	X-PF07-013L	OJタイプ(Lサイズ) 15.9用フットサポート完成(左)	1	枚	1		座幅:400、420
	X-PF07-013R	OJタイプ(Lサイズ) 15.9用フットサポート完成(右)	1	枚	1		
	X-PF07-023L	OJタイプ(Mサイズ) 15.9用フットサポート完成(左)	1	枚	1		座幅:380
	X-PF07-023R	OJタイプ(Mサイズ) 15.9用フットサポート完成(右)	1	枚	1		
3	X-WH29-003	OS用 フットサポートパイプ保護ゴム	1	個	2		
4	X-WH21-007L-00N02	OS - TR用 レッグベルト(左) N - 2	1	本	1		標準色
	X-WH21-007R-00N02	OS - TR用 レッグベルト(右) N - 2	1	本	1		
	X-WH21-017L-00B61	OS - TR用 レッグベルト(左) B - 61	1	本	1		オプション色
	X-WH21-017R-00B61	OS - TR用 レッグベルト(右) B - 61	1	本	1		
	X-WH21-017L-00V01	OS - TR用 レッグベルト(左) V - 1	1	本	1		
	X-WH21-017R-00V01	OS - TR用 レッグベルト(右) V - 1	1	本	1		
5	X-WH29-005L	OS - TRS用 スイングアウトフット・レッグサポート(左)	1	個	1		
	X-WH29-005R	OS - TRS用 スイングアウトフット・レッグサポート(右)	1	個	1		
7	X-PF07-016L	OS - 11TRS用 OJタイプ(Lサイズ) 15.9用フットサポート完成(左)	1	枚	1		座幅:400、420
	X-PF07-016R	OS - 11TRS用 OJタイプ(Lサイズ) 15.9用フットサポート完成(右)	1	枚	1		
	X-PF07-026L	OS - 11TRS用 OJタイプ(Mサイズ) 15.9用フットサポート完成(左)	1	枚	1		座幅:380
	X-PF07-026R	OS - 11TRS用 OJタイプ(Mサイズ) 15.9用フットサポート完成(右)	1	枚	1		
*	X-PF07-010	OJタイプフットサポート 幅調整固定ボルト	1	本	2		裏側のボルト
11	X-PG01-015L	樹脂一体型スイングアウトユニット【オレンジレバー】(左)	1	個	1		ボルト付属
	X-PG01-015R	樹脂一体型スイングアウトユニット【オレンジレバー】(右)	1	個	1		
12	X-PG01-006	樹脂一体型スイングアウトユニット用固定ボルトセット	1	本	4		ボルト1本、ナット1個
13	X-WH29-013	OS - 12TR用 樹脂スイングアウト用フット・レッグサポートパイプ	1	本	2		
15	X-PG01-020	20用 レッグベルトホルダー	1	個	2		左右共通、ボルト・ナット付
16	X-WH29-016	OS - TRS用 樹脂スイングアウト用フット・レッグサポートパイプ	1	本	2		
17	X-PG01-017L	22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット(A) (左)	1	個	1		ボルト、コの字金具付
	X-PG01-017R	22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット(A) (右)	1	個	1		
18	X-PG01-011	本体側樹脂一体型スイングアウトユニット(A)用固定ボルト	1	本	2		
19	X-PG01-012	本体側樹脂一体型スイングアウトユニット コの字金具セット(標準A)	1	個	2		
21	X-WH29-021	旧OS - 12TR用 パーリング式 15.9ポスト	1	本	2		
22	X-WH29-022	旧OS - 12TR用 パーリング式ポスト 固定ボルトセット	1	本	2		
23	X-WH29-023	旧OS - 12TR用 樹脂スイングアウト用フット・レッグサポートパイプ	1	本	2		

機種により、形状・仕様が異なります。
必ず機種名をご確認ください。
(座幅によりサイズ違いもあります。)

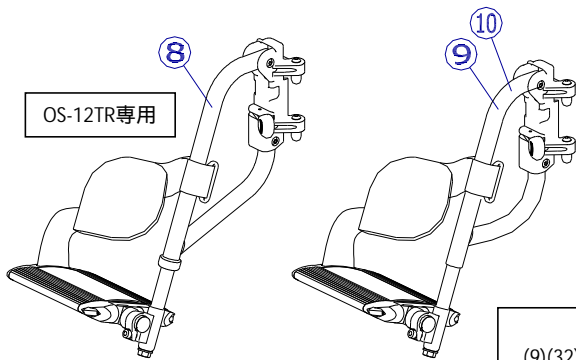


OS-12TR専用

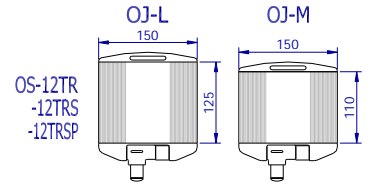


OS-12TR
-12TRS
-12TRSP

OS-11TRS
-11TRSP

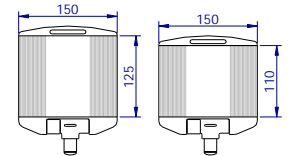


< オプション仕様 >

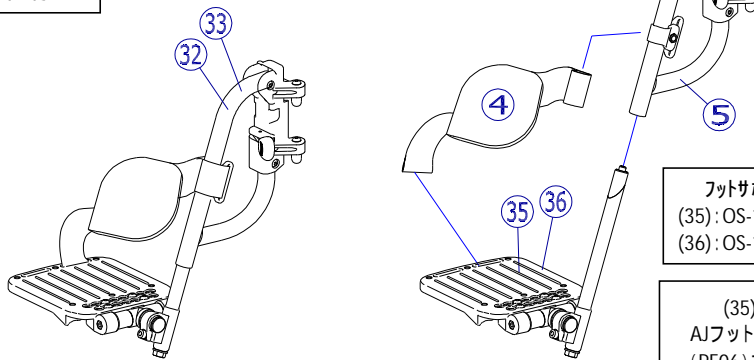

< 対応機種 >
(9)(32): OS-12TRS, 12TRSP
(10)(33): OS-11TRS, 11TRSP
フットサポート位置違い

フットサポート完成は
(35): OS-12TRS, 12TRSP
(36): OS-11TRS, 11TRSP

(35)(36)の詳細は
AJフットサポートのページ
(PF06)をご確認ください。

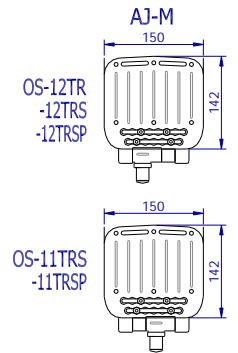

OS-12TR
-12TRS
-12TRSP

OS-11TRS
-11TRSP

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
8	X-WH24-008L	OS - 12TR用 スイングアウト完成(左)	1	個	1		
	X-WH24-008R	OS - 12TR用 スイングアウト完成(右)	1	個	1		
9	X-WH24-009L	OS - 12TRS用 スイングアウト完成(左)	1	個	1		
	X-WH24-009R	OS - 12TRS用 スイングアウト完成(右)	1	個	1		
10	X-WH25-009L	OS - 11TRS用 スイングアウト完成(左)	1	個	1		
	X-WH25-009R	OS - 11TRS用 スイングアウト完成(右)	1	個	1		
31	X-WX29-031L	OS - 12TR用 スイングアウト完成(左) AJフットサポート	1	個	1		
	X-WX29-031R	OS - 12TR用 スイングアウト完成(右) AJフットサポート	1	個	1		
32	X-WX29-032L	OS - 12TRS用 スイングアウト完成(左) AJフットサポート	1	個	1		
	X-WX29-032R	OS - 12TRS用 スイングアウト完成(右) AJフットサポート	1	個	1		
33	X-WX29-033L	OS - 11TRS用 スイングアウト完成(左) AJフットサポート	1	個	1		
	X-WX29-033R	OS - 11TRS用 スイングアウト完成(右) AJフットサポート	1	個	1		
35	X-WX29-035L	OS - 12TRS用 AJタイプ(Mサイズ) 15.9用フットサポート完成(左)	1	個	1		
	X-WX29-035R	OS - 12TRS用 AJタイプ(Mサイズ) 15.9用フットサポート完成(右)	1	個	1		
36	X-WX29-036L	OS - 11TRS用 AJタイプ(Sサイズ) 15.9用フットサポート完成(左)	1	個	1		
	X-WX29-036R	OS - 11TRS用 AJタイプ(Sサイズ) 15.9用フットサポート完成(右)	1	個	1		

注記	
----	--