


番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WH30-001L	OS - 12TRS用 ミニタックルブレーキセット(左)	1 個	1			
	X-WH30-001R	OS - 12TRS用 ミニタックルブレーキセット(右)	1 個	1			
		ボルト、ブレーキ本体、取付板、にぎりゴムのセット					
2	X-WH30-002	OS - 12TRS用 ミニタックル取付ボルトセット	1 個	2			
		ボルト2本(座金組込)、取付板のセット					
3	X-WH30-003L	OS - 12TRS用 ミニタックルブレーキ(左)	1 個	1			にぎりゴム付
	X-WH30-003R	OS - 12TRS用 ミニタックルブレーキ(右)	1 個	1			
4	X-WH30-004	OS - 12TRS用 ミニタックル取付板	1 枚	2			
6	X-WH30-006L	OS - 11TRS用 ミニタックルブレーキセット(左)	1 個	1			
	X-WH30-006R	OS - 11TRS用 ミニタックルブレーキセット(右)	1 個	1			
		ボルト、ブレーキ本体、取付板、にぎりゴムのセット					
7	X-WH30-007L	OS - 11TRS用 ミニタックルブレーキ(左)	1 個	1			にぎりゴム付
	X-WH30-007R	OS - 11TRS用 ミニタックルブレーキ(右)	1 個	1			
8	X-WH30-008	OS - 11TRS用 ミニタックル取付板	1 枚	2			
9	X-WH30-009	OS - 11TRS用 ミニタックル取付ボルトセット	1 個	2			
		ボルト2本、スプリングワッシャー2枚、取付板(大)のセット					
10	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)	1 個	1			
11	X-PD03-002	12×1-3/8 タイヤのみ	1 本	2			
12	X-PD03-005	12×1-3/8 チューブ+フラップセット	1 本	2			
		スーパーバルブセットが附属します。フラップが附属しますが、樹脂ホイールの場合は使用しません。					
タイヤセット	X-PD03-006	12×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1 本	2			
		スーパーバルブセットが附属します。フラップが附属しますが、樹脂ホイールの場合は使用しません					
13	X-WH30-013	12インチ樹脂ホイールインナーカバー	1 枚	2			
14	X-WH30-014	12インチ樹脂ホイールカバー	1 枚	2			
		インナーカバー、固定部品セットが附属します。					
15	X-WH30-015	12インチ樹脂ホイールカバー用固定部品(5個セット)	1 個	2			5個組
16	X-PD04-016	樹脂ホイール用キャップ	1 個	2			
17	X-PB05-010	ドロロック固定部品セット	1 個	2			
18	X-WH30-018	車軸ナット保護ゴムキャップ	1 個	2			

注記	次ページへ続く
----	---------

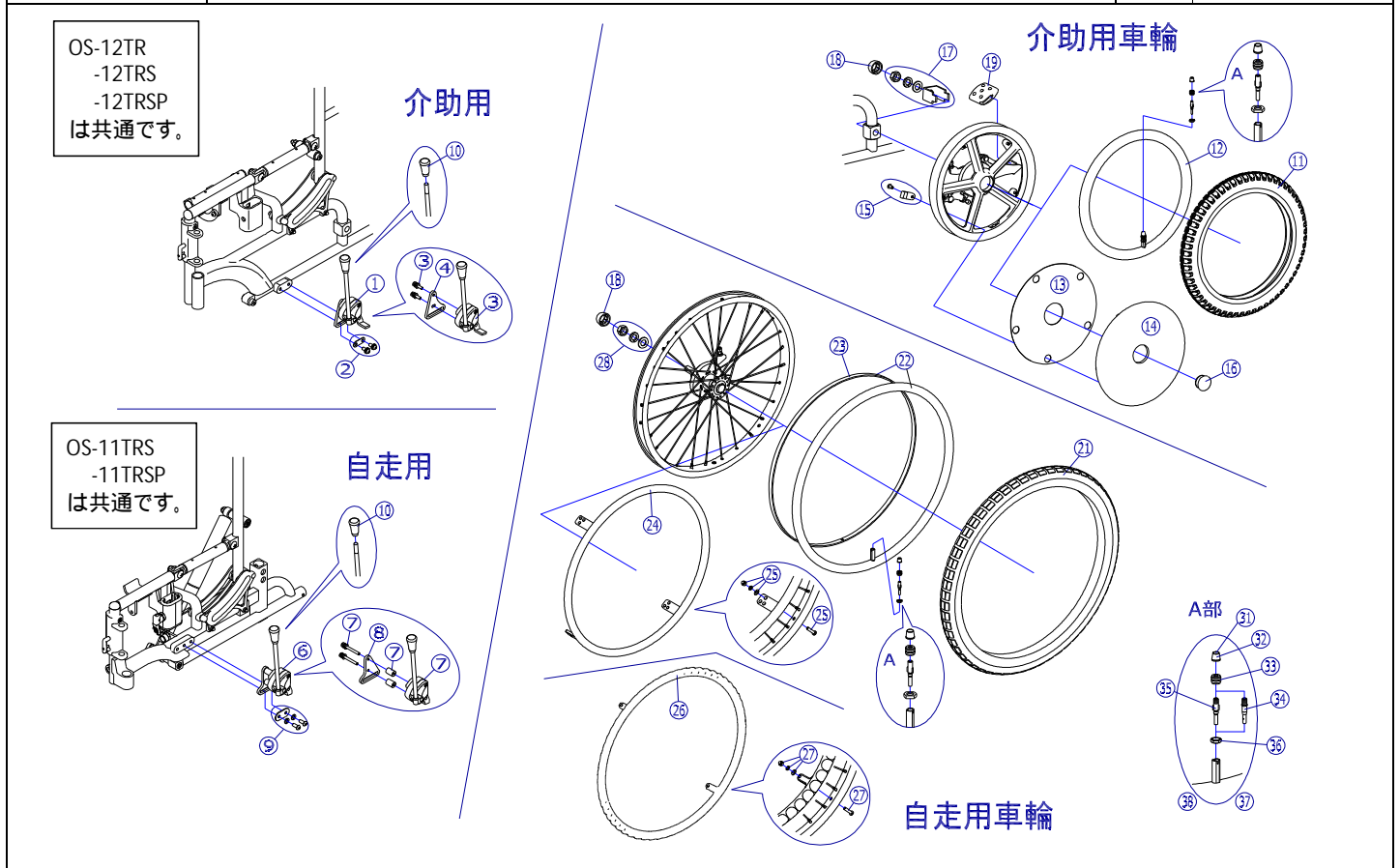

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
19	X-PB03-012L	ドラロック用ペダルゴム (左)	1	個	1		オレンジ
	X-PB03-012R	ドラロック用ペダルゴム (右)	1	個	1		
21	X-PD08-002	18 x 1 - 3 / 8 タイヤのみ	1	本	2		
22	X-PD08-005	18 x 1 - 3 / 8 チューブ+フラップセット スーパーバルブセットが附属します。	1	本	2		、 のセット
	X-PD08-004	18 x 1 - 3 / 8 フラップのみ	1	本	2		
タイヤ セット	X-PD08-006	18 x 1 - 3 / 8 タイヤ+チューブ+フラップセット スーパーバルブセットが附属します。	1	本	2		、 、 のセット
	X-PD08-007	スーパーバルブセットが附属します。					
24	X-WH30-024	OS - 11TRS用 18インチ爪間25mm アルミハンドリム	1	本	2		
25	X-WH30-025	OS - 11TRS用 アルミハンドリム用ボルト(4本セット)	1	個	2		
26	X-PD08-017	18インチ爪間25mm 樹脂ハンドリム	1	本	2		
27	X-PD08-018	樹脂ハンドリム用ボルト(4本セット)	1	個	2		
28	X-PD01-007	車輪固定ナットセット	1	個	2		
		スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットの三点セットです。					
31	X-PD02-007	バルブキャップ(青)	1	個	2		
32	X-PD02-008	バルブキャップ(黒)	1	個	2		
33	---	トップナット	-	-	-		セットでの販売となります
34	X-PD02-010	スーパーバルブ	1	個	2		バルブキャップ(青)付
35	X-PD02-011	虫ゴムバルブ	1	個	2		バルブキャップ(黒)付
36	---	リムナット	-	-	-		セットでの販売となります
37	X-PD02-013	スーパーバルブセット	1	個	2		
38	X-PD02-014	虫ゴムバルブセット	1	個	2		

注記	
----	--