


2018/5/1修正A

機種名／品名		オアシス ブレーキ／車輪				ページ	XQY- WH30B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WH30-001L	OS-12TRS用 ミニタックルブレーキセット(左)	1	個	1		
	X-WH30-001R	OS-12TRS用 ミニタックルブレーキセット(右)	1	個	1		
		↑ ②ボルト、③ブレーキ本体、④取付板、⑩にぎりゴムのセット					
2	X-WH30-002	OS-12TRS用 ミニタックル取付ボルトセット	1	個	2		
		↑ ボルト2本(座金組込)、取付板のセット					
3	X-WH30-003L	OS-12TRS用 ミニタックルブレーキ(左)	1	個	1		⑩にぎりゴム付
	X-WH30-003R	OS-12TRS用 ミニタックルブレーキ(右)	1	個	1		
4	X-WH30-004	OS-12TRS用 ミニタックル取付板	1	枚	2		
6	X-WH30-006L	OS-11TRS用 ミニタックルブレーキセット(左)	1	個	1		
	X-WH30-006R	OS-11TRS用 ミニタックルブレーキセット(右)	1	個	1		
		↑ ⑨ボルト、⑦ブレーキ本体、⑧取付板、⑩にぎりゴムのセット					
7	X-WH30-007L	OS-11TRS用 ミニタックルブレーキ(左)	1	個	1		⑩にぎりゴム付
	X-WH30-007R	OS-11TRS用 ミニタックルブレーキ(右)	1	個	1		
8	X-WH30-008	OS-11TRS用 ミニタックル取付板	1	枚	2		
9	X-WH30-009	OS-11TRS用 ミニタックル取付ボルトセット	1	個	2		
		↑ ボルト2本、スプリングワッシャー2枚、取付板(大)のセット					
10	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)	1	個	1		
11	X-PD03-002	12×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2		
	X-PD03-005	12×1-3/8 チューブ+フラップセット	1	本	2		
タイヤ セット	X-PD03-006	12×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		
		↑ ⑭スーパーバルブセットが附属します。フラップが付属しますが、樹脂ホイールの場合は使用しませ					
13	X-WH30-013	12インチ樹脂ホイールインナーカバー	1	枚	2		
14	X-WH30-014	12インチ樹脂ホイールカバー	1	枚	2		
		↑ ⑬インナーカバー、⑮固定部品セットが付属します。					
15	X-WH30-015	12インチ樹脂ホイールカバー用固定部品(5個セット)	1	個	2		5個組
16	X-PD04-016	樹脂ホイール用キャップ	1	個	2		
17	X-PB05-010	ドラロック固定部品セット	1	個	2		
18	X-WH30-018	車軸ナット保護ゴムキャップ	1	個	2		
注記	次ページへ続く						

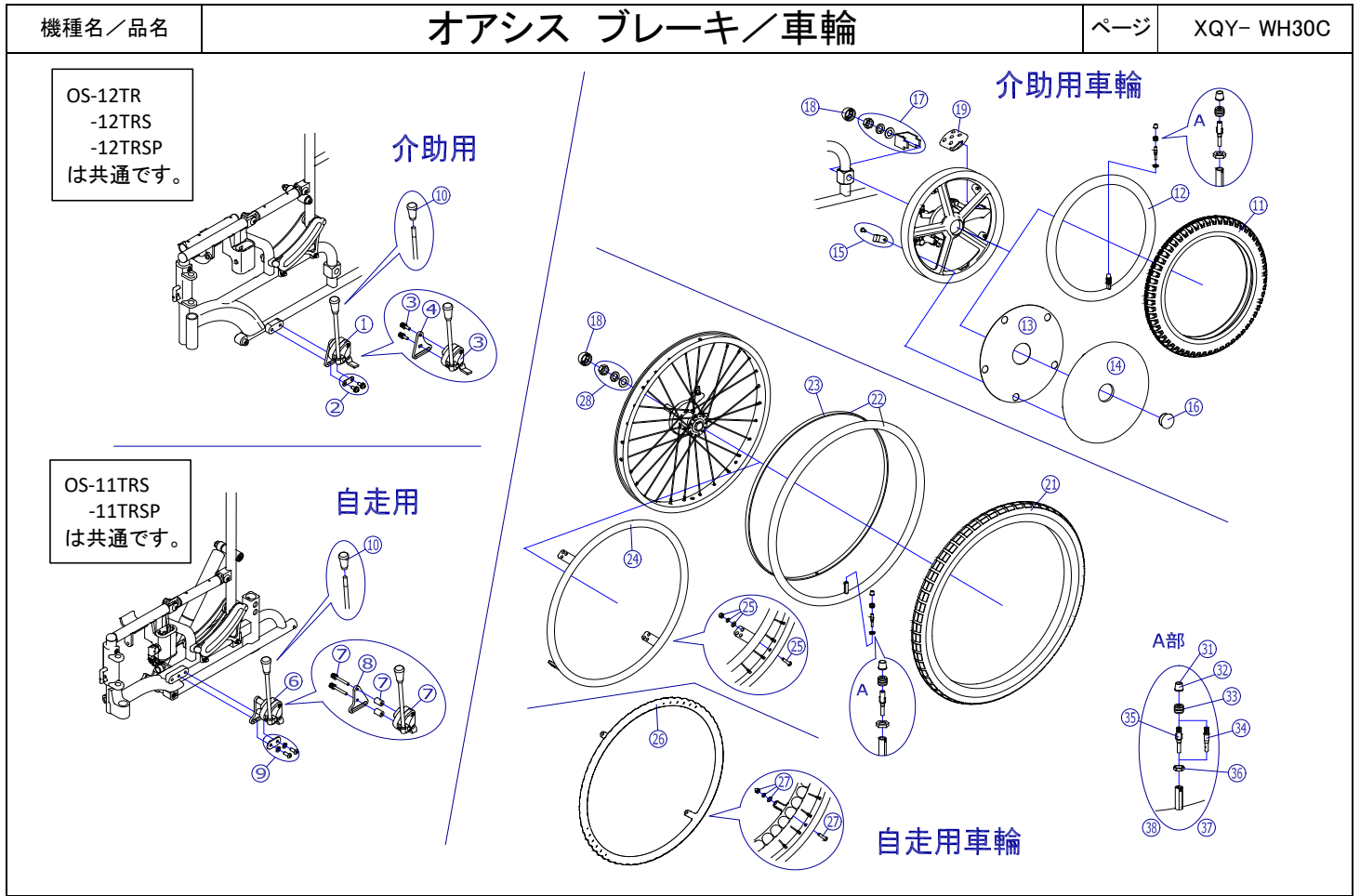

機種名／品名		オアシス ブレーキ／車輪				ページ	XQY- WH30D
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
19	X-PB03-012L	ドラロック用ペダルゴム(左)	1	個	1		オレンジ
	X-PB03-012R	ドラロック用ペダルゴム(右)	1	個	1		
21	X-PD08-002	18×1-3/8 タイヤのみ	1	本	2		
22	X-PD08-005	18×1-3/8 チューブ+フラップセット	1	本	2		③、④のセット
		↑⑭スーパーバルブセットが附属します。					
23	X-PD08-004	18×1-3/8 フラップのみ	1	本	2		
タイヤ セット	X-PD08-006	18×1-3/8 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		②、③、④のセット
		↑⑭スーパーバルブセットが附属します。					
24	X-WH30-024	OS-11TRS用 18インチ爪間25mm アルミハンドリム	1	本	2		
25	X-WH30-025	OS-11TRS用 アルミハンドリム用ボルト(4本セット)	1	個	2		
26	X-PD08-017	18インチ爪間25mm 樹脂ハンドリム	1	本	2		
27	X-PD08-018	樹脂ハンドリム用ボルトセット(4本セット)	1	個	2		
28	X-PD01-007	車輪固定ナットセット	1	個	2		
		↑ スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットの三点セットです。					
31	X-PD02-007	バルブキャップ(青)	1	個	2		
32	X-PD02-008	バルブキャップ(黒)	1	個	2		
33	---	トップナット	-	-	-	-	セットでの販売となります
34	X-PD02-010	スーパーバルブ	1	個	2		バルブキャップ(青)付
35	X-PD02-011	虫ゴムバルブ	1	個	2		バルブキャップ(黒)付
36	---	リムナット	-	-	-	-	セットでの販売となります
37	X-PD02-013	スーパーバルブセット	1	個	2		
38	X-PD02-014	虫ゴムバルブセット	1	個	2		
<p>注記</p>							