

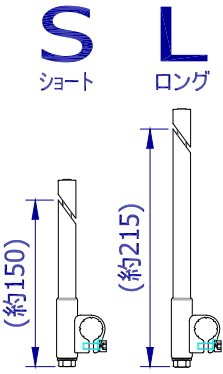


プレートの位置はご使用状況に合わせて調整してください。

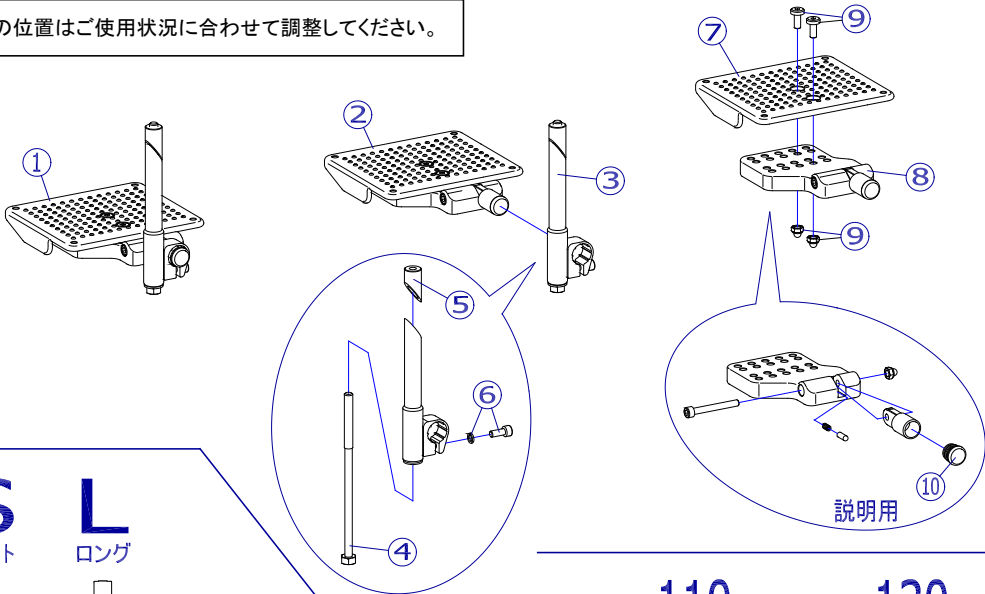

③ポストは長さ違いで二種類あります。

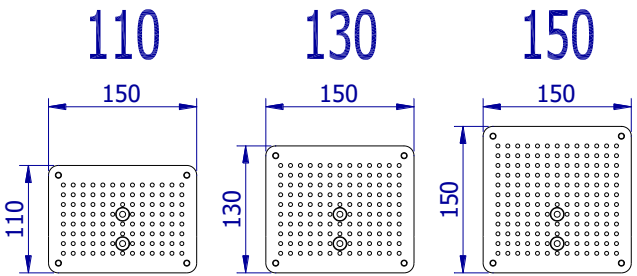

機種名／品名		LUUK フットサポート				ページ	XQY- WJ34B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WJ34-011L	LUUK用 フットサポート完成(左) 110幅 ショートポスト	1 枚	1			
	X-WJ34-011R	LUUK用 フットサポート完成(右) 110幅 ショートポスト	1 枚	1			
	X-WJ34-013L	LUUK用 フットサポート完成(左) 130幅 ショートポスト	1 枚	1			
	X-WJ34-013R	LUUK用 フットサポート完成(右) 130幅 ショートポスト	1 枚	1			
	X-WJ34-015L	LUUK用 フットサポート完成(左) 150幅 ショートポスト	1 枚	1			
	X-WJ34-015R	LUUK用 フットサポート完成(右) 150幅 ショートポスト	1 枚	1			
	X-WJ34-021L	LUUK用 フットサポート完成(左) 110幅 ロングポスト	1 枚	1			
	X-WJ34-021R	LUUK用 フットサポート完成(右) 110幅 ロングポスト	1 枚	1			
	X-WJ34-023L	LUUK用 フットサポート完成(左) 130幅 ロングポスト	1 枚	1			
	X-WJ34-023R	LUUK用 フットサポート完成(右) 130幅 ロングポスト	1 枚	1			
X-WJ34-025L	LUUK用 フットサポート完成(左) 150幅 ロングポスト	1 枚	1				
X-WJ34-025R	LUUK用 フットサポート完成(右) 150幅 ロングポスト	1 枚	1				
2	X-WJ34-031L	LUUK用 フットサポート(左) 110幅	1 枚	1			
	X-WJ34-031R	LUUK用 フットサポート(右) 110幅	1 枚	1			
	X-WJ34-033L	LUUK用 フットサポート(左) 130幅	1 枚	1			
	X-WJ34-033R	LUUK用 フットサポート(右) 130幅	1 枚	1			
	X-WJ34-035L	LUUK用 フットサポート(左) 150幅	1 枚	1			
	X-WJ34-035R	LUUK用 フットサポート(右) 150幅	1 枚	1			
3	X-PF06-001	AJタイプ三角ナット式φ15.9(黒)ポスト完成	1 本	2			黒、左右共通
	X-WJ34-003	AJタイプ 三角ナット式φ15.9用(黒)ショートポスト完成	1 本	2			黒、左右共通
4	X-PF01-007	引上げボルト	1 本	2			長さ:230mm
	X-WJ34-004	引上げボルト 165mm	1 本	2			X-WJ23-008と同一
5	X-PF01-008	φ15.9用 三角ナット	1 個	2			
6	X-PF06-005	AJタイプポスト用クランプボルトセット(黒)	1 本	2			
7	X-WJ34-041	LUUK用 フットサポート板のみ 110幅	1 枚	2			
	X-WJ34-043	LUUK用 フットサポート板のみ 130幅	1 枚	2			
	X-WJ34-045	LUUK用 フットサポート板のみ 150幅	1 枚	2			
8	X-WJ34-008L	LUUK用 フットサポート基部(左)	1 個	1			
	X-WJ34-008R	LUUK用 フットサポート基部(右)	1 個	1			
9	X-WJ34-009	LUUK用 フットサポート位置調整ボルト(2本セット)	1 個	2			
10	X-PA01-101	6分用中栓	1 個	2			φ20mm×t1.7用
注記							