



機種名 / 品名	その他 キャスタ (アジャスタブル、OS)	ページ	XQY- PC11A
----------	------------------------------	-----	------------

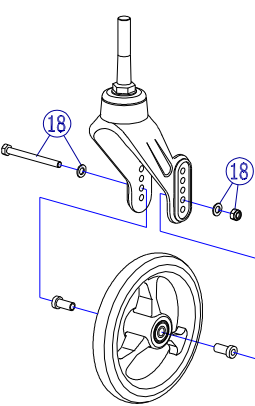

5～7インチのソリッドキャスト輪
6、7インチのスーパーキャスト輪
(5～7インチのワイドキャスト輪は不可)
(5～7インチのPUWキャスト輪も不可)
任意の位置に取付てご使用ください

次ページ参照ください。

OSキャストのボルトを交換する場合には、
ボルト先端に緩み止め剤を塗布してください。
(推奨: ロックタイト262 または 263)

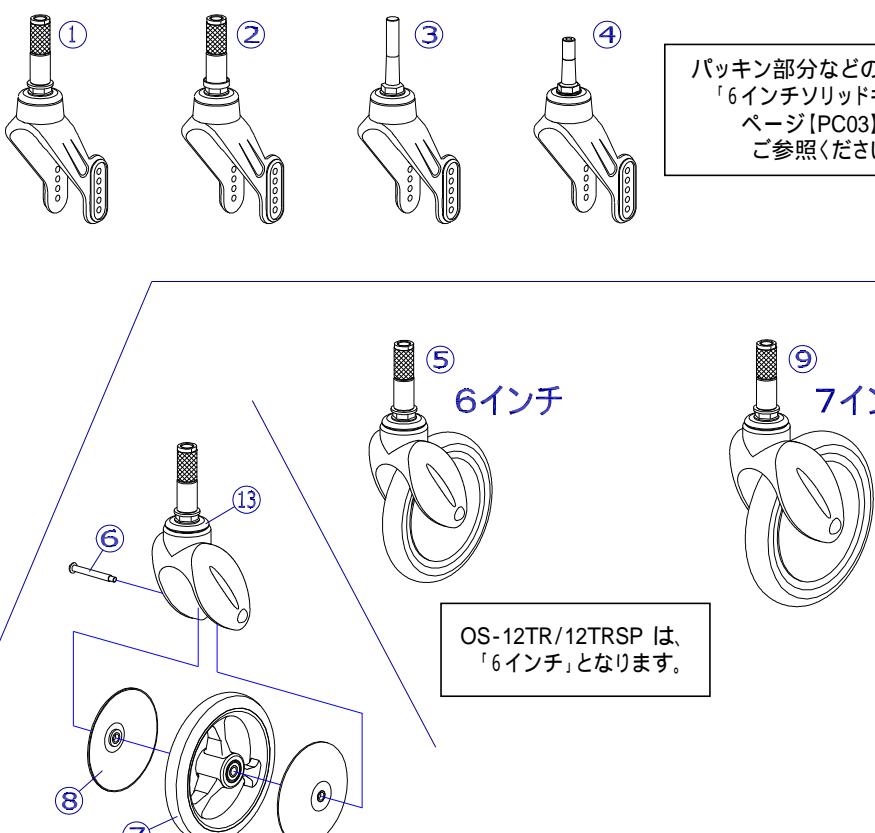

⑤ 6インチ

⑨ 7インチ

OS-12TR/12TRSP は、「6インチ」となります。

パッキン部分などの部品は、「6インチソリッドキャスト」ページ[PC03]をご参照ください。

機種名 / 品名	その他 キャスタ (アジャスタブル、OS)					ページ	XQY- PC11B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PC11-001	平Wパッキン式 アジャスタブルフォーク	1 個	2			
2	X-PC11-002	おわんパッキン式 アジャスタブルフォーク	1 個	2			
3	X-PC11-003	シャフト式 アジャスタブルフォーク	1 個	2			
4	X-PC11-004	ショートシャフト式 アジャスタブルフォーク	1 個	2			
5	X-PC11-005	平Wパッキン式 6インチOSキャスト	1 個	2			
6	X-PC11-006	6インチOSキャスト輪用ボルト	1 本	2			
7	X-PC11-007	6インチOSキャスト輪(ボルト&カバー付セット)	1 個	2			、 が付属します
8	X-PC11-008	6インチOSキャスト輪用カバー(2枚セット)	1 個	2			
13	X-PC11-013	平Wパッキン式 6インチOSフォーク	1 個	2			
18	X-PC11-018	アジャスタブルキャスト輪用ボルトセット ボルト1本(M6×67)、ワッシャー2枚、ナット1個	1 本	2			
9	X-PC11-009	平Wパッキン式 7インチOSキャスト	1 個	2			
注記							