
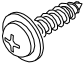
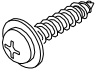
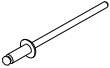
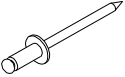


機種名 / 品名	ボルト類		ページ	XQY- PA09A
①		<p>機種・使用場所により仕様(サイズ・長さなど)がいろいろあります。</p> <p>現在ご使用中の仕様をご確認の上ご発注ください。</p>		
②				
③				
⑥				
⑦				

機種名 / 品名	ボルト類					ページ	XQY- PA09B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PX01-010	シートビス 4.2mm	1	本	-		長さ19mm
	X-PX01-020	シートビス 4.2mm(黒)	1	本	-		長さ19mm
	通常、背シートの固定に使用します。(一部例外有り)						
	X-PX01-010-100	シートビス 4.2mm 100本セット	1	個	-		長さ19mm
2	X-PX01-020-100	シートビス 4.2mm(黒) 100本セット	1	個	-		長さ19mm
	X-PX01-011	シートビス 5.5mm	1	本	-		長さ20mm
	X-PX01-021	シートビス 5.5mm(黒)	1	本	-		長さ20mm
	通常、座シートの固定に使用します。(一部例外有り)						
3	X-PX01-011-100	シートビス 5.5mm 100本セット	1	個	-		長さ20mm
	X-PX01-021-100	シートビス 5.5mm(黒) 100本セット	1	個	-		長さ20mm
	X-PA09-003	シートビス 5.5mm ロング	1	本	-		長さ25mm
	シートビスを使い挟んで止める場合など、ボルトの長さが短い場合に使用します。黒はありません。						
	X-PA09-003-100	シートビス 5.5mm ロング 100本セット	1	個	-		長さ25mm
6	X-PA09-006	ブラインドリベット 4-3	1	本	-		アルミリベット
	厚みが1.6~4.8mmの場合に使用します。下穴径3.3mm						NSA4-3相当
	X-PA09-006-100	ブラインドリベット 4-3 100本セット	1	個	-		
	X-PA09-016	ブラインドリベット 4-4	1	本	-		アルミリベット
7	厚みが3.2~6.4mmの場合に使用します。下穴径3.3mm						NSA4-4相当
	X-PA09-016-100	ブラインドリベット 4-4 100本セット	1	個	-		
	X-PA09-007	ブラインドリベット 6-4	1	本	-		スチールリベット
	厚みが3.2~6.4mmの場合に使用します。下穴径5.0mm						NS6-4相当
	X-PA09-007-100	ブラインドリベット 6-4 100本セット	1	個	-		
注記							