



機種名 / 品名	ミニタックルブレーキ	ページ	XQY- PB02A
----------	-------------------	-----	------------

ブレーキカバーの色は四種類、ブレーキにぎりゴムの色は二種類あります。ご使用機種をご確認ください。


- ・ミニタックルブレーキ: カバー水色 ・OSシリーズ用タックルブレーキ: カバー紺色 ブレーキにぎりゴム④:
- ・ミニFBタックルブレーキ: カバー薄紫色 ・一部機種 タックルブレーキ: カバー黒色 黒またはオレンジ(橙)

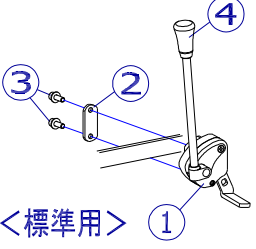


<標準用> ①

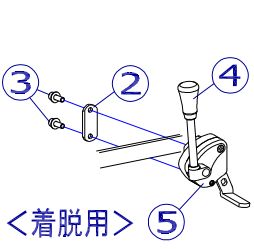


<着脱用> ⑤

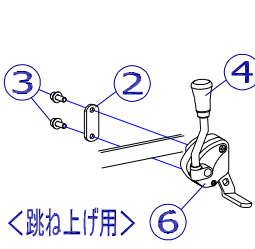


<跳ね上げ用> ⑥

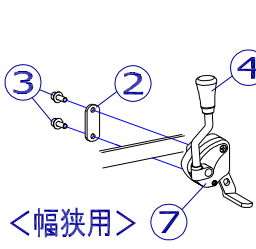


<幅狭用> ⑦

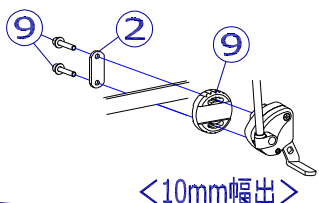


<10mm幅出>

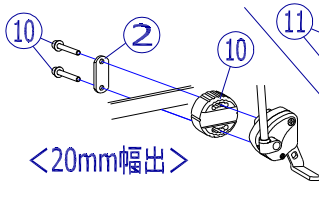


<20mm幅出>

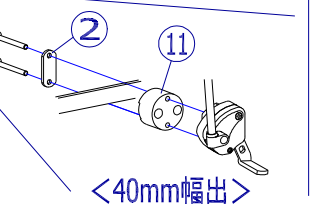

<40mm幅出>

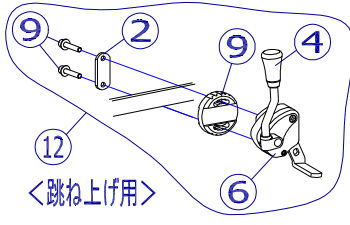

<跳ね上げ用> ⑫

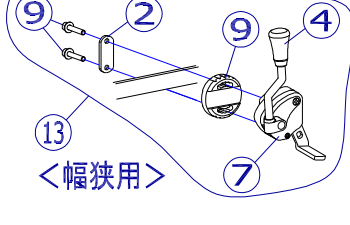

<幅狭用> ⑬

にぎりゴムは付属しません。

標準用
170mm
のみ

注意
ブレーキ棒のみ交換する場合

ブレーキ棒が曲がったりしている場合は、ブレーキ本体(内部)が破損している可能性があります。必ずブレーキ本体の破損が無いことを確認してください。

なお、外す際は接着剤が付いているため、根元(ボルト)を加熱すると外しやすくなります。

機種名 / 品名	ミニタックルブレーキ					ページ	XQY- PB02B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PB02-001L	ミニタックルブレーキ(カバー水色) (左)	1	個	1		レバー長 170mm
	X-PB02-001R	ミニタックルブレーキ(カバー水色) (右)	1	個	1		カタログ (G)
	X-PB02-021L	ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (左)	1	個	1		レバー長 170mm
	X-PB02-021R	ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (右)	1	個	1		カタログ (H)
2	X-PB02-002	ミニタックル固定プレート	1	枚	2		
4	X-PB02-004	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(黒)	1	個	1		
	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)	1	個	1		
5	X-PB02-005L	着脱用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (左)	1	個	1		レバー長 95mm
	X-PB02-005R	着脱用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (右)	1	個	1		カタログ (O)
	X-PB02-025L	着脱用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (左)	1	個	1		レバー長 95mm
	X-PB02-025R	着脱用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (右)	1	個	1		カタログ (P)
6	X-PB02-006L	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (左)	1	個	1		レバー長 95mm
	X-PB02-006R	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (右)	1	個	1		カタログ (M)
	X-PB02-026L	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (左)	1	個	1		レバー長 95mm
	X-PB02-026R	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (右)	1	個	1		カタログ (N)
7	X-PB02-007L	幅狭用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (左)	1	個	1		レバー長 95mm
	X-PB02-007R	幅狭用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (右)	1	個	1		
9	X-PB02-009	ミニタックル用 10mm幅出部品セット(ボルト2本付)	1	個	2		
10	X-PB02-010	ミニタックル用 20mm幅出部品セット(ボルト2本付)	1	個	2		
11	X-PB02-011	ミニタックル用 40mm幅出部品セット(ボルト2本付)	1	個	2		
12	X-PB02-012L	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色)10mm幅出しセット (左)	1	個	1		
	X-PB02-012R	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色)10mm幅出しセット (右)	1	個	1		
	X-PB02-022L	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー紫色)10mm幅出しセット (左)	1	個	1		
	X-PB02-022R	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー紫色)10mm幅出しセット (右)	1	個	1		
13	X-PB02-013L	幅狭用ミニタックルブレーキ(カバー水色)10mm幅出しセット (左)	1	個	1		
	X-PB02-013R	幅狭用ミニタックルブレーキ(カバー水色)10mm幅出しセット (右)	1	個	1		
15	X-PB02-015	ミニタックル用 標準ブレーキ棒のみ(ボルト付)	1	本	2		170mm用
注記	ブレーキ本体をご注文の際には、 、 、 が付属します。						