


機種名 / 品名	6インチスーパーキャスト	ページ	XQY- PC06A
----------	--------------	-----	------------

パッキン部分などの部品は、「6インチソリッドキャスト」ページ[PC03]をご参照ください。

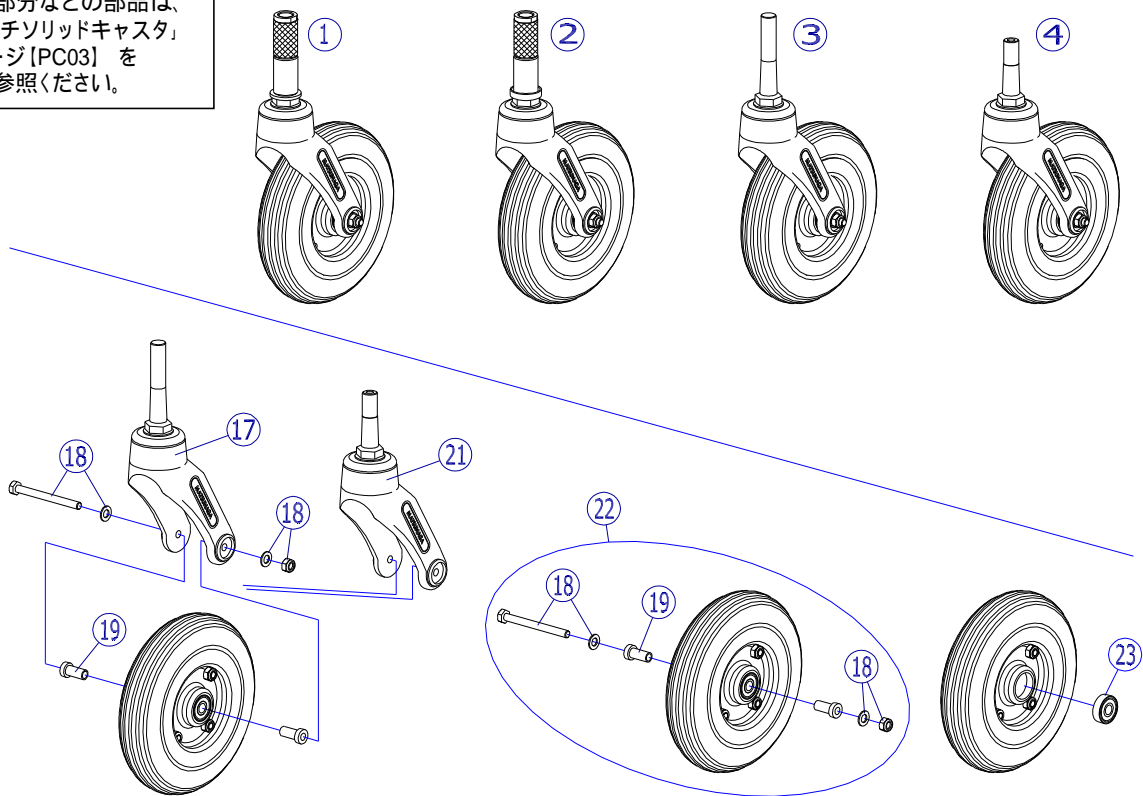

2018/1/16修正A

機種名 / 品名	6インチスーパーキャスト	ページ	XQY- PC06B
----------	--------------	-----	------------

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PC06-001	平Wパッキン式 6インチスーパーキャスト	1 個	2			
2	X-PC06-002	おわんパッキン式 6インチスーパーキャスト	1 個	2			
3	X-PC06-003	シャフト式 6インチスーパーキャスト	1 個	2			
4	X-PC06-004	ショートシャフト式 6インチスーパーキャスト	1 個	2			
17	X-PC03-017	シャフト式 6インチフォーク	1 個	2			
18	X-PC06-018	6インチスーパーキャスト輪用ボルトセット	1 本	2			
		ボルト1本(M6×67)、ワッシャー2枚、ナット1個					
19	X-PC06-019	6インチスーパーキャスト輪用カラー(2個セット)	1 個	2			2個セット
21	X-PC03-021	ショートシャフト式 6インチフォーク	1 個	2			
22	X-PC06-022	6インチスーパーキャスト輪(ボルト付セット)	1 個	2			、付
23	X-PC01-023	キャスト輪用ベアリング	1 個	4			608ZZ
		一輪に2個必要です。					

注記	
----	--