


パッキン部分などの部品は、「6インチソリッドキャスト」ページ[PC03]をご参照ください。

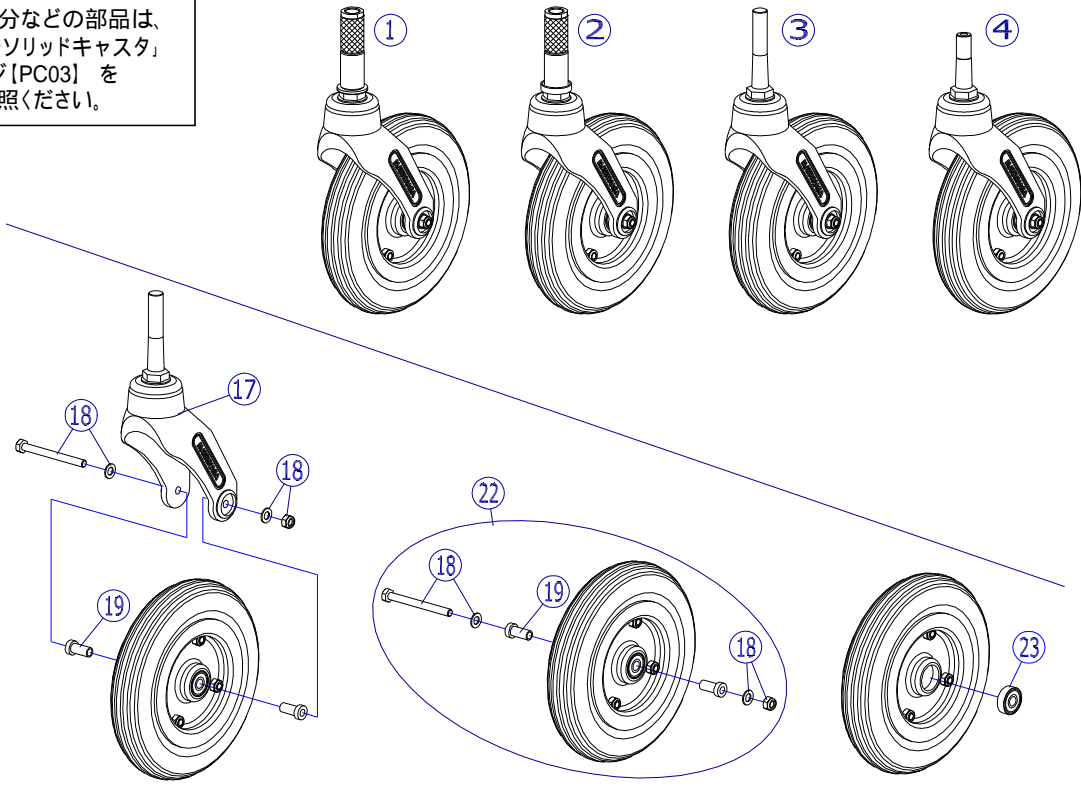

2018/1/16修正A

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PC07-001	平Wパッキン式 7インチスーパーキャスト	1 個	2			
2	X-PC07-002	おわんパッキン式 7インチスーパーキャスト	1 個	2			
3	X-PC07-003	シャフト式 7インチスーパーキャスト	1 個	2			
4	X-PC07-004	ショートシャフト式 7インチスーパーキャスト	1 個	2			
17	X-PC04-017	シャフト式 7インチフォーク	1 個	2			
18	X-PC07-018	7インチスーパーキャスト輪用ボルトセット	1 本	2			
		ボルト1本 (M6×67)、ワッシャー2枚、ナット1個					
19	X-PC07-019	7インチスーパーキャスト輪用カラー (2個セット)	1 個	2			2個セット
22	X-PC07-022	7インチスーパーキャスト輪 (ボルト付セット)	1 個	2			、 付
23	X-PC01-023	キャスト輪用ベアリング	1 個	4			608ZZ
		一輪に 2個必要です。					

注記	
----	--