



＜説明＞

車輪のハブには、大きく分けて下記の二種類があります。
 車輪のスポーク本数により、20ホール、28ホール、36ホールがあります。
 ドラムハブには、車いす本体フレームへの固定方法違いがあります。(下図参照)
 スポークは車輪サイズ、種類により長さが異なります。

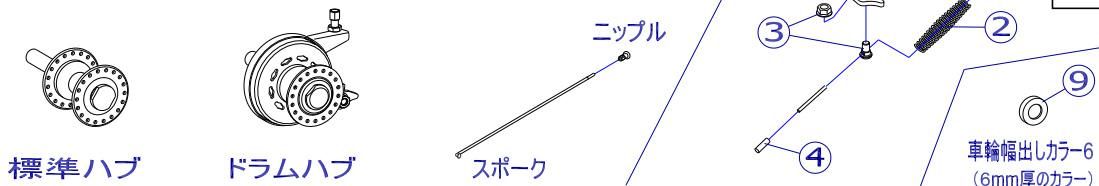

車輪ご注文時には、
 、 が付属します。
 ワイヤーご注文時
 には、 が付属します。

ドラムハブ固定方法の種類 (一部機種は専用品を使用しているため、ここには掲載していません)

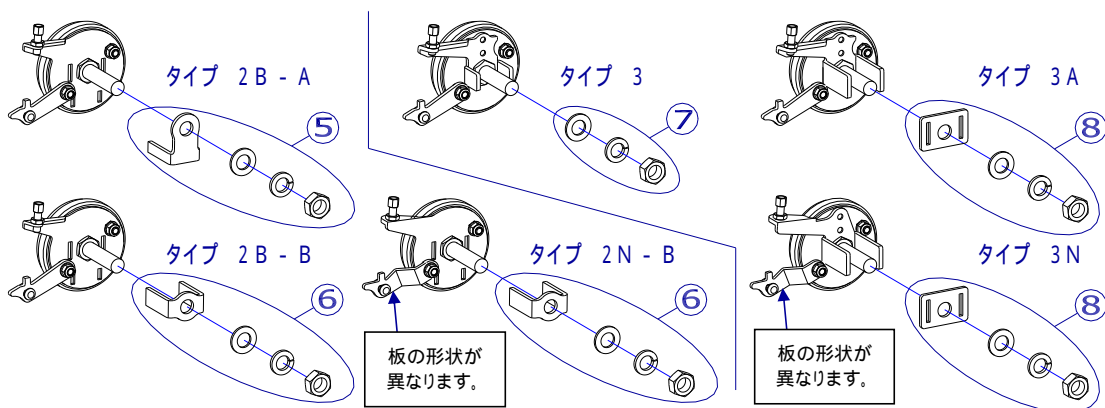

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PB04-006	六角ワイヤーアジャスト	1	個	2		
2	X-PB04-007	ドラムハブ用バネ	1	本	2		
3	X-PB04-008	丸頭ワイヤー止め(ダルマ)	1	個	2		
4	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1	個	2		
5	X-PD01-005	ドラム(タイプ 2B - A)用固定金具セット	1	個	2		
6	X-PD01-006	ドラム(タイプ 2B - B)用固定金具セット	1	個	2		2B-B、2N-B共用です。
7	X-PD01-007	車輪固定ナットセット 標準ハブ、全てのドラムハブに適合します。(一部を除く)	1	個	2		
8	X-PD01-008	ドラム(タイプ 3A)用固定金具セット	1	個	2		3A、3N共用です。
9	X-PD01-009	車輪幅出しカラー6mm	1	個	2		

・ 車輪をご注文の際には、次の点にご注意ください。

車いすの機種名をご確認いただき、用と指示いただくと、間違いが少なくなります。

(A) 車輪サイズをご確認ください。車輪サイズはタイヤ側面に記載されています。

なお、他社製車いすの場合、車輪サイズが同じでも若干の大きさが違う場合がありますのでご注意ください。

(この場合、取り付けが可能でも使用中に外れたりする可能性がありますので、純正品をご使用ください)

(B) 制動用(介助式)ブレーキの有無をご確認ください。

その場合、ハブは上記のどのタイプかご確認ください。(これ以外にも種類がありますが、その際にはお問い合わせください)

ドラムハブの場合、車いすフレームへの固定方法は機種により異なります。