


機種により仕様異なります。機種名をご確認ください。  
 MW-SLシリーズ、SAシリーズは【WA43】ページ、  
 USLシリーズは【WB06】ページをご確認ください。

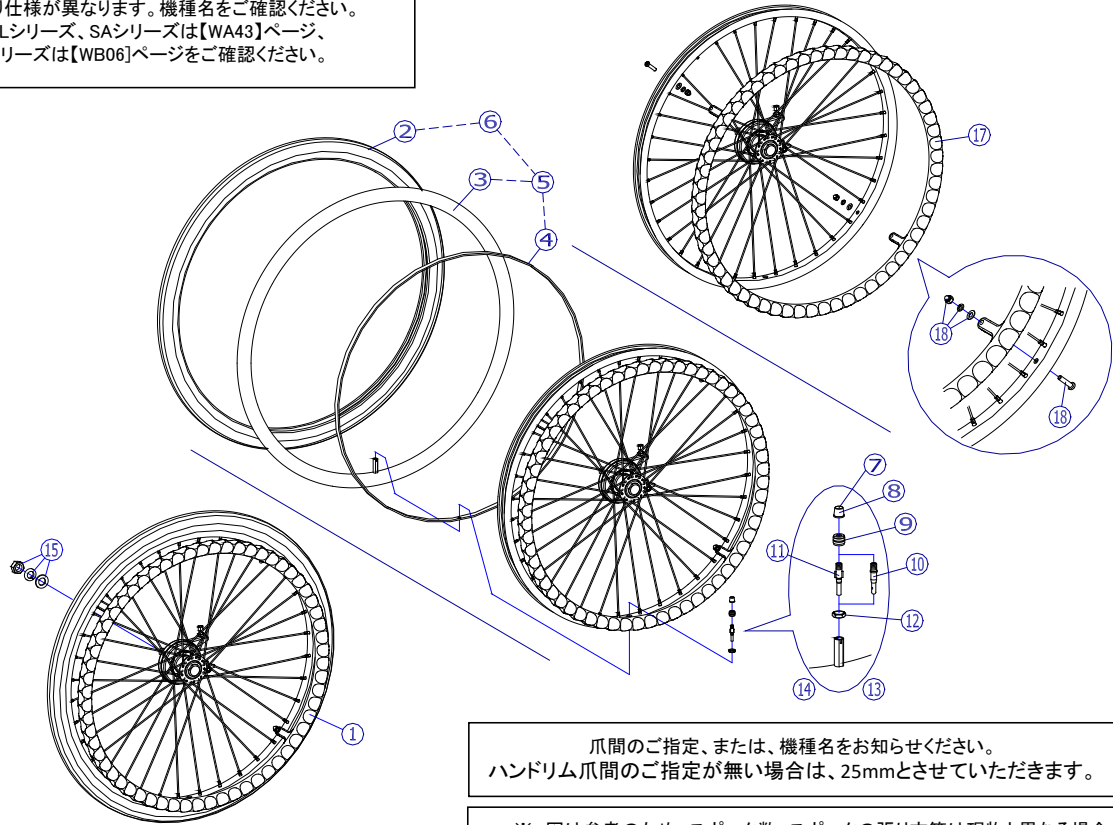

爪間のご指定、または、機種名をお知らせください。  
 ハンドリム爪間のご指定が無い場合は、25mmとさせていただきます。

※ 図は参考のため、スポーク数、スポークの張り方等は現物と異なる場合があります。

機種名／品名		22×1 車輪				ページ	XQY- PD11B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PD11-001	22×1 車輪完成(爪間:20mm) ↑ ⑮ スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットが付属します。	1	本	2		
	X-PD11-021L-( )	22×1 ドラム車輪完成(左)	1	本	1		ワイヤー無
	X-PD11-021R-( )	22×1 ドラム車輪完成(右)	1	本	1		
		( )内には固定方法の種類が入ります。 ドラム式の場合は、種類(車輪説明のページ【PD01】参照)、または機種名をお知らせください。 ↑ 固定用部品(ナットなど)が付属します。ハンドリム爪間をご指定下さい。(指定が無い場合は25mmとさせていただきます)					
2	X-PD11-002	22×1 タイヤのみ	1	本	2		
3	X-PD11-003	22×1 チューブのみ	-	-	-		設定無
4	X-PD12-004	22×1-3/8 フラップのみ	1	本	2		22×1と共通部品です
5	X-PD11-005	22×1 チューブ+フラップセット ↑ ⑬スーパーバルブセットが付属します。	1	本	2		③、④のセット
	X-PD11-095	22×1 チューブ+フラップセット 虫ゴム ↑ ⑭虫ゴムバルブセットが付属します。	1	本	2		③、④のセット
6	X-PD11-006	22×1 タイヤ+チューブ+フラップセット ↑ ⑬スーパーバルブセットが付属します。	1	本	2		②、③、④のセット
	X-PD11-096	22×1 タイヤ+チューブ+フラップセット 虫ゴム ↑ ⑭虫ゴムバルブセットが付属します。	1	本	2		②、③、④のセット
7	X-PD02-007	バルブキャップ(青)	1	個	2		
8	X-PD02-008	バルブキャップ(黒)	1	個	2		
9	---	トップナット	-	-	-		セットでの販売となります
10	X-PD02-010	スーパーバルブ	1	個	2		⑦キャップ(青)付
11	X-PD02-011	虫ゴムバルブ	1	個	2		⑧キャップ(黒)付
12	---	リムナット	-	-	-		セットでの販売となります
13	X-PD02-013	スーパーバルブセット	1	個	2		⑦、⑨、⑩、⑫のセット
14	X-PD02-014	虫ゴムバルブセット	1	個	2		⑧、⑨、⑪、⑫のセット
15	X-PD01-007	車輪固定ナットセット ↑ スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットの三点セットです。	1	個	2		
	X-PD11-017	22インチ爪間20mm 樹脂ハンドリム	1	本	2		
17	X-PD11-027	22インチ爪間25mm 樹脂ハンドリム ↑ ⑯樹脂ハンドリム用ボルトセット(4本セット)は別売りとなります。	1	本	2		
	X-PD08-018	樹脂ハンドリム用ボルトセット(4本セット) ↑ ワッシャー、スプリングワッシャー、袋ナットが付属します。	1	個	2		
18							
注記	標準仕様は、鉄ハブ、22×1-3/8(36H)リム、ハンドリム爪間25mm となります。						