


機種名 / 品名	樹脂スイングアウト&エレベ-ティング フット・レッグサポート	ページ	XQY- PG02A
----------	---	-----	------------

は機種によりスイングアウトレバーの色が異なります。
(機種名をご指定いただくか、レバー色をご指定ください)

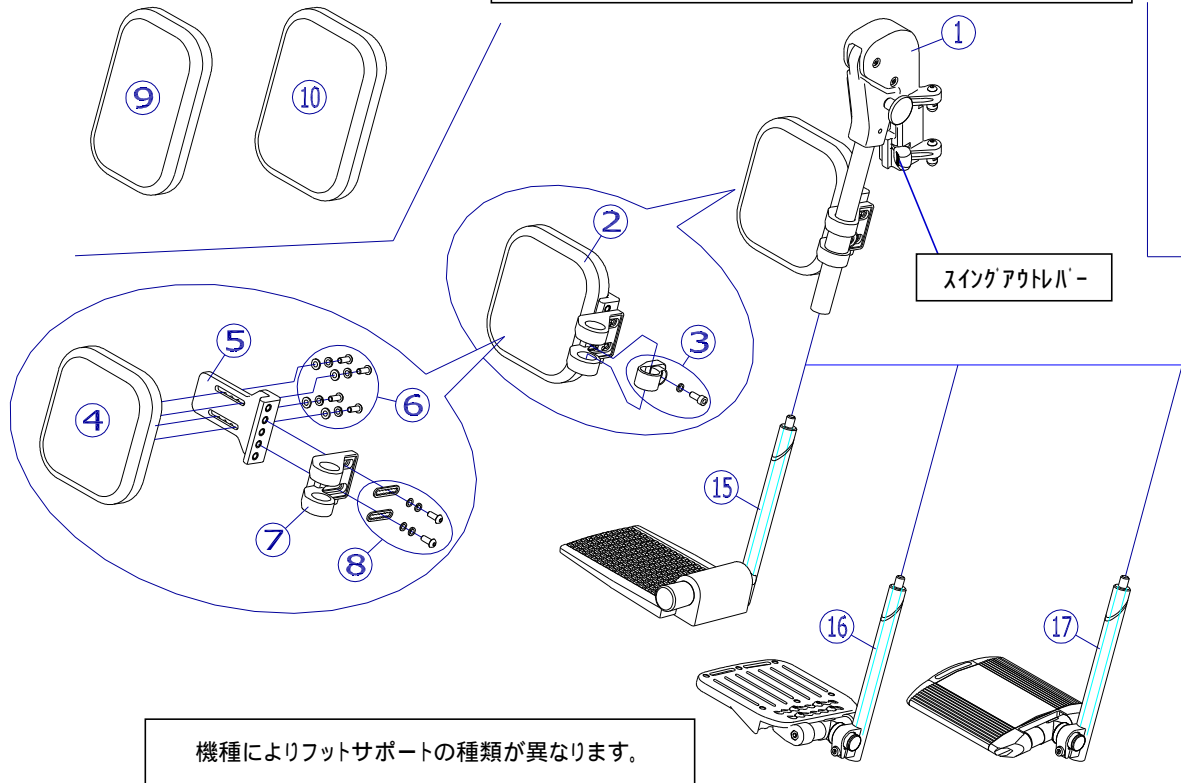

機種によりフットサポートの種類が異なります。



機種名 / 品名	樹脂スイングアウト&エレベ-ティング フット・レッグサポート	ページ	XQY- PG02B
----------	---	-----	------------

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PG02-001L	樹脂S & E (スイングアウト&エレベ-ティング)ユニット本体 [黒レバー] (左)	1 個	1			
	X-PG02-001R	樹脂S & E (スイングアウト&エレベ-ティング)ユニット本体 [黒レバー] (右)	1 個	1			
	X-PG02-011L	樹脂S & E (スイングアウト&エレベ-ティング)ユニット本体 [オレンジレバー] (左)	1 個	1			
	X-PG02-011R	樹脂S & E (スイングアウト&エレベ-ティング)ユニット本体 [オレンジレバー] (右)	1 個	1			
、 が取り付けられた状態になります。フットサポートは付属しません。							
2	X-PG02-002	樹脂S & Eパッドセット [小]	1 個	2			~ の組付品
3	X-PG02-003	樹脂S & Eパッド固定金具セット	1 個	2			ボルト付
4	X-PG02-004	ふくらはぎパッド [小] 160 × 140	1 枚	2			が付属します。
5	X-PG02-005	ふくらはぎパッド調整金具	1 個	2			
6	X-PG02-006	ふくらはぎパッド固定ボルト (4本セット)	1 個	2			
7	X-PG02-007	ふくらはぎパッド回転金具	1 個	2			
8	X-PG02-008	ふくらはぎパッド前後調整プレート (2枚セット)	1 個	2			
9	X-PG02-009	ふくらはぎパッド [大スリム] 240 × 140	1 枚	2			が付属します。
10	X-PG02-010	ふくらはぎパッド [大] 240 × 160	1 枚	2			が付属します。
15	X-PF01-023L	三角ナット式 19.1用DMタイプフットサポート完成 (左)	1 本	1			ポスト (メッキ)
	X-PF01-023R	三角ナット式 19.1用DMタイプフットサポート完成 (右)	1 本	1			
16	X-PG02-016L	三角ナット式 19.1用AJタイプフットサポート [Mサイズ] 完成 (左)	1 本	1			X-PF06-058Lと同じ、ポスト (黒色)
	X-PG02-016R	三角ナット式 19.1用AJタイプフットサポート [Mサイズ] 完成 (右)	1 本	1			X-PF06-058Rと同じ、ポスト (黒色)
	X-PG02-018L	三角ナット式 19.1用AJタイプフットサポート [Lサイズ] 完成 (左)	1 本	1			X-PF06-057Lと同じ、ポスト (黒色)
	X-PG02-018R	三角ナット式 19.1用AJタイプフットサポート [Lサイズ] 完成 (右)	1 本	1			X-PF06-057Rと同じ、ポスト (黒色)
17	X-PG02-017L	三角ナット式 19.1用OJタイプフットサポート [Mサイズ] 完成 (左)	1 本	1			ポスト (黒色)
	X-PG02-017R	三角ナット式 19.1用OJタイプフットサポート [Mサイズ] 完成 (右)	1 本	1			
	X-PG02-019L	三角ナット式 19.1用OJタイプフットサポート [Lサイズ] 完成 (左)	1 本	1			ポスト (黒色)
	X-PG02-019R	三角ナット式 19.1用OJタイプフットサポート [Lサイズ] 完成 (右)	1 本	1			
21	X-PG02-021	はさまれ注意 (縦長) シール	1 枚	2			
22	X-PG02-022	フット・レッグサポート 耐荷重45kgシール	1 枚	2			


注記	
----	--

機種名 / 品名	樹脂スイングアウト&エレベーターテイク フット・レッグサポート	ページ	XQY- PG02E
----------	--	-----	------------



機種によりスイングアウトレバーの色が異なります。
(機種名をご指定いただくか、レバー色をご指定ください)

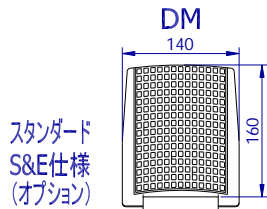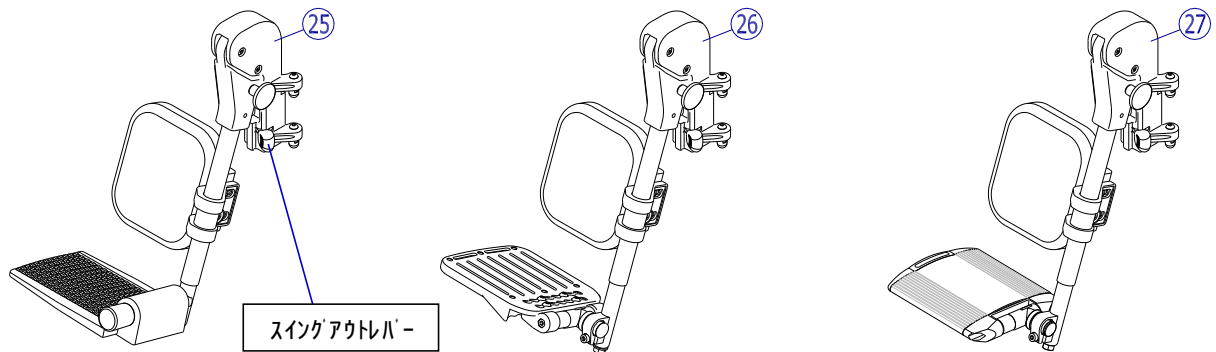


スタンダード
S&E仕様
(オプション)

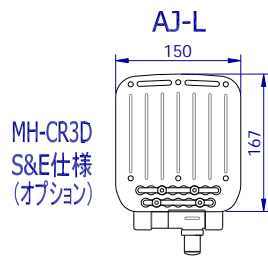

MH-CR3D
S&E仕様
(オプション)

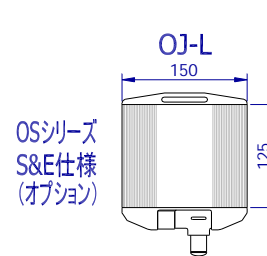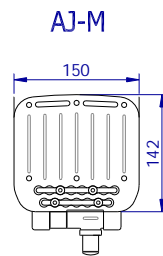

OSシリーズ
S&E仕様
(オプション)

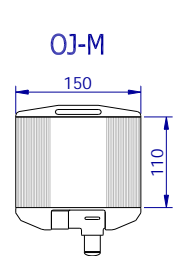

機種によりフットサポートの種類が異なります。

2017/12/14修正A

機種名 / 品名	樹脂スイングアウト&エレベーターテイク フット・レッグサポート	ページ	XQY- PG02F
----------	--	-----	------------

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
25	X-PG02-025L	樹脂S & Eユニット完成 DMフットサポート付(左)	1	本	1		スイングアウトレバー 黒色
	X-PG02-025R	樹脂S & Eユニット完成 DMフットサポート付(右)	1	本	1		
26	X-PG02-026L	樹脂S & Eユニット完成 AJタイプフットサポート[Mサイズ]完成(左)	1	本	1		スイングアウトレバー 橙色
	X-PG02-026R	樹脂S & Eユニット完成 AJタイプフットサポート[Mサイズ]完成(右)	1	本	1		
	X-PG02-028L	樹脂S & Eユニット完成 AJタイプフットサポート[Lサイズ]完成(左)	1	本	1		
	X-PG02-028R	樹脂S & Eユニット完成 AJタイプフットサポート[Lサイズ]完成(右)	1	本	1		
27	X-PG02-027L	樹脂S & Eユニット完成 OJタイプフットサポート[Mサイズ]完成(左)	1	本	1		スイングアウトレバー 橙色
	X-PG02-027R	樹脂S & Eユニット完成 OJタイプフットサポート[Mサイズ]完成(右)	1	本	1		
	X-PG02-029L	樹脂S & Eユニット完成 OJタイプフットサポート[Lサイズ]完成(左)	1	本	1		
	X-PG02-029R	樹脂S & Eユニット完成 OJタイプフットサポート[Lサイズ]完成(右)	1	本	1		

注記