


2017/12/14修正A


機種名/品名	BJヘッドサポート ① (MH用/OS用)	ページ	XQY- PH01B					
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-PH01-001-00B60	BJ-Aタイプ枕 B-60	1	個	1		黒	
	X-PH01-001-00B61	BJ-Aタイプ枕 B-61	1	個	1		紺	
	X-PH01-001-00B64	BJ-Aタイプ枕 B-64	1	個	1		橙	
	X-PH01-001-00V01	BJ-Aタイプ枕 V-1	1	個	1		赤	
2	X-PH01-002	BJ枕後方樹脂カバー	1	枚	1			
3	X-PH01-003	BJ枕表示シール(クイックレバータイプ)	1	枚	1			
4	X-PH01-004	BJ枕固定ボルトセット	1	個	1		ボルト2本、カラー2個	
5	X-PH01-005	BJ固定金具セット	1	個	1			
6	X-PH01-006	BJ固定金具用クイックレバーセット	1	個	1		⑩が付属	
7	X-PH01-007	BJ前後調整棒	1	本	1			
8	X-PH01-008	BJ前後調整金具	1	個	1			
9	X-PA03-019	M6×15 ノボルト	1	個	1			
10	X-PH01-010-00B60	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用) B-60	1	個	1		①~⑦、⑯の完成品	
	X-PH01-010-00B61	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用) B-61	1	個	1		①~⑦、⑯の完成品	
	X-PH01-010-00B64	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用) B-64	1	個	1		①~⑦、⑯の完成品	
	X-PH01-010-00V01	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用) V-1	1	個	1		①~⑦、⑯の完成品	
11	X-PH01-011	BJ前後調整金具セット	1	個	1		⑧、⑨、⑲の完成品	
12	X-PH01-012	BJヘッドサポートパイプ(ストレートタイプ)【外幅290】	1	本	1		⑰が付属	
	X-PH01-042	BJヘッドサポートパイプ(ストレートタイプ)【外幅310】	1	本	1		⑰が付属	
	X-PH01-032	BJヘッドサポートパイプ(ストレートタイプ)【外幅330】	1	本	1		⑰が付属	
		↑ パイプの外々寸法を確認してください。または、機種名、座幅を指定してください。						
13	X-PH01-013-00B60	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用) B-60	1	個	1		⑮、⑯、②~⑦の完成品	
	X-PH01-013-00B61	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用) B-61	1	個	1		⑮、⑯、②~⑦の完成品	
	X-PH01-013-00B64	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用) B-64	1	個	1		⑮、⑯、②~⑦の完成品	
	X-PH01-013-00V01	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用) V-1	1	個	1		⑮、⑯、②~⑦の完成品	
14	X-PH01-014	BJヘッドサポートパイプ(円背タイプ)【外幅290】	1	本	1		⑰が付属	
	X-PH01-024	BJヘッドサポートパイプ(円背タイプ)【外幅310】	1	本	1		⑰が付属	
	X-PH01-034	BJヘッドサポートパイプ(円背タイプ)【外幅330】	1	本	1		⑰が付属	
		↑ パイプの外々寸法を確認してください。または、機種名、座幅を指定してください。						
注記								

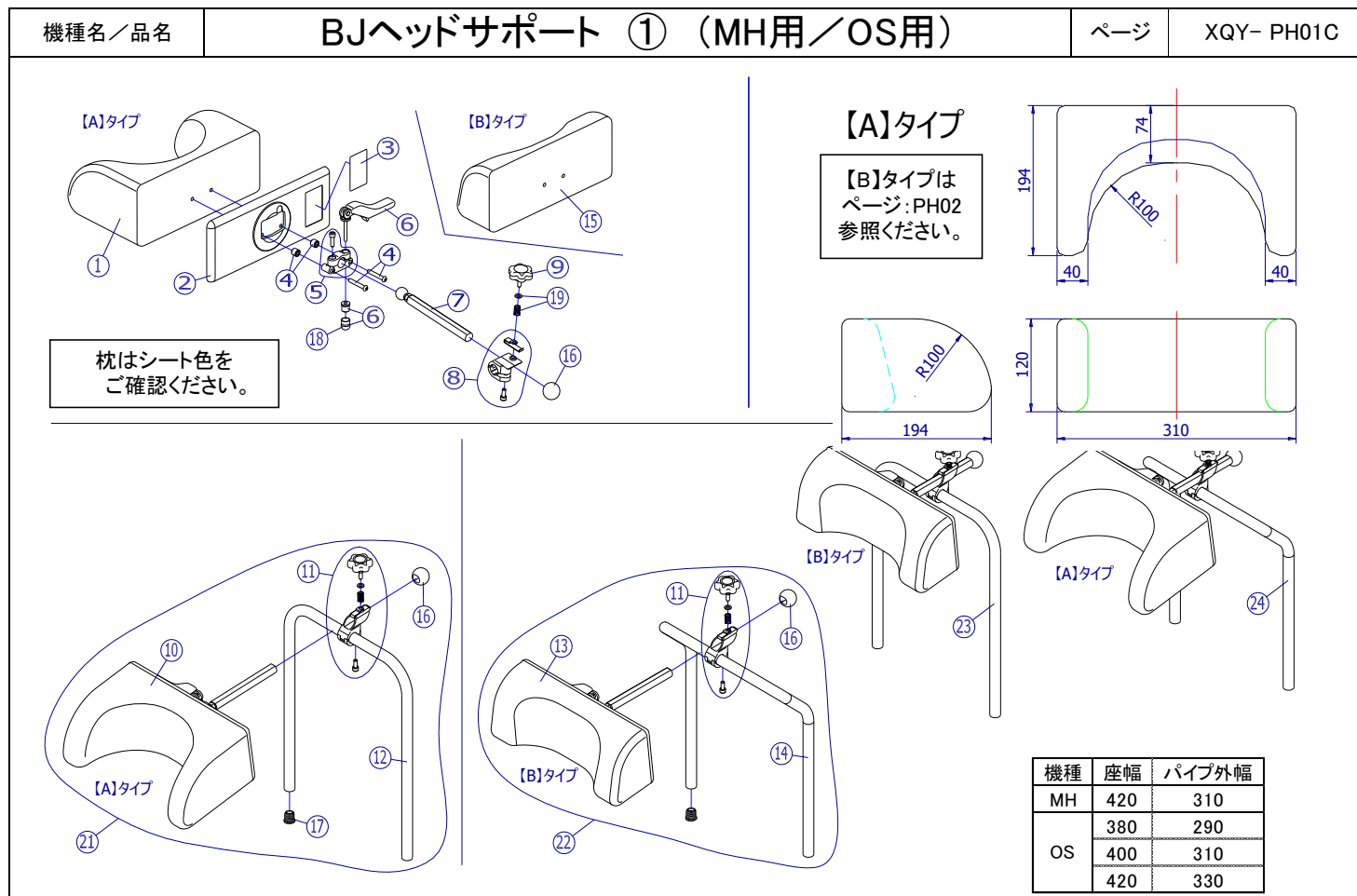

2018/6/25修正B

機種名/品名	BJヘッドサポート ① (MH用/OS用)	ページ	XQY- PH01D
--------	-----------------------	-----	------------

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
15	X-PH01-015-00B60	BJ-Bタイプ枕 B-60	1	個	1		黒
	X-PH01-015-00B61	BJ-Bタイプ枕 B-61	1	個	1		紺
	X-PH01-015-00B64	BJ-Bタイプ枕 B-64	1	個	1		橙
	X-PH01-015-00V01	BJ-Bタイプ枕 V-1	1	個	1		赤
16	X-PH01-016	BJ前後調整棒用ゴムキャップ	1	個	1		
17	X-PA01-101	6分用中柱	1	個	2		
18	X-PH01-020	クイックレバー用ゴムキャップ	1	個	1		
19	X-PH01-019	BJヘッドサポート ノブボルト用パネ(ワッシャー付き)	1	個	1		ワッシャー付き
21	X-PH01-021-38B60	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅290】完成 B-60	1	個	1		⑩～⑫、⑯の完成品
	X-PH01-021-38B61	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅290】完成 B-61	1	個	1		⑩～⑫、⑯の完成品
	X-PH01-021-38B64	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅290】完成 B-64	1	個	1		⑩～⑫、⑯の完成品
	X-PH01-021-38V01	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅290】完成 V-1	1	個	1		⑩～⑫、⑯の完成品
	X-PH01-021-40B60	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅310】完成 B-60	1	個	1		⑩～⑫、⑯の完成品
	X-PH01-021-40B61	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅310】完成 B-61	1	個	1		⑩～⑫、⑯の完成品
	X-PH01-021-40B64	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅310】完成 B-64	1	個	1		⑩～⑫、⑯の完成品
	X-PH01-021-40V01	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅310】完成 V-1	1	個	1		⑩～⑫、⑯の完成品
	X-PH01-021-42B60	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅330】完成 B-60	1	個	1		⑩～⑫、⑯の完成品
	X-PH01-021-42B61	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅330】完成 B-61	1	個	1		⑩～⑫、⑯の完成品
24	X-PH01-024-38B60	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅290】完成 B-60	1	個	1		⑩⑪⑭⑯の完成品
	X-PH01-024-38B61	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅290】完成 B-61	1	個	1		⑩⑪⑭⑯の完成品
	X-PH01-024-38B64	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅290】完成 B-64	1	個	1		⑩⑪⑭⑯の完成品
	X-PH01-024-38V01	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅290】完成 V-1	1	個	1		⑩⑪⑭⑯の完成品
	X-PH01-024-40B60	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅310】完成 B-60	1	個	1		⑩⑪⑭⑯の完成品
	X-PH01-024-40B61	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅310】完成 B-61	1	個	1		⑩⑪⑭⑯の完成品
	X-PH01-024-40B64	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅310】完成 B-64	1	個	1		⑩⑪⑭⑯の完成品
	X-PH01-024-40V01	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅310】完成 V-1	1	個	1		⑩⑪⑭⑯の完成品
	X-PH01-024-42B60	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅330】完成 B-60	1	個	1		⑩⑪⑭⑯の完成品
	X-PH01-024-42B61	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅330】完成 B-61	1	個	1		⑩⑪⑭⑯の完成品

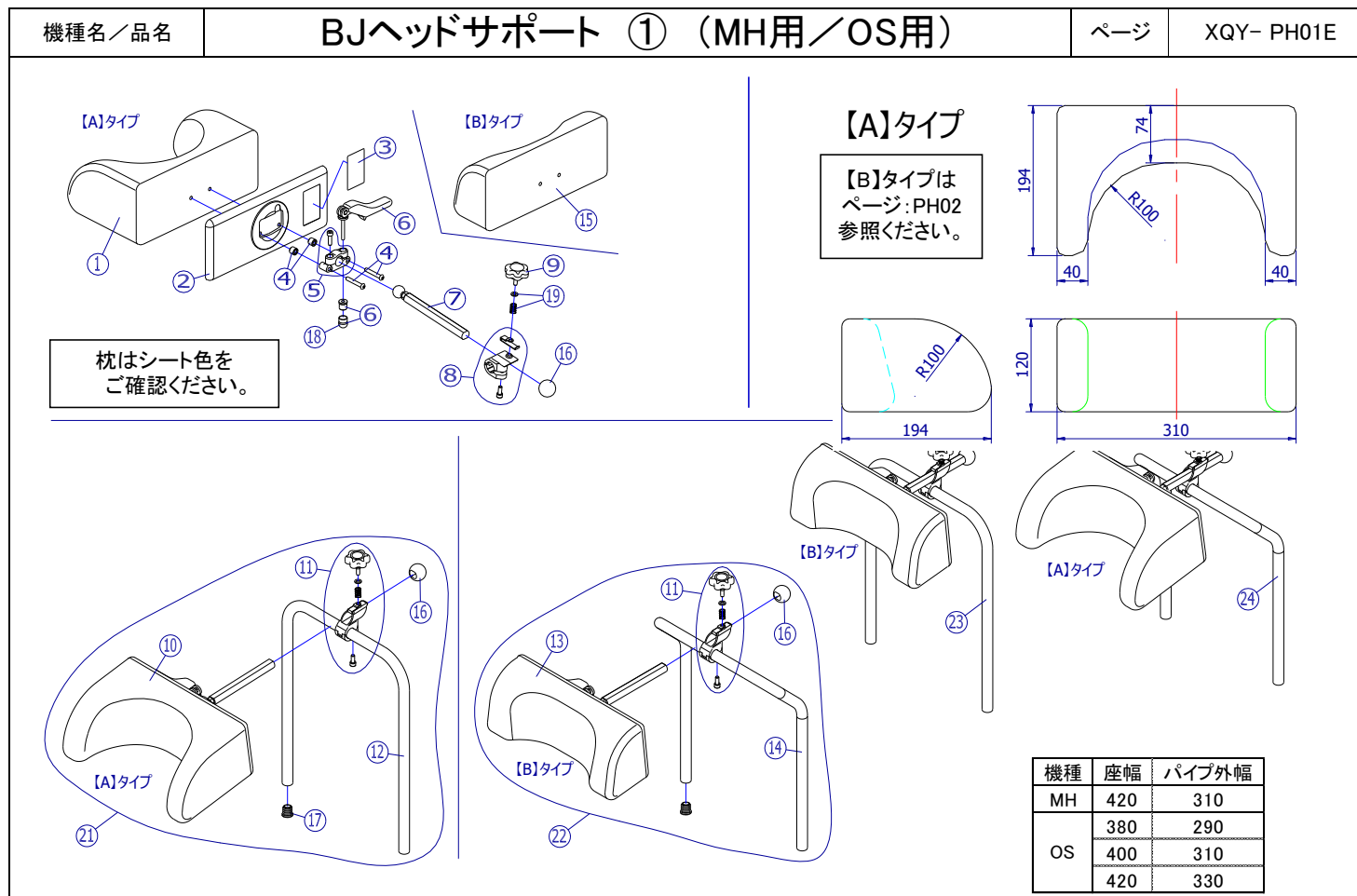

2018/6/25修正B

機種名/品名	BJヘッドサポート ① (MH用/OS用)				ページ	XQY- PH01F	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
22	X-PH01-022-38B60	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅290】完成 B-60	1	個	1		⑪⑬⑭⑯の完成品
	X-PH01-022-38B61	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅290】完成 B-61	1	個	1		⑪⑬⑭⑯の完成品
	X-PH01-022-38B64	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅290】完成 B-64	1	個	1		⑪⑬⑭⑯の完成品
	X-PH01-022-38V01	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅290】完成 V-1	1	個	1		⑪⑬⑭⑯の完成品
	X-PH01-022-40B60	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅310】完成 B-60	1	個	1		⑪⑬⑭⑯の完成品
	X-PH01-022-40B61	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅310】完成 B-61	1	個	1		⑪⑬⑭⑯の完成品
	X-PH01-022-40B64	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅310】完成 B-64	1	個	1		⑪⑬⑭⑯の完成品
	X-PH01-022-40V01	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅310】完成 V-1	1	個	1		⑪⑬⑭⑯の完成品
	X-PH01-022-42B60	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅330】完成 B-60	1	個	1		⑪⑬⑭⑯の完成品
	X-PH01-022-42B61	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅330】完成 B-61	1	個	1		⑪⑬⑭⑯の完成品
	X-PH01-022-42B64	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅330】完成 B-64	1	個	1		⑪⑬⑭⑯の完成品
X-PH01-022-42V01	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 円背タイプ)【外幅330】完成 V-1	1	個	1		⑪⑬⑭⑯の完成品	
23	X-PH01-023-38B60	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅290】完成 B-60	1	個	1		⑪⑫⑬⑯の完成品
	X-PH01-023-38B61	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅290】完成 B-61	1	個	1		⑪⑫⑬⑯の完成品
	X-PH01-023-38B64	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅290】完成 B-64	1	個	1		⑪⑫⑬⑯の完成品
	X-PH01-023-38V01	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅290】完成 V-1	1	個	1		⑪⑫⑬⑯の完成品
	X-PH01-023-40B60	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅310】完成 B-60	1	個	1		⑪⑫⑬⑯の完成品
	X-PH01-023-40B61	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅310】完成 B-61	1	個	1		⑪⑫⑬⑯の完成品
	X-PH01-023-40B64	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅310】完成 B-64	1	個	1		⑪⑫⑬⑯の完成品
	X-PH01-023-40V01	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅310】完成 V-1	1	個	1		⑪⑫⑬⑯の完成品
	X-PH01-023-42B60	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅330】完成 B-60	1	個	1		⑪⑫⑬⑯の完成品
	X-PH01-023-42B61	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅330】完成 B-61	1	個	1		⑪⑫⑬⑯の完成品
	X-PH01-023-42B64	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅330】完成 B-64	1	個	1		⑪⑫⑬⑯の完成品
X-PH01-023-42V01	BJ-Bタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅330】完成 V-1	1	個	1		⑪⑫⑬⑯の完成品	
注記							