




自在キャスタ部

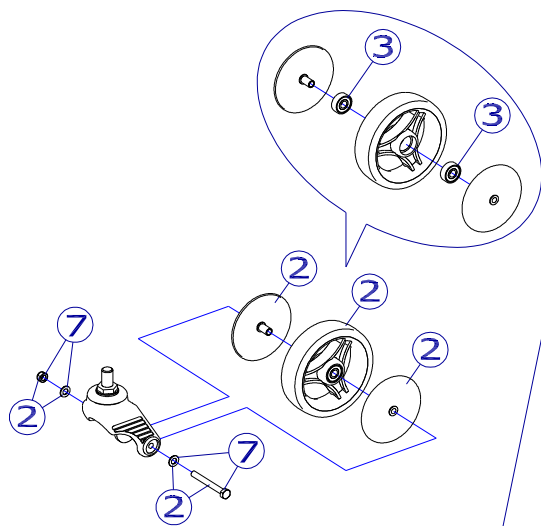

抵抗器付キャスタ部

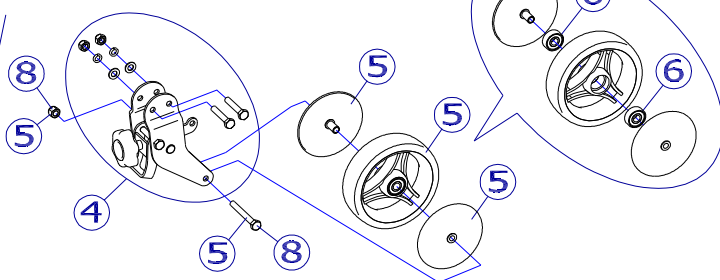

説明用分解図

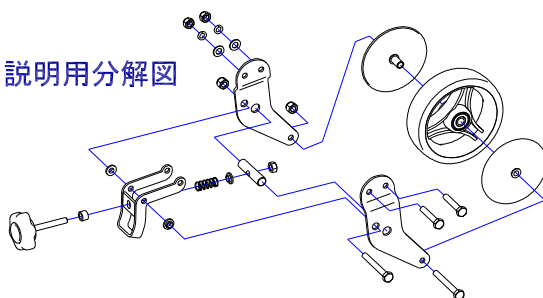

機種名 / 品名		SM-30/35/40/40S / キャスタ					ページ	XQY- YH14B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
2	X-YH14-032	ホップステップ用 キャスタ輪(自在フォーク用)	1	個	2/4		カバー付	
3	X-PC01-023	キャスタ輪用ベアリング	1	個	4		608ZZ	
		一輪に2個必要です。						
4	X-YH14-034L	ホップステップ用 抵抗器付フォーク(左)	1	個	1			
	X-YH14-034R	ホップステップ用 抵抗器付フォーク(右)	1	個	1			
5	X-YH14-035	ホップステップ用 キャスタ輪(固定フォーク用)	1	個	2		カバー付	
7	X-YH14-037	ホップステップ用 キャスタ輪ボルト(自在フォーク用)	1	本	2/4		ワッシャー、ナット付	
8	X-YH14-038	ホップステップ用 キャスタ輪ボルト(固定フォーク用)	1	本	2		ナット付	
注記								