


CM-501

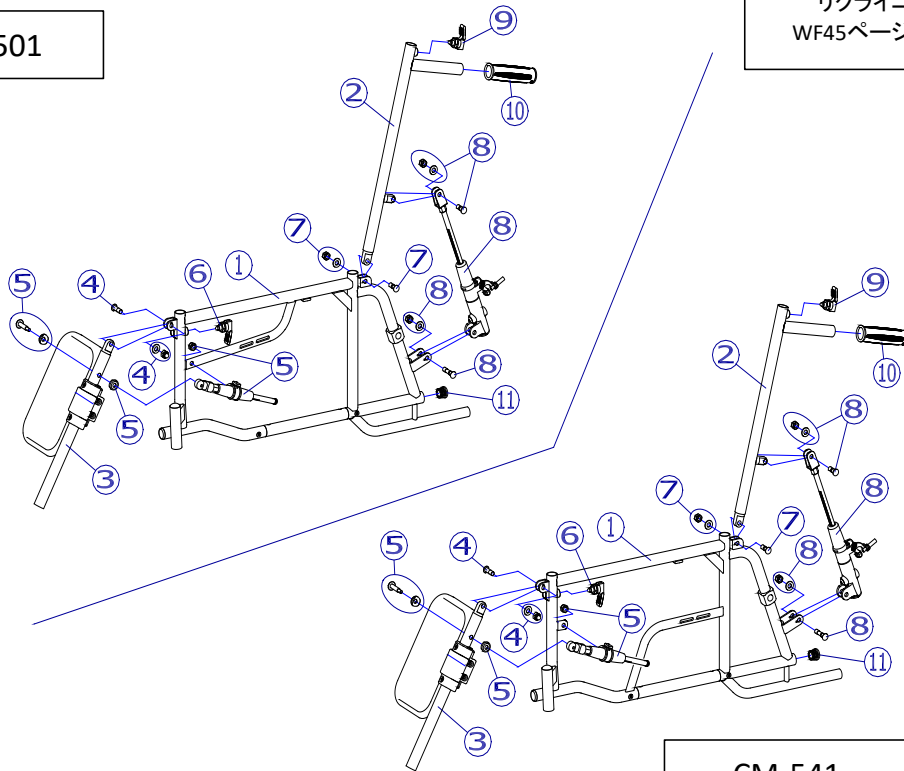

CM-541

2018/7/24新設

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	CM-501 本体フレーム(左)	---	---	---	-	設定無
	---	CM-501 本体フレーム(右)	---	---	---	-	
	---	CM-541 本体フレーム(左)	---	---	---	-	設定無
	---	CM-541 本体フレーム(右)	---	---	---	-	
2	X-WF44-002L	CM-501/541用 バックサポートフレーム(左)	1	本	1		
	X-WF44-002R	CM-501/541用 バックサポートフレーム(右)	1	本	1		
3	X-WF46-001L	CM-501/541用 エレベータリングフット・レッグサポートセット(左)	1	個	1		支点ボルト付
	X-WF46-001R	CM-501/541用 エレベータリングフット・レッグサポートセット(右)	1	個	1		
4	X-WF46-008	↑ ④エレベータリング支点ボルトセットが付属します。 CM-501/541用 エレベータリング支点ボルトセット	1	本	2		
5	X-WF44-005L	CM-501/541用 プッシュメカロック【小】セット(左)	1	個	1		
	X-WF44-005R	CM-501/541用 プッシュメカロック【小】セット(右)	1	個	1		
6	X-PA03-011	セフティーロック(橙)	1	個	2		
7	X-WF36-007	CM-50/54用 リクライニング支点ボルトセット	1	本	2		
8	X-WF38-006L	CM-50/54用 プッシュメカロック【大】セット(左)	1	個	1		支点ボルト付
	X-WF38-006R	CM-50/54用 プッシュメカロック【大】セット(右)	1	個	1		
9	X-PA03-011	セフティーロック(橙)	1	個	2		⑥と共通
10	X-PA01-006	φ22貫通グリッブ	1	本	2		
11	X-PA01-102	7分用中栓	1	個	2		
注記	⑧付属品 : プッシュメカロック【大】鉄リクライニング専用ボルト(2種各1本)、平W(2枚)、M8ナイロンNT(2個)						