


機種名／品名	CM-501/541 リクライニング部・縮み止め部	ページ	XQY- WF45A
--------	---------------------------	-----	------------

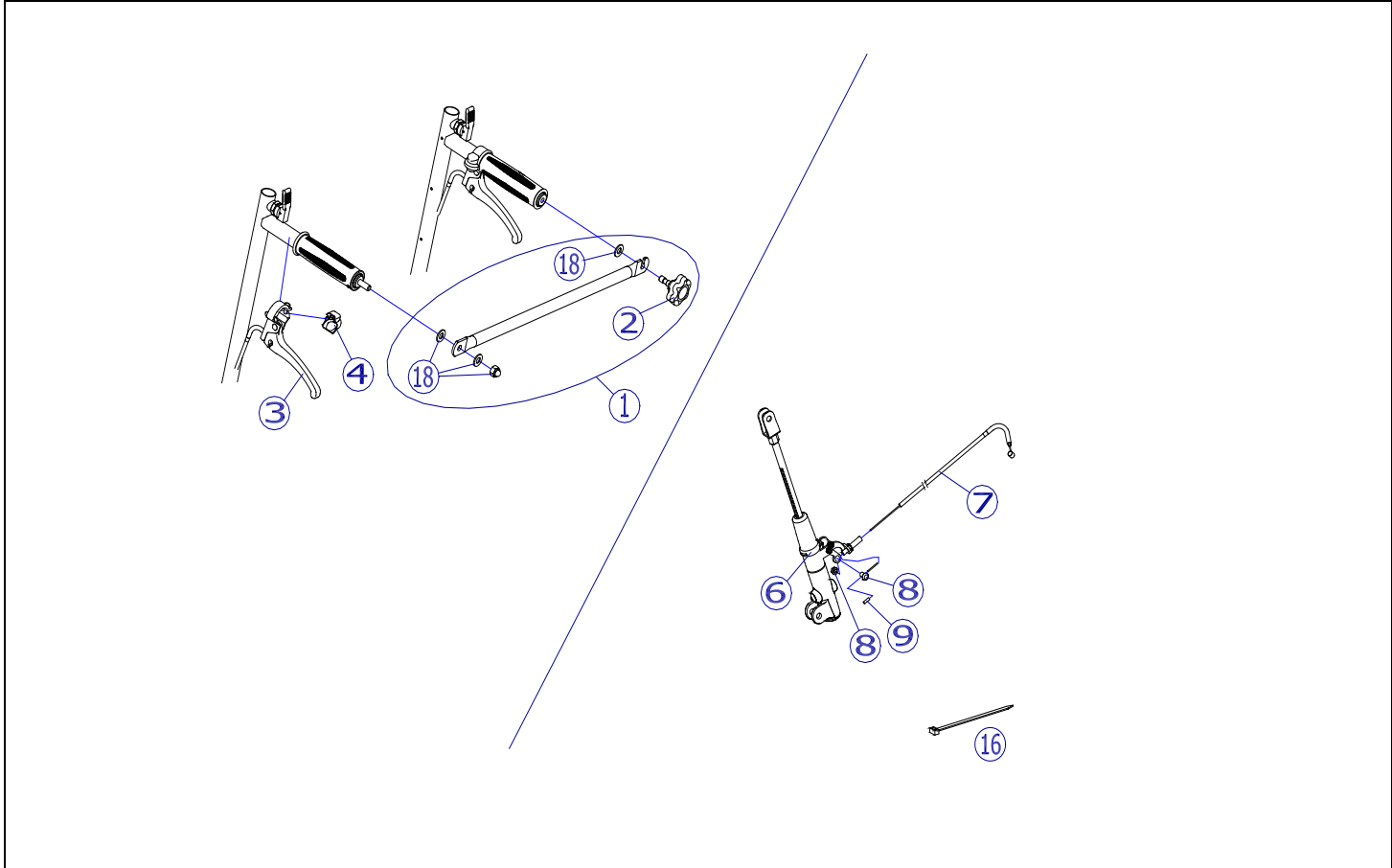

④ 2018/7/24新設

機種名／品名		CM-501/541 リクライニング部・縮み止め部	ページ	XQY- WF45B			
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WF45-001	CM-501/541用 縮み止めセット ↑ ②ノブボルト、⑩ナット類が付属します	1	台分	1		
2	X-PA03-029	縮み止め用ノブボルト(M8段付き)	1	個	1		
3	X-WF38-003L	リクライニング用レバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ
	X-WF38-003R	リクライニング用レバー【Aタイプ】(右)	1	個	1		
4	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	2		
6	X-WF38-006L	CM-50/54用 プッシュメカロック【大】セット(左)	1	本	1		⑧、支点ボルト付
	X-WF38-006R	CM-50/54用 プッシュメカロック【大】セット(右)	1	本	1		
7	X-WF38-007	CM-50/54用 プッシュメカロック【大】ワイヤー ↑ ⑨が付属します。	1	本	2		
8	X-PB04-008	丸頭ワイヤー止め(ダルマ)	1	個	2		
9	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1	個	2		
16	X-PA04-022	結束バンド 150mm	1	本	2		
注記							