

エリーゼ・エスコート用ポンベ架取付け・説明書



この度は、エリーゼ・エスコート用ポンベ架をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく、安全にお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。
また、大切に保管し、必要に応じてお読みください

取り付け可能な車いす

- エリーゼ (FR-31TR)
- エスコート (FR-11R)

構成部品

下記の部品が同梱されているかご確認ください。

No.	①	②	③	④	⑤
品名	ポンベ架本体	取付金具 A	取付金具 B	M8 × 35 ノブボルト	ボルトセット ・ M6 × 45 六角穴付きボタンボルト ・ M6 平ワッシャー ・ M6 スプリングワッシャー ・ M6 袋ナット
数量	1	1	1	1	1 (式)
外観					

必要工具

- 六角レンチ (対辺 4 mm)
- スパナ (10mm)
- ※電動工具は使用しないでください (車いす等を破損する恐れがあります)。

取付け前に

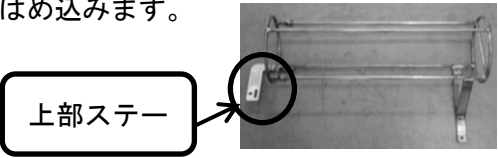
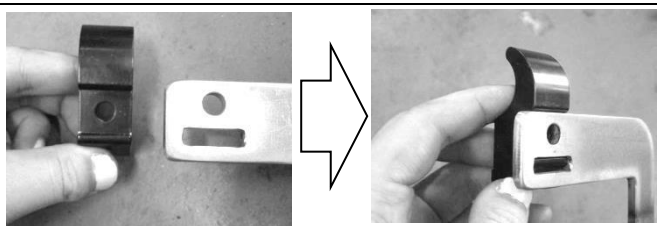


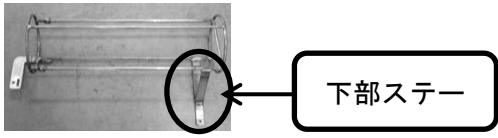


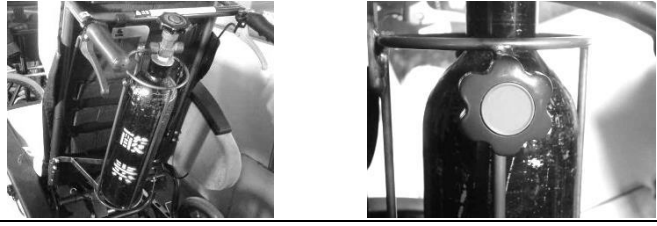
- ・取付けは平坦で安全な場所で行ってください。
- ・車いすは折りたたんだ状態ではなく、開いた状態で行ってください。
- ・必ずブレーキをロックし、車いすが動かない状態で行ってください。

ポンベ架のお手入れ方法

- ・清掃する場合は、水につけたタオルを強くしぼり、泥やホコリを拭きとった後に、乾いた布で仕上げ拭きをしてください。
- ・揮発性剤 (シンナー・ベンジン・アルコール類) は 使用しないでください。(変色・劣化の原因となります)

取付け方法

※ポンベ架は左側につける仕様となっております。

<p>1. ポンベ架①の上部ステーに取付金具 A②をはめ込みます。</p> 	
<p>2. 上記にボルトを通して縮止めパイプにあてます。取付金具 B③を裏側からボルトセット⑤(平ワッシャー、スプリングワッシャー、袋ナットの順)で仮止めします。</p> 	
<p>3. 背パイプ左側の上部のボルトを外し、ポンベ架①の下部ステーを挟んで仮止めします。</p> 	
<p>4. ポンベ架①の位置を調整し、2. と 3. の仮止めをしっかりと締結し(目安トルク:4~6Nm)、ガタツキがないことを確認します。</p>	
<p>5. ポンペを搭載し、ノブボルト④をポンベ架①にはめ込み、ポンペがガタつかないように固定します。</p>	
<p>○ 問題があった場合には、4.に戻り、ポンベ架の位置を調整して下さい。</p>	

※ポンペの出し入れは、ゆっくり行ってください。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、損害を追う可能性があること、および物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ポンペが落ちたりしないように必ずノブボルトで固定してください。
- ポンベ架にがたつき・異状が無いか確認してください。
もし異状があれば使用を中止し、取付け方法をもう一度確認してください。
不明な場合は、お買い上げいただいた販売店、または(株)松永製作所までお問い合わせください。
- この製品をポンベ架以外の目的では使用しないで下さい。



株式会社 松永製作所

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>

2016.4