

OLive専用 杖入れ 取付け・取扱説明書

このたびは、杖入れをお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく、安全にご使用していただくために、この説明書をよくお読みください。
また、大切に保管し、必要に応じてお読みください。

使用可能な杖

この杖入れは、パイプ径がφ19~22mmの一本杖に使用可能です。(杖先ゴムは36φ以下のものをご使用ください)

構成部品

下記の部品が同梱されているかどうか確認してください。

No.	部品名	数量	備考
①	杖入れ本体 (OLive専用取付け金具付)	1	
②	杖ホルダー	1	
③	ボルト	1	M5×35mm (六角穴付きボルト)
④	スプリングワッシャー	1	M5用
⑤	ボルト	1	M6×20mm (六角穴付きキャップボルト)
⑥	ナット	1	M6用 (ナイロンナット二種)

取付け方法

使用工具

●六角レンチ (対辺4mm)

※電動工具の使用はご遠慮ください。(杖入れ本体を破損する恐れがあります)

取付け前に


取付けは、平坦な安全な場所で行ってください。

必ずブレーキをロックし、OLive本体が動かない状態で行ってください。

杖入れの取付け方法

※取付けは左右どちらでも可能です。(説明は右側へ取付けの場合)



- OLive本体の取扱説明書を参照 (P.6コンパクトな折りたたみ) いただき本体を図のように折りたたんでください。
- 取付け金具を下からパイプにはめてください。
- 前方へずらしてください。
- 付属のボルトにスプリングワッシャーを通し、ボルトを締めてください。
- 杖入れにがたつきがないか確認してください。

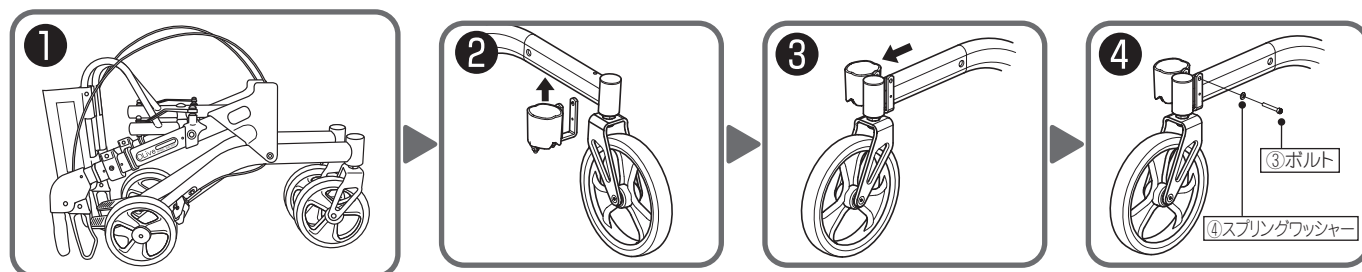


* 適正トルク 5Nm

杖ホルダーの取付け方法


※杖入れと同じ側に取り付けてください。
取付け位置はバックサポートホルダーの上または、バックサポートホルダーと回転式スナップピン (e-Pin) の間です。

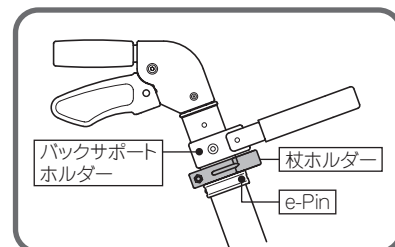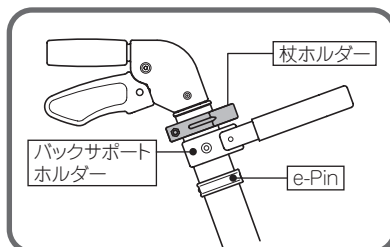

① 図のようにパイプにはめ込んでください。

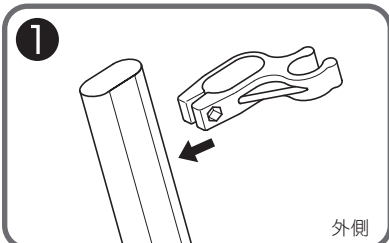

② ボルトとナットで固定してください。

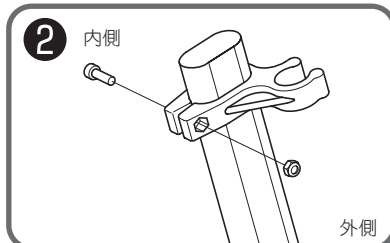

③ 杖ホルダーにがたつきがないか確認してください。

* 適正トルク 4Nm


⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性があること、および物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 取付けの際には十分注意しケガをしないようにしてください。
(指をはさんだりしないように注意してください。)
- 取付け後は、杖入れ本体・杖ホルダーが確実に固定されていることを確認してください。
- 無理に取付けを行うと、使用中に杖が落下したり、杖入れが破損する恐れがありますので、その場合にはお買い上げいただいた販売店または(株)松永製作所までお問い合わせください。

杖入れの使用方法

- ① 杖入れに杖の先端を入れてください。
- ② 杖ホルダーに杖のパイプをはめてください。

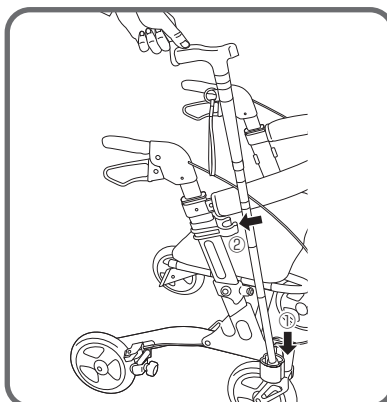

杖入れのお手入れの方法

- 清掃する場合は、水につけたタオルを強くしぼり、泥やホコリを拭き取った後に、乾いた布で仕上拭きをしてください。
- 揮発性剤 (シンナー・ベンジン・アルコール類) は使用しないで下さい。(変色・劣化の原因となります。)

⚠ 注意

- 杖入れに杖を押し付けたり、無理な力を加えたりしないでください。
- この製品は、OLive専用の杖入れとして設計しております。
杖以外 (傘など) を入れて使用するなど、その他の目的では使用しないでください。
- 改造などしないでください。



株式会社 松永製作所

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>