

〈ポンベ架 (OS-12TR, 12TRS専用) 取付け・取扱説明書〉

このたびは、ポンベ架(OS-12TR, 12TRS専用)をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく、安全にご使用していただくために、この説明書をよくお読みください。
また、大切に保管し、必要に応じてお読みください。


取付け方法

〈取付け前に〉

取付けは平坦な安全な場所で行ってください。
必ず駐車用ブレーキをロックし、車いすが動かない状態で行ってください。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性があること、および物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 取付けの際には十分注意しケガをしないようにしてください。
- 取付け後はポンベ架が確実に固定されていることを確認してください。
- 無理に取付けを行うと使用中にポンベが落下したり、ポンベ架が破損する恐れがありますので、不明な場合は、お買い上げいただいた販売店、または株式会社松永製作所までお問い合わせください。
- この製品をポンベ架以外の目的では使用しないで下さい。


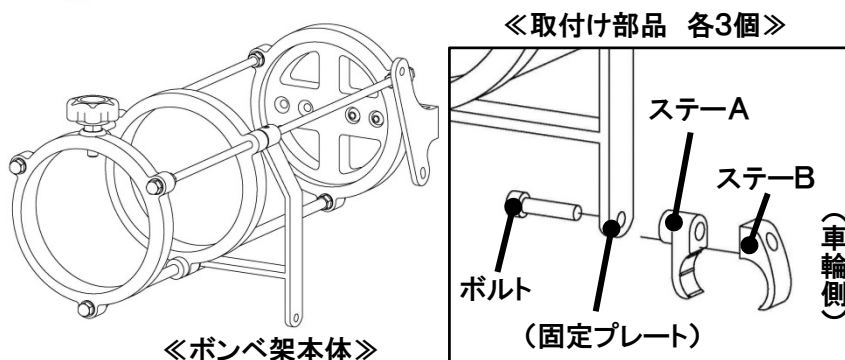


付属工具

- 六角レンチ (対辺5mm)
- 六角レンチ (対辺2.5mm)

※ポンベ架は基本的に右側に取付けてください。
(左側に取付けたい場合はお問合せください。)


- ① ポンベ架を取付ける位置の目安を決めます。
(目安: タイヤ装着パイプより前方へ約 120mm。)
 - ② 車いすの本体フレーム内側より、ボルトを仮止め(3箇所)してください。(このとき、リクライニングおよびティルティング動作にポンベ架が干渉しないか確認してください。)
※干渉する場合は、ポンベ架上部の固定プレート、樹脂リングの位置を変更してください。(位置の変更は後述。)
 - ③ 仮止めしたボルト(3箇所)を締めつけてください。
 - ④ ポンベ架に「がたつき」がないか、人が車いすにのった時に干渉しないか確認してください。
- 問題があった場合は、②に戻りポンベ架の位置を調整してください。

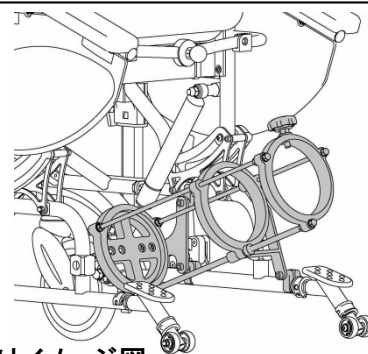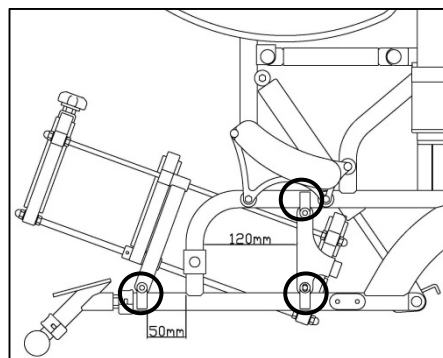

※取付けイメージ図


<樹脂リングの位置の変更>

樹脂リングの上に固定カラーがあります。
固定カラーと上部固定プレートの六角穴付き止めネジを緩め移動させて下さい。
調整後は、樹脂リングが確実に固定されているか必ず確認してください。

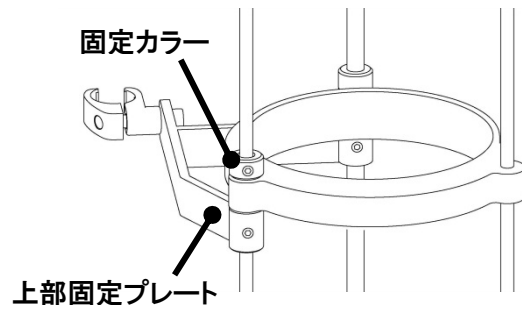

ポンベ架の使い方

ポンベをポンベ架にゆっくりと上から入れます。
ポンベ架の向きを確認し、ノブボルトでポンベが動かないように固定します。

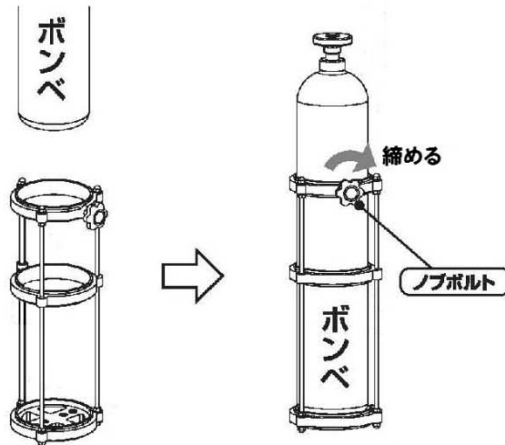

外す際は、ノブボルトを緩めポンベをゆっくりと持ち上げて下さい。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性があること、および物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ポンベが落ちたりしないように必ずノブボルトで固定してください。
- ポンベ架にがたつき・異状が無いか確認してください。
もし異状があれば使用を中止し、取付け方法をもう一度確認してください。
不明な場合は、お買い上げいただいた販売店、または(株)松永製作所までお問い合わせください。
- この製品をポンベ架以外の目的では使用しないで下さい。

ポンベ架のお手入れの方法

- 清掃する場合は、水につけたタオルを強くしぼり、ぼろやホコリを拭き取った後に、乾いた布で仕上げ拭きをしてください。
- 揮発性剤(シンナー・ベンジン・アルコール類)は使用しないでください。(変色・劣化の原因となります。)



株式会社 松永製作所

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>