

Coray
コーラルシリーズ


マツナガの入浴補助用具

シャワーいす

折りたたみタイプ

取扱説明書

保存用
保証書付

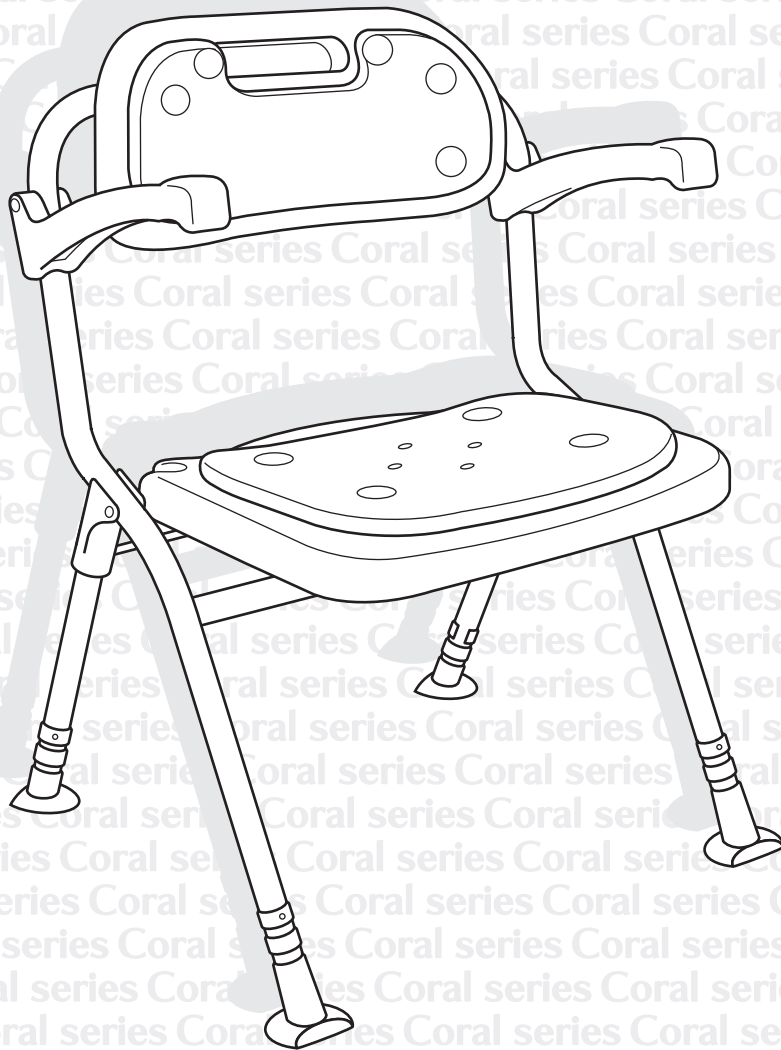

MATSUNAGA

このたびは、(株)松永製作所製品のシャワーいすをお買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書には、お客様が安全に正しくご使用していただくために必要な注意事項や正しい使い方が説明してあります。ご使用になる前に、必ずお読みください。
また、保証書が付いておりますので紛失しないように大切に保管してください。

- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または、直接弊社までお問い合わせください。

付属品



取扱説明書

目次


ご使用の前に	1
各部の名称	3
広げ方・折りたたみ方	4
広げ方	4
折りたたみ方	4
安全にお使いになるために	5
クッションの取り付け方	5
クッションの外し方	5
跳ね上げ肘掛け	5
座面の高さ調整	6
ご使用方法	7
乗り降りの仕方	7
使用しないとき	7
持ち運び方	7
もしこんなトラブルが発生したときは	8
お手入れの方法	8
保管場所	8
仕様・寸法	9
保証・アフターサービス・保証書	9


ご使用前に

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示します。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性があることおよび物的損害の発生する可能性が想定されることを示しています。

お守りいただく内容の説明

 この表示は、してはいけない「**禁止**」内容です。

 この表示は、必ずしていただく「**強制**」内容です。

警告

■本品を他の用途で使用しないでください。
事故の原因となります。

■改造をしないでください。
本体の正常な仕様でなくなるため、
事故の原因となります。


■座面や肘掛けの上に立ったり、脚を掛けたり、
飛び乗ったりしないでください。
転倒・転落等事故の原因となります。

■故意に揺すらないでください。
転倒・転落事故の原因となります。

■本品に2人以上同時に乗らないでください。
転倒・転落等事故の原因となります。

■ご使用者の体重が75kgを超える方は、使用
しないでください。
破損して事故の原因となります。


■肘掛けを手すり代わり
にして、横方向に
力をかけないでくだ
さい。
(部品の破損や転倒事
故の原因となります。)

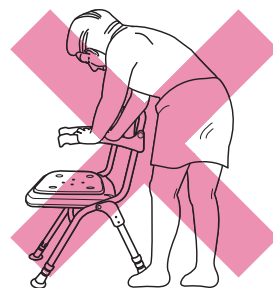


(禁止)


しては
いけない


■上体を後方に大きく
のけぞり、背もたれ
に体重をかけすぎな
いください。
(転倒・転落事故の原
因となります。)

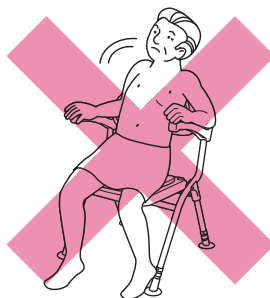


■座る時や立ち上がる
時、肘掛けや座面の
片側だけに手をつい
て支えにしないでく
ださい。
(転倒・転落事故の原
因となります。)

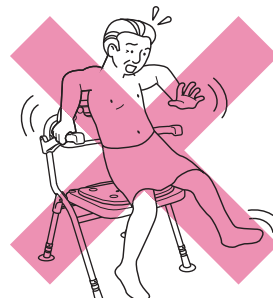

■背もたれを支えにし
ての移動や立ち上が
りはしないでください。
(転倒事故の原因とな
ります。)

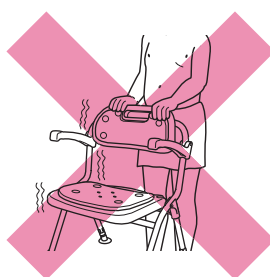

■上体を横方向に大き
く傾けるなどして、
本体の片側や、肘掛
けに無理な荷重をか
けないでください。
(転倒・転落事故や、
破損してケガをする
原因となります。)

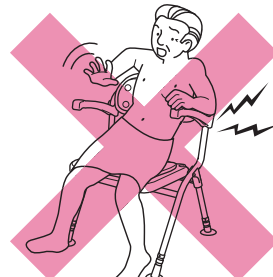

警告


(強制)




必ずして
いただく

- 故障・異常のある時は、直ちに使用を中止してください。
転倒・転落事故の原因となります。
- 使用者が自分の身体を十分に安定させられない場合は、必ず介助者が付き添ってください。
転倒・転落等事故の原因となります。
- ご使用前に、4本の脚パイプが全て同じ高さに設定されており、高さ調整ロックピンが確実に固定されていることを確認してください。
転倒・転落等事故の原因となります。
- 脚ゴムが4点確実に接地していることを確認してください。
転倒・転落等事故の原因となります。
- 浴室床面の平らな面でご使用ください。
不安定な場所では、転倒・転落事故の原因となります。
- 使用時はクッション固定ピンが確実に取り付けられていることを確認してください。
クッションが動き、転倒・転落事故の原因となります。

- 使用時は、座面が確実にロックされていることを確認してください。
座面が跳ね上がり、転倒・転落事故の原因となります。

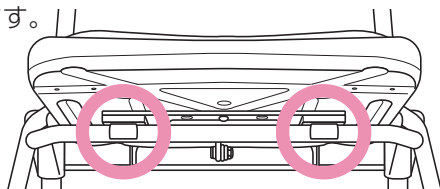

- 高さ調整パイプをスライドさせた時に、脚ゴムの向きが正しい向きであることを確認して取り付けください。
いすが不安定になり、転倒・転落事故の原因となります。

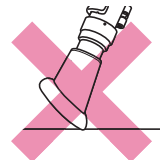

注意

(禁止)



しては
いけない

- ご使用者の体重が75kgを超える方は、使用しないでください。
破損して事故の原因となります。
- 開閉時に可動部分に指等を近づけると挟まれケガの原因となります。
- 本品を水中に沈めたり、水中で使用しないでください。
座面が浮き上がり不安定になるため、ケガをする原因となります。
また、パイプの腐食の原因となり、破損してケガをする原因となります。
- 塩素系薬剤、酸性、アルカリ性洗剤、シンナー、ベンジンによる殺菌・消毒や、
温泉水や硫黄系入浴剤をかけての使用はしないでください。
パイプの腐食の原因や樹脂部品の劣化につながり、破損してケガをする原因となります。
- タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、塩素系洗剤・シンナー・クレゾール等は
使用しないでください。
樹脂が劣化または破損して、ケガをする原因となります。
- 熱湯をかけないでください。
樹脂部品が変形し、破損してケガをする原因となります。
- 直射日光に当てないでください。
樹脂部品が劣化(変形または変質)し、破損してケガをする原因となります。
- 火気に近づけないでください。
樹脂部品が燃え、火災の原因となります。また、本体が熱くなり、やけどの原因となります。
- 屋外では使用しないでください。
事故の原因となります。


(強制)




必ずして
いただく

- ご使用前に、脚ゴムが確実に取り付けられていることを確認してください。
滑りやすくなり、転倒・転落事故の原因となります。また、浴室床面が傷付く原因となります。
- ご使用前、ご使用後は、本品や床に付いた石けんやシャンプーを洗い流してください。
石けんやシャンプーが付いていると、滑りやすくなり、転倒・転落事故の原因となります。

各部の名称

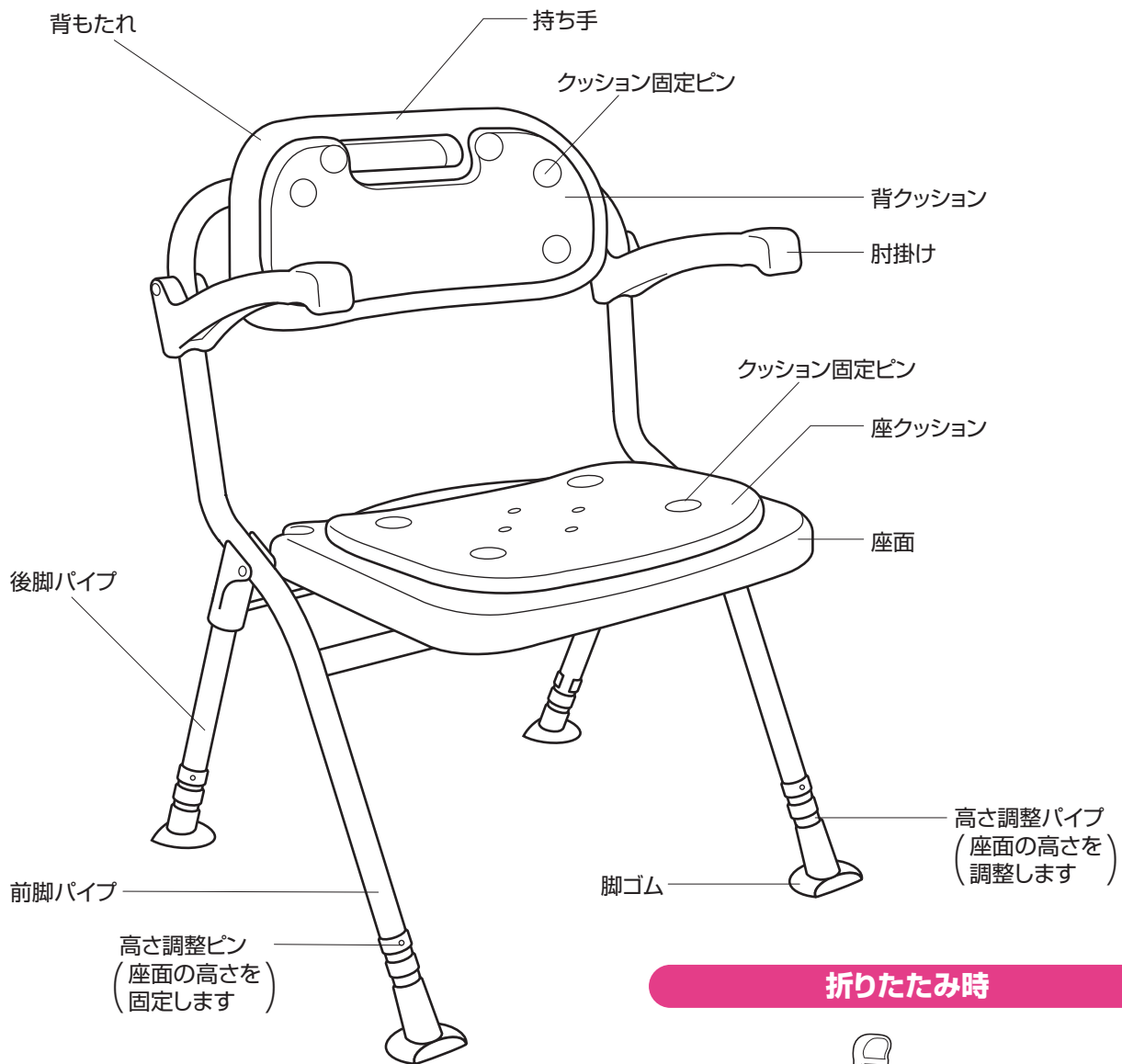


折りたたみ時

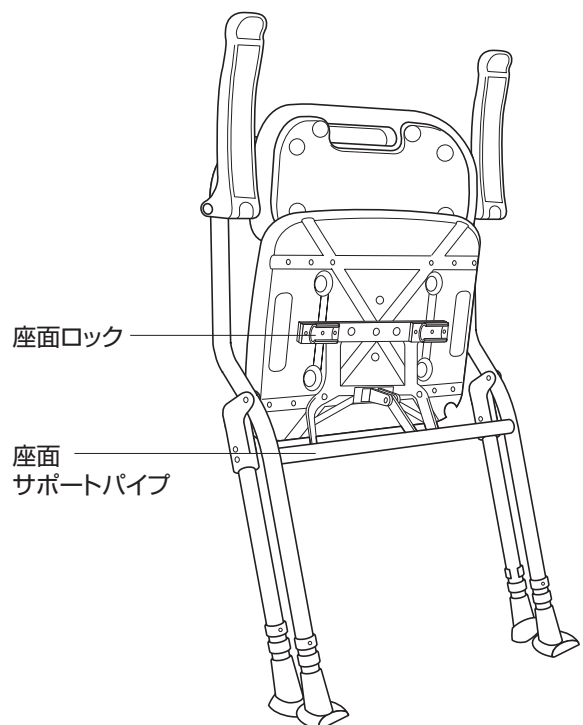


広げ方・折りたたみ方

広げ方


① 背もたれを持ち、座面を開く。

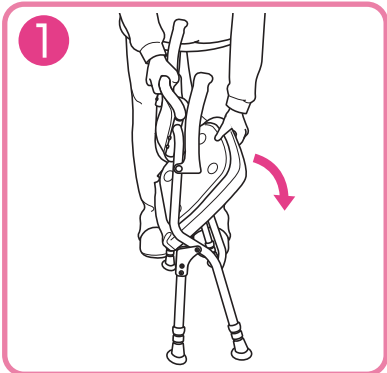


② 座面を押さえて、ロックする。

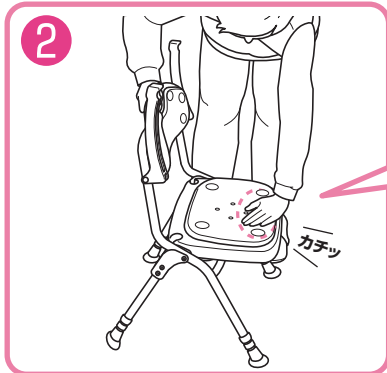


<ロックされた状態>

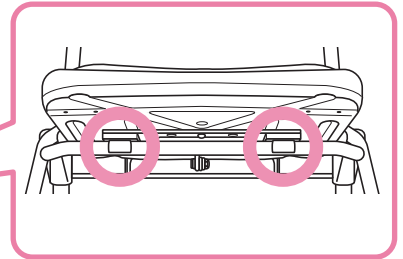

③ 肘掛けを背パイプに当たって止まるまで、下ろす。

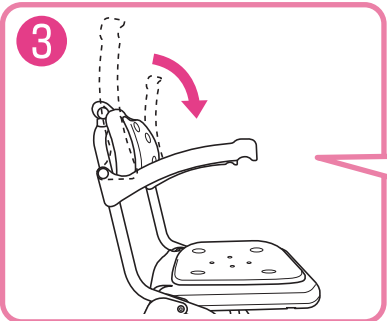


<肘掛けが背パイプに当たるまで>

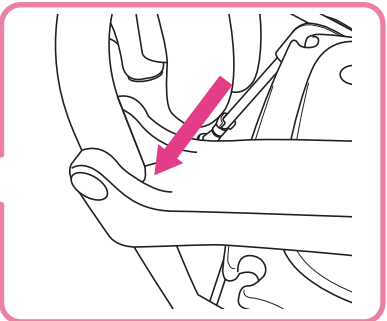

警告

- 使用時は座面が確実にロックされていることを確認してください。
(座面が跳ね上がり、転倒・転落事故の原因となります。)

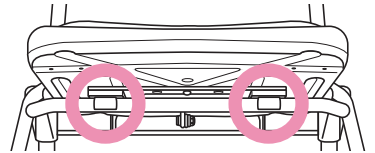

していただく


注意

- 開閉時に可動部分に指等を近づけると挟まれケガの原因となります。


してはいけない

折りたたみ方


① 肘掛けを跳ね上げる。

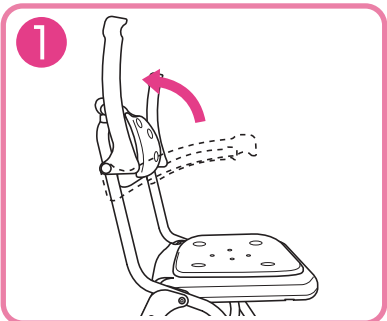

② 背もたれを持ち、背もたれに当たるまで、座面の先端を持ち上げる。

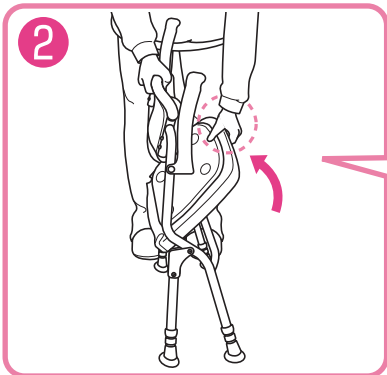

<座面が背もたれに当たるまで>

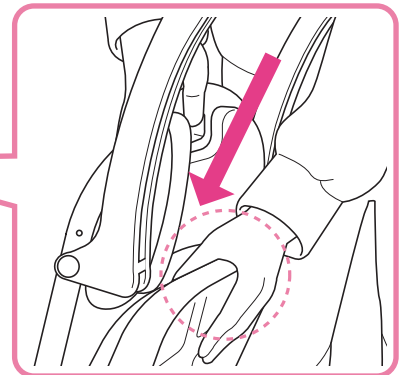


安全にお使いになるための使用方法


クッションの取り付け方

〈座クッション〉


- 1 座面の溝と穴位置に合わせて、座クッションを置きます。

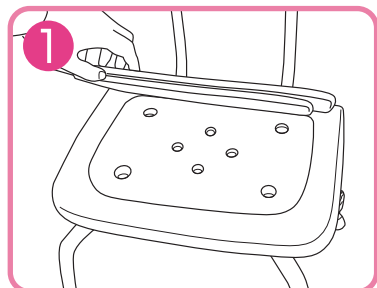

※座クッションは、前後方向にご注意ください。

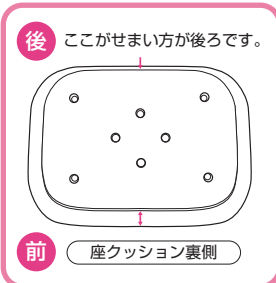


- 2 クッション固定ピンをクッションの外側の穴4ヶ所に差し込み、奥まで押さえます。

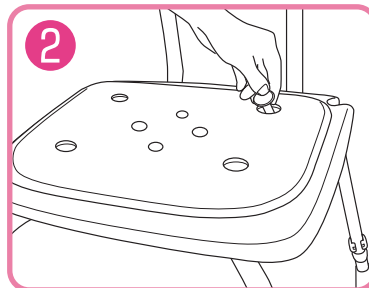

〈背クッション〉

- 1 背もたれの溝と穴位置に合わせて、背クッションを置きます。
- 2 クッション固定ピンをクッションの穴6ヶ所に差し込み、奥まで押さえます。

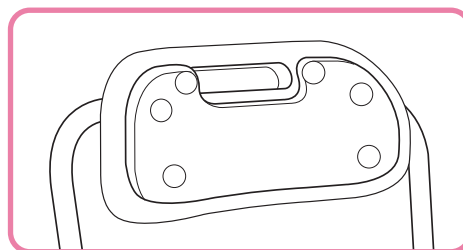

警告


- 使用時はクッション固定ピンが確実に取り付けられていることを確認してください。(クッションが動き、転倒・転落事故の原因となります。)

していただく

クッションの外し方

- クッションを外して、洗うことができます。また、クッションを交換することができます。

- 1 クッション固定ピンとクッションを指ではさみ、固定ピンとクッションを一緒に外します。

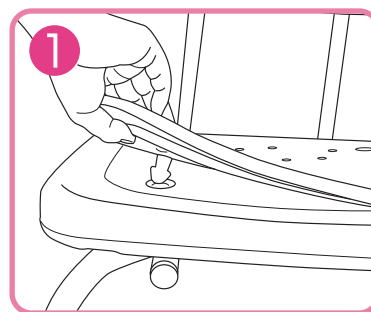


跳ね上げ肘掛け

- 肘掛けを跳ね上げると、乗り移りの際広いスペースが取れます。


〈乗り移り時〉

肘掛けを跳ね上げる。

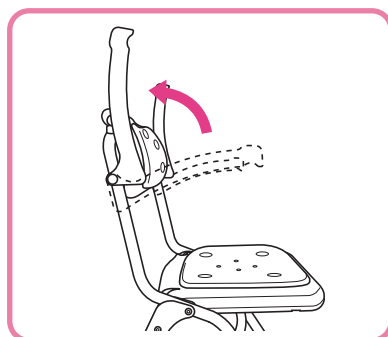


〈使用時〉

肘掛けを背パイプに当たって止まるまで、下ろす。

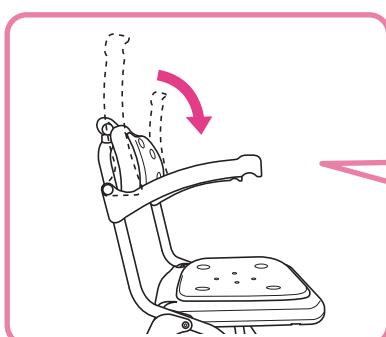

〈肘掛けが背パイプに当たるまで〉

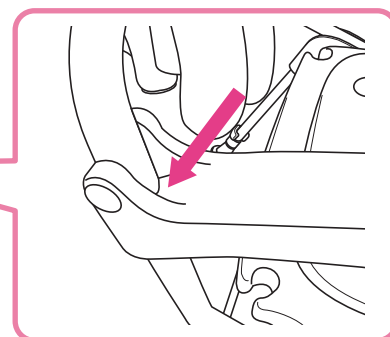

注意


- 開閉時に可動部分に指等を近づけると挟まれケガの原因となります。

してはいけない


座面の高さ調整

- 座面の高さを350,370,390,410,430,450mmの6段階に調整することができます。
- 使用者や介助者の使いやすい高さに合わせてください。また、浴槽縁の高さに座面の高さを合わせることで、浴槽内への出入りが楽になります。


高さ調整ピンの取り外し方

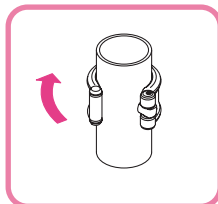


指を引っかけて矢印方向に回転させます。

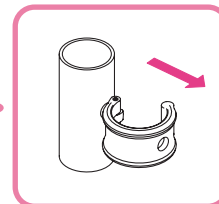


引き抜きます。

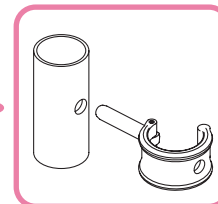


- ① 高さ調整ピンを取り外します。

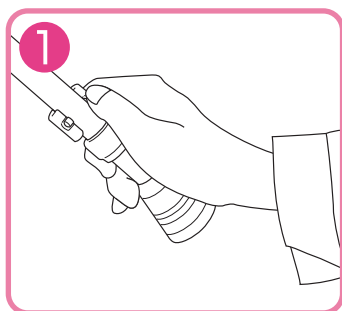


- ② 高さ調整パイプをスライドさせ、穴位置を合わせます。

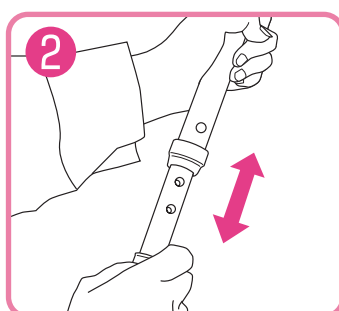


- ③ 高さ調整ピンを取りつけます。

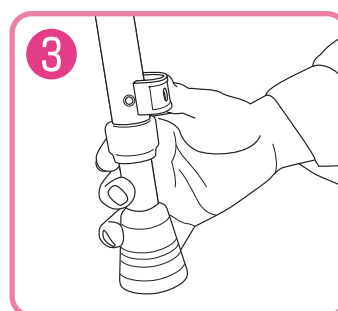



高さ調整ピンの取り付け方

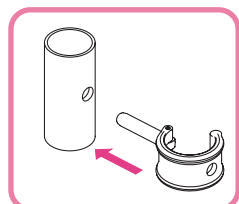

穴にピンを差し込みます。

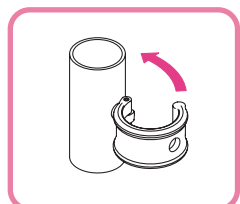

矢印方向に回転させます。

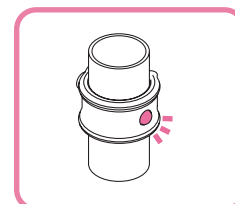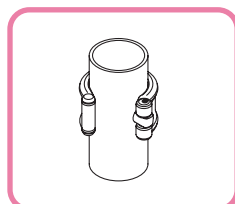

反対側の穴にピンの頭が出ていることを確認します。

警告

- 4本の脚パイプが全て同じ高さに設定されており、高さ調整ピンが確実に固定されていることを確認してください。
(転倒・転落等事故の原因となります。)

していただく


警告

- 脚ゴムが4点確実に接地していることを確認してください。
(転倒・転落等事故の原因となります。)

していただく

警告

- 高さ調整パイプをスライドさせた時に、脚ゴムの向きが正しい向きであることを確認して取り付けください。
(いすが不安定になり、
転倒・転落事故の原因となります。)

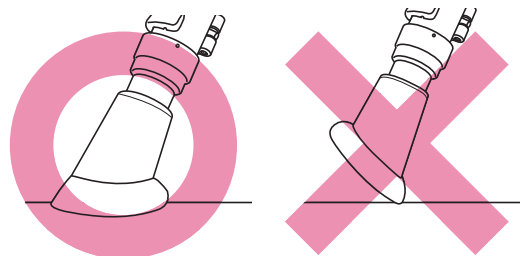


していただく

ご使用方法

乗り降りの仕方


<乗り方>

シャワーいすに座り、肘掛けを下ろす。
(→P5跳ね上げ肘掛け<使用時>)

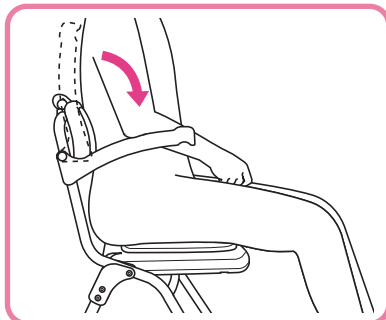

<降り方>


肘掛けを跳ね上げ、シャワーいすから降りる。

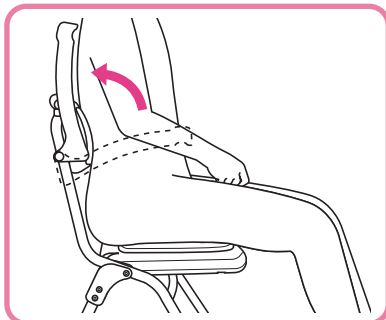

使用しないとき


●使用しないときは、いすを折りたたんで壁に立て掛けることができます。

折りたたんだいすは、背もたれの後側を壁に付けて立て掛ける。

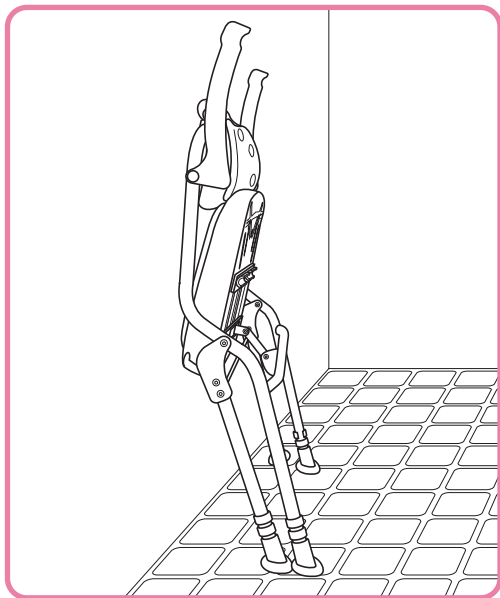

持ち運び方

背もたれ上方にある持ち手を持って運ぶ。

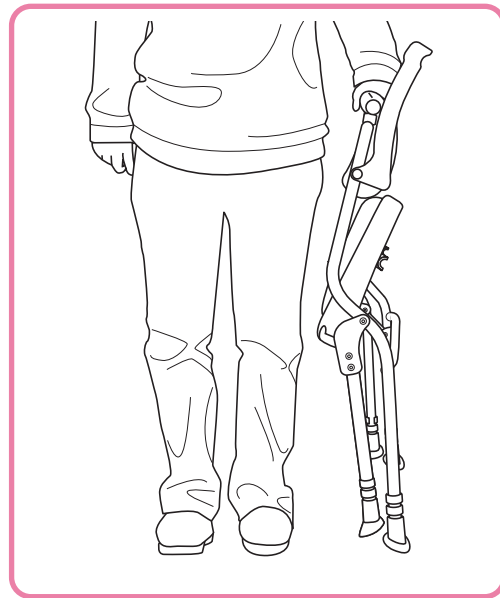

⚠ 注意

●折りたたんだシャワーいすを立て掛けるときは、背もたれの後側を壁に付けて立て掛けてください。

(反対側にすると、いすが倒れやすく、)
ケガの原因となります。)

していただく

もしこんなトラブルが発生したときは

ご使用されていて故障かな、と思うトラブルが発生したら、
修理を依頼するまえに下記項目を確認してください。

トラブル	確認点	対処(参照ページ)
シャワーいすがガタつく	脚パイプは4本とも同じ高さに設定されていますか	4本の脚パイプを全て同じ高さに設定してください(→P.6 座面の高さ調整)
	不安定な場所で使用していませんか	平らな床面で使用してください
	脚ゴムは外れかけていませんか	まっすぐに奥まではめ直してください
	脚ゴムの向きが正しい向きで取り付けられていますか	脚ゴムが正しい向きになるようにはめ直してください(→P.6 座面の高さ調整<警告>)
	座面は確実にロックされていますか	座面を確実にロックしてください(→P.4 拡げ方)
肘掛けがガタつく	肘掛けに対して横方向に力をかけませんでしたか	取扱店にご連絡してください

お手入れの方法

- 使用後は、石けんやシャンプー、入浴剤などを洗い流してください。
※汚れのひどい場合は、適量にうすめた中性洗剤を含ませた布で拭き、
汚れをきれいに拭き取ってください。
消毒する場合は、逆性石けんをうすめて使用してください。
その後、きれいな水で、洗剤を洗い流してください。
- 最後に、固く絞った布で水を拭き取り、日陰の通気性の良い所で乾燥させてください。
※浴室に置いておく場合でも、浴室を換気するなどして、乾燥させてください。

⚠ 注意

- 塩素系薬剤、酸性、アルカリ性洗剤、シンナー、ベンジンによる殺菌・消毒や、
温泉水や硫黄系入浴剤をかけての使用はしないでください。
(パイプの腐食の原因や樹脂部品の劣化につながり、破損してケガをする原因となります。)

してはいけない

⚠ 注意

- タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、塩素系洗剤・シンナー・クレゾール等は
使用しないでください。
(樹脂が劣化または、破損してケガをする原因となります。)

してはいけない

⚠ 注意

- 熱湯をかけないでください。
(樹脂部品が変形し、破損してケガをする原因となります。)

してはいけない

⚠ 注意

- 直射日光に当てないでください。
(樹脂部分が劣化(変形または変質)し、破損してケガをする原因となります。)

してはいけない

保管場所 シャワーいすを使わない場合、次のようなところでは、保管しないでください。
故障の原因となります。

- 雨に濡れるようなところ ●直射日光が当たるようなところ ●湿気の多いところ
- 高温室になるところ ●炎天下になるところ ●水の中

◆仕様・寸法 (単位:mm)

	SC-31
全 幅	495
奥 行	450~550
全 高	680~780 (20ピッチ 6段階)
座面高	350~450 (20ピッチ 6段階)
折りたたみ寸法	奥行180
座面寸法	幅400×奥行320
重 量	4.1kg
材 質	・フレーム：アルミ合金 ・座面/背面：ポリエチレン(抗菌仕様)、ポリプロピレン(抗菌仕様) ・クッション：EVA樹脂(抗菌仕様)

保証

●保証期間は、お買上げ後1カ年です。(本体、付属品共)
ただし、次の場合は、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。

1. 火災、天災による故障・損傷の場合
2. 取扱説明書に記載の使用方法・ご注意に反するお取扱いによって発生した故障の場合
3. 無断仕様変更及び、改造による故障の場合
4. 消耗品、及び各部の劣化による故障、損傷の場合
5. 修理に要した運賃等の諸経費

この保証書は日本国内のみ有効です。

アフターサービス

万一故障の場合は、お買上げいただきました販売店、または(株)松永製作所へ保証書
ご持参の上、修理をお申しつけください。