


番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
-	X-PD07-002	16×1-3/8 タイヤのみ	1本	2		
-	X-PD07-005	16×1-3/8 チューブ+スハール付セット	1本	2		スハール付セット
-	X-PD07-006	16×1-3/8 タイヤ+チューブセット	1本	2		スハール付セット
-	X-PA04-004	標準ワイヤ No.4	1本	2		
-	X-PC03-022	6インチリフトキャスタ(スハール付)	1個	2		スハール付
1	---	本体フレーム	---	---		
2	X-WA01-002	AR用 側板(スハール付)	1枚	2		左右共通
3	X-PA02-003	樹脂7-スハール付	1本	2		スハール付、左右共通
4	X-PF03-022L	RWタイヤフォックル完成(AR-280/380用)(左)	1枚	1		黒
4	X-PF03-022R	RWタイヤフォックル完成(AR-280/380用)(右)	1枚	1		黒
5	X-PC03-010	6インチリフトキャスタ Bセット	1個	2		
6	X-PB01-026L	平型鉄タックルブレーキ【ドラム車輪用】(左)	1個	1		スハール付
6	X-PB01-026R	平型鉄タックルブレーキ【ドラム車輪用】(右)	1個	1		スハール付
7	X-PA01-101	6分用中柱	1個	2		φ22×t2.8用
8	X-PA01-004	DXクリップ	1本	2		接着剤必要
9	X-PD07-021L-2NB	16×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイヤ)完成 タイヤ 2N-B (左)	1本	1		ワイヤ無
9	X-PD07-021R-2NB	16×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイヤ)完成 タイヤ 2N-B (右)	1本	1		ワイヤ無
9	X-WA03-009L-2NB	16×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイヤ)完成 タイヤ 2N-B (左) 標準ワイヤ-No.4付	1本	1		
9	X-WA03-009R-2NB	16×1-3/8 ドラム車輪(樹脂タイヤ)完成 タイヤ 2N-B (右) 標準ワイヤ-No.4付	1本	1		
10	X-WA06-010-44H51	ARタイプ-ト幅広用 座シート(芯金・シート付) 440幅 H-51	1枚	1		
10	X-WA06-010-44S01	ARタイプ-ト幅広用 座シート(芯金・シート付) 440幅 S-1	1枚	1		
10	X-WA06-010-44S02	ARタイプ-ト幅広用 座シート(芯金・シート付) 440幅 S-2	1枚	1		
10	X-WA06-010-46H51	ARタイプ-ト幅広用 座シート(芯金・シート付) 460幅 H-51	1枚	1		
10	X-WA06-010-46S01	ARタイプ-ト幅広用 座シート(芯金・シート付) 460幅 S-1	1枚	1		

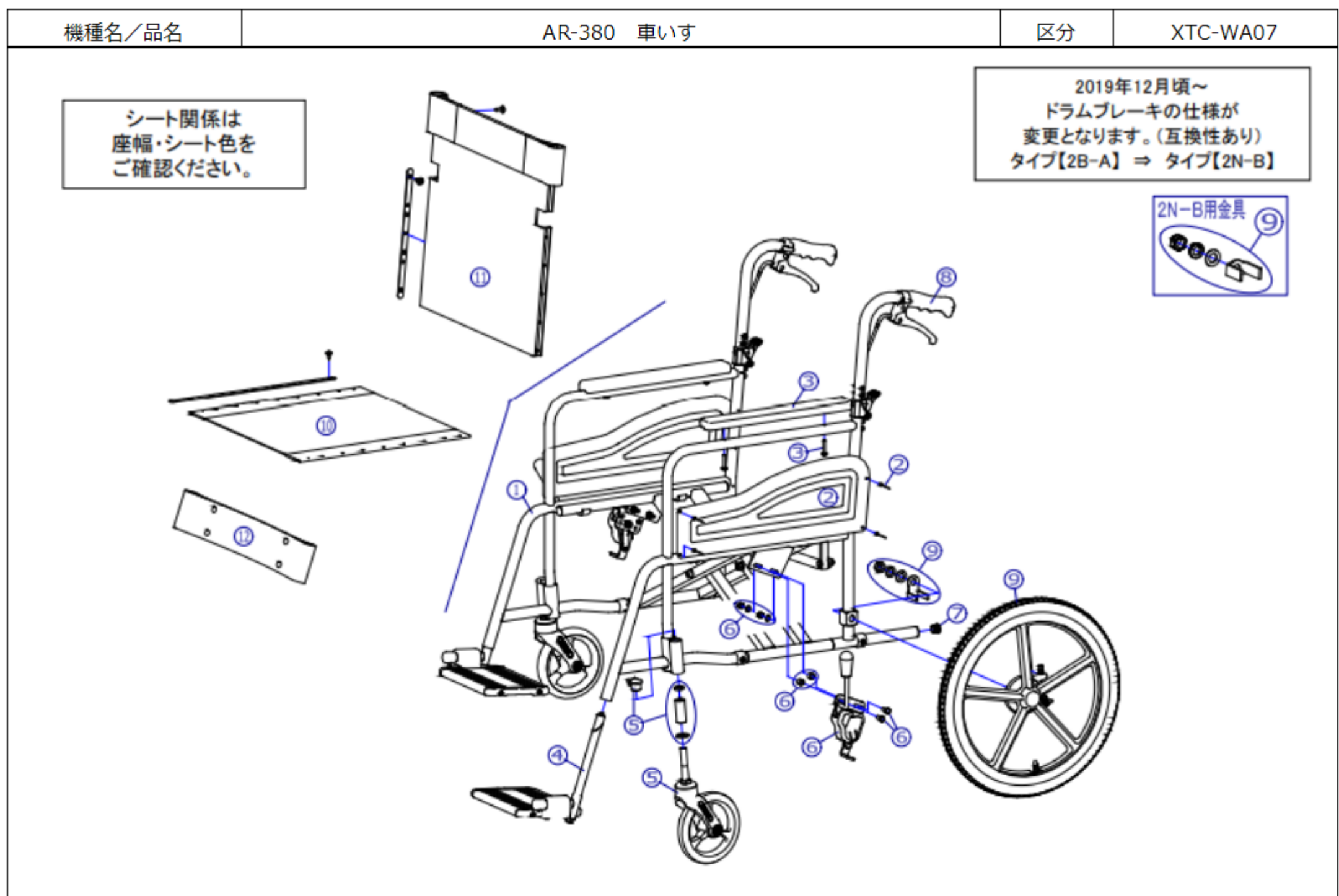

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
10	X-WA06-010-46S02	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広用 座ｼｰﾄ外(芯金・ｼｰﾄﾞｽ付) 460幅 S-2	1枚	1		
10	X-WA06-010-48H51	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広用 座ｼｰﾄ外(芯金・ｼｰﾄﾞｽ付) 480幅 H-51	1枚	1		
10	X-WA06-010-48S01	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広用 座ｼｰﾄ外(芯金・ｼｰﾄﾞｽ付) 480幅 S-1	1枚	1		
10	X-WA06-010-48S02	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広用 座ｼｰﾄ外(芯金・ｼｰﾄﾞｽ付) 480幅 S-2	1枚	1		
11	X-WA06-011-44H51	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広背折れ用 背ｼｰﾄ外(芯金・ｼｰﾄﾞｽ付) 440幅 H-51	1枚	1		
11	X-WA06-011-44S01	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広背折れ用 背ｼｰﾄ外(芯金・ｼｰﾄﾞｽ付) 440幅 S-1	1枚	1		
11	X-WA06-011-44S02	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広背折れ用 背ｼｰﾄ外(芯金・ｼｰﾄﾞｽ付) 440幅 S-2	1枚	1		
11	X-WA06-011-46H51	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広背折れ用 背ｼｰﾄ外(芯金・ｼｰﾄﾞｽ付) 460幅 H-51	1枚	1		
11	X-WA06-011-46S01	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広背折れ用 背ｼｰﾄ外(芯金・ｼｰﾄﾞｽ付) 460幅 S-1	1枚	1		
11	X-WA06-011-46S02	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広背折れ用 背ｼｰﾄ外(芯金・ｼｰﾄﾞｽ付) 460幅 S-2	1枚	1		
11	X-WA06-011-48H51	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広背折れ用 背ｼｰﾄ外(芯金・ｼｰﾄﾞｽ付) 480幅 H-51	1枚	1		
11	X-WA06-011-48S01	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広背折れ用 背ｼｰﾄ外(芯金・ｼｰﾄﾞｽ付) 480幅 S-1	1枚	1		
11	X-WA06-011-48S02	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広背折れ用 背ｼｰﾄ外(芯金・ｼｰﾄﾞｽ付) 480幅 S-2	1枚	1		
12	X-WA06-012-44H51	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広用 ﾚｯｸﾞﾊﾞﾄﾞ 440幅 H-51	1本	1		
12	X-WA06-012-44S01	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広用 ﾚｯｸﾞﾊﾞﾄﾞ 440幅 S-1	1本	1		
12	X-WA06-012-44S02	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広用 ﾚｯｸﾞﾊﾞﾄﾞ 440幅 S-2	1本	1		
12	X-WA06-012-46H51	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広用 ﾚｯｸﾞﾊﾞﾄﾞ 460幅 H-51	1本	1		
12	X-WA06-012-46S01	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広用 ﾚｯｸﾞﾊﾞﾄﾞ 460幅 S-1	1本	1		
12	X-WA06-012-46S02	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広用 ﾚｯｸﾞﾊﾞﾄﾞ 460幅 S-2	1本	1		
12	X-WA06-012-48H51	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広用 ﾚｯｸﾞﾊﾞﾄﾞ 480幅 H-51	1本	1		
12	X-WA06-012-48S01	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広用 ﾚｯｸﾞﾊﾞﾄﾞ 480幅 S-1	1本	1		
12	X-WA06-012-48S02	ARｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ幅広用 ﾚｯｸﾞﾊﾞﾄﾞ 480幅 S-2	1本	1		