


機種名/品名	SL/SA用 22×1軽量ドラム車輪	ページ	XTC- WA43A
--------	--------------------	-----	------------

※ SL用とSA用は スポーク数、リム形状が異なります。  
 SL用 … スポーク数 : 36本  
 SA用 … スポーク数 : 28本

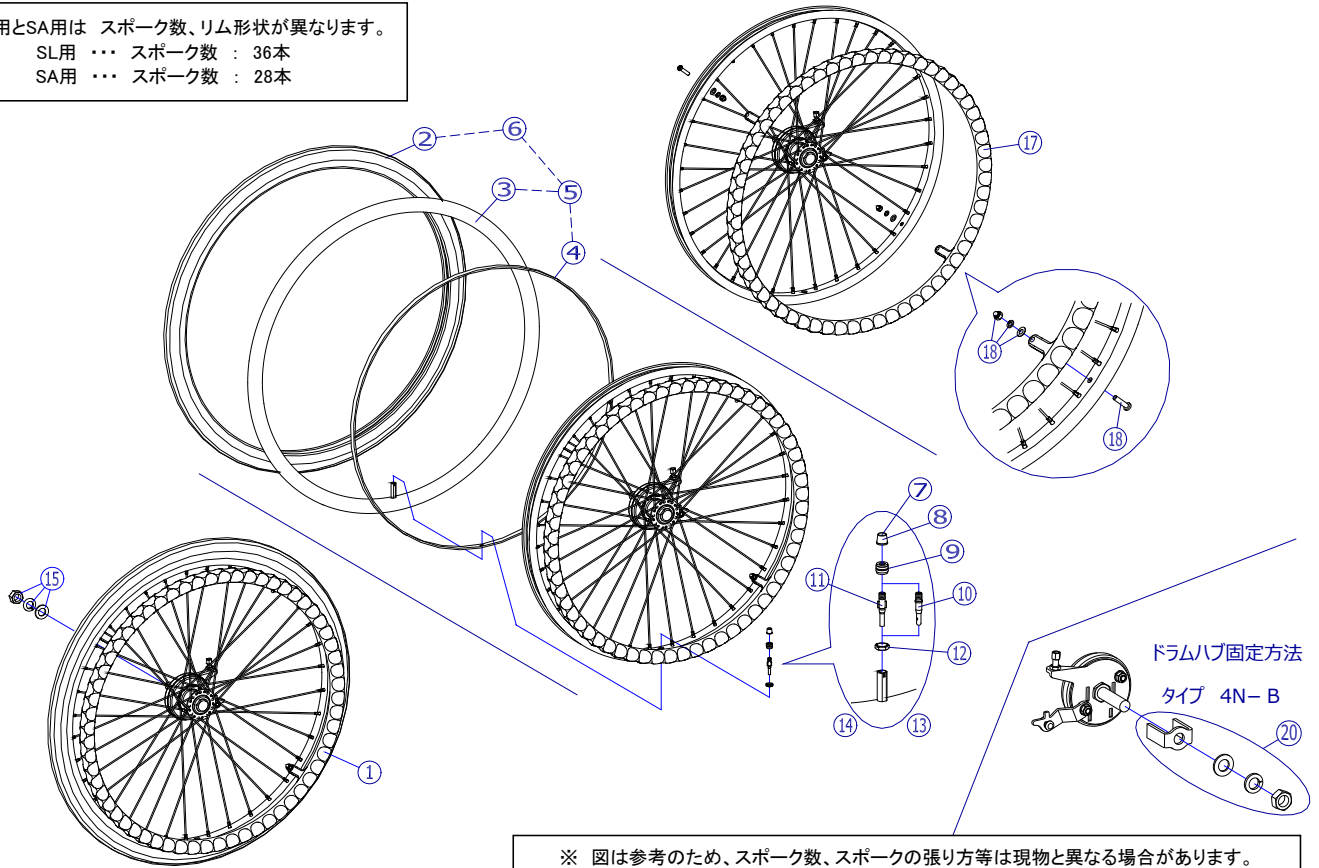

※ 図は参考のため、スポーク数、スポークの張り方等は現物と異なる場合があります。

2019/10/15修正D

機種名/品名	SL/SA用 22×1軽量ドラム車輪	ページ	XTC- WA43B
--------	--------------------	-----	------------

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WA43-101L-4NB	22×1 軽量ドラム車輪完成 タイプ4N-B (左)(爪間20mm)【SL用】	1 本	1			36H ワイヤー無
	X-WA43-101R-4NB	22×1 軽量ドラム車輪完成 タイプ4N-B (右)(爪間20mm)【SL用】	1 本	1			36H ワイヤー無
	X-WA43-121L-4NB	22×1 軽量ドラム車輪完成 タイプ4N-B (左)(爪間20mm)【SA用】	1 本	1			28H ワイヤー無
	X-WA43-121R-4NB	22×1 軽量ドラム車輪完成 タイプ4N-B (右)(爪間20mm)【SA用】	1 本	1			28H ワイヤー無
↑ ⑳ ドラム(タイプ 2B-B)用固定金具セット(金具、スプリングワッシャー、ワッシャー、ナット)が附属します。							

※ 旧仕様(MW-SL1B、3B、SA-100B、110B)は 22×1ドラム車輪【2B-A】です(PD11ページ参照)。また、旧仕様はMW-SL1B、3Bが爪間25mm、SA-100B、110Bが爪間20mmです。

2	X-PD11-002	22×1 タイヤのみ	1 本	2			
3	---	22×1 チューブのみ	-	-			設定無
4	X-PD12-004	22×1-3/8 フラップのみ	1 本	2			
		↑ 22×1と共通部品です。					
5	X-PD11-005	22×1 チューブ+フラップセット	1 本	2			③、④のセット
		↑ ⑬スーパーバルブセットが附属します。					
6	X-PD11-006	22×1 タイヤ+チューブ+フラップセット	1 本	2			②、③、④のセット
		↑ ⑬スーパーバルブセットが附属します。					
7	X-PD02-007	バルブキャップ(青)	1 個	2			
8	X-PD02-008	バルブキャップ(黒)	1 個	2			
9	---	トップナット	-	-			セットでの販売となります
10	X-PD02-010	スーパーバルブ	1 個	2			
11	X-PD02-011	虫ゴムバルブ	1 個	2			
12	---	リムナット	-	-			セットでの販売となります
13	X-PD02-013	スーパーバルブセット	1 個	2			⑦、⑨、⑩、⑫のセット
14	X-PD02-014	虫ゴムバルブセット	1 個	2			⑧、⑨、⑪、⑫のセット
15	X-PD01-007	車輪固定ナットセット	1 個	2			
		↑ スプリングワッシャー、ワッシャー、ナットの三点セットです。					
17	X-PD11-017	22インチ爪間20mm 樹脂ハンドリム	1 本	2			
	X-PD11-027	22インチ爪間25mm 樹脂ハンドリム	1 本	2			
18	X-PD08-018	樹脂ハンドリム用ボルトセット(4本セット)	1 個	2			
20	X-PD01-006	ドラム(タイプ 2B-B)用固定金具セット	1 個	2			2B-B、4N-B共用です。

注記