


塗装色はロットにより
多少のばらつきがありますが
ご了承ください。

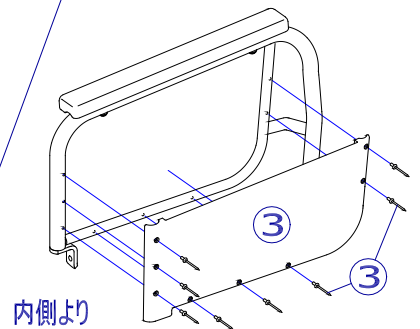

※ ご購入時期により仕様が異なります。
 ・2006年12月頃まで(旧仕様)
 ③アルミ板塗装
 ・2007年1月ごろから
 ③樹脂製黒色

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WA72-001L	REM-3/4/5/6用 跳ね上げ式アームサポートパイプ(左)	1	本	1		
	X-WA72-001R	REM-3/4/5/6用 跳ね上げ式アームサポートパイプ(右)	1	本	1		
	X-WA72-011L	IBREM-3/4/5/6用 跳ね上げ式アームサポートパイプ(左)	1	本	1		
	X-WA72-011R	IBREM-3/4/5/6用 跳ね上げ式アームサポートパイプ(右)	1	本	1		
2	X-PA02-003	樹脂アームサポートパッド	1	本	2		左右共通、ボルト付
3	X-WA72-003L	REM-3/4/5/6用 樹脂側板(左) (リベット付)	1	枚	1		
	X-WA72-003R	REM-3/4/5/6用 樹脂側板(右) (リベット付)	1	枚	1		
	X-WA72-013L	IBREM-3/4/5/6用 アルミ側板(左) (リベット付)	1	枚	1		
	X-WA72-013R	IBREM-3/4/5/6用 アルミ側板(右) (リベット付)	1	枚	1		
4	X-WA72-004	REM-3/4/5/6用 跳ね上げ支点ボルトセット	1	個	2		
5	X-PA03-010	セフティーロック(黒)	1	個	2		
8	X-WA72-008L	REM-3/4/5/6用 跳ね上げ式アームサポート完成(左)	1	本	1		
	X-WA72-008R	REM-3/4/5/6用 跳ね上げ式アームサポート完成(右)	1	本	1		
	X-WA72-018L	IBREM-3/4/5/6用 跳ね上げ式アームサポート完成(左)	1	本	1		
	X-WA72-018R	IBREM-3/4/5/6用 跳ね上げ式アームサポート完成(右)	1	本	1		
		↑ ④支点ボルトが付属します。					
注記							