


機種名/品名	REM-101 スイングアウト フット・レッグサポート	ページ	XTC- WA83A
--------	-----------------------------	-----	------------

※ 生産時期により①、②形状が異なります。
旧仕様の販売はしていません。(互換性あり)

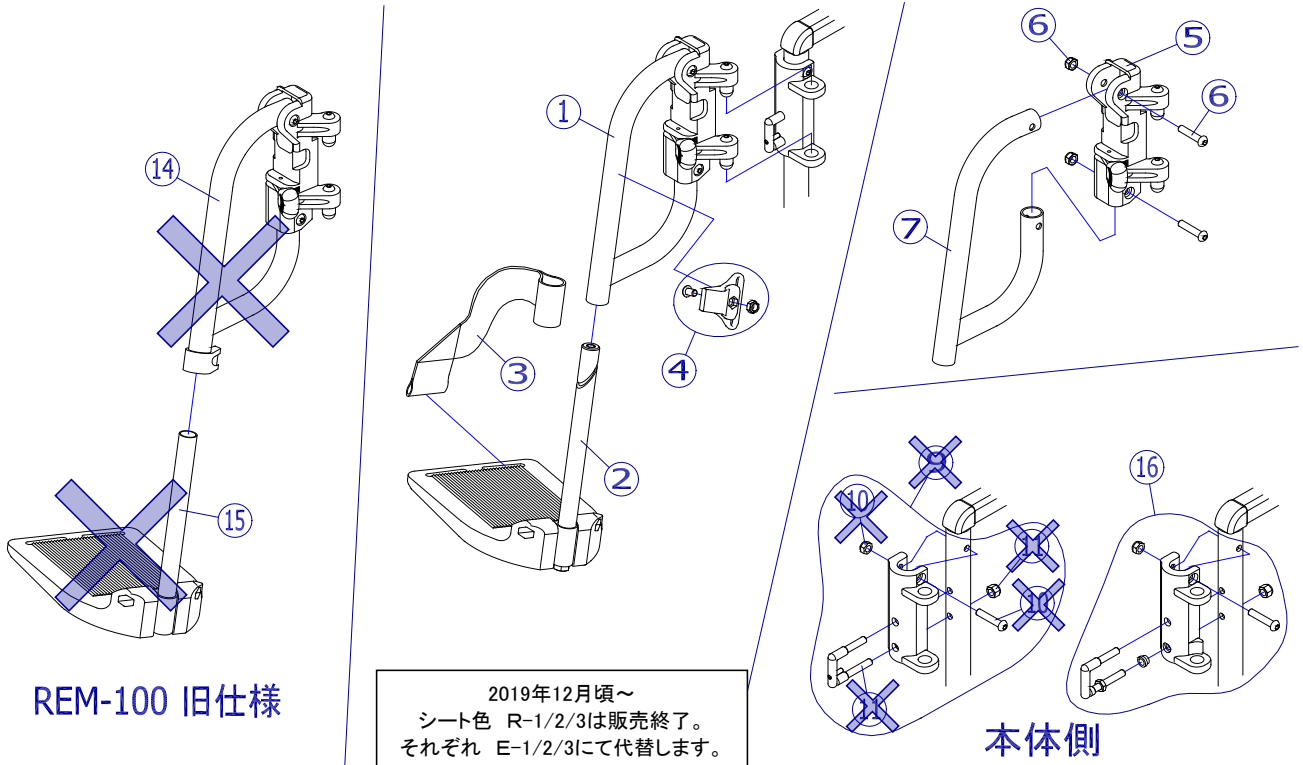

2020/3/26修正F

機種名/品名		REM-101 スイングアウト フット・レッグサポート		ページ	XTC- WA83B			
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-WA83-001L	REM-101用 スイングアウトフット・レッグサポート(左)	1	個	1			
	X-WA83-001R	REM-101用 スイングアウトフット・レッグサポート(右)	1	個	1			
2	X-PF04-021L	MAタイプ(Lサイズ穴) φ15.9用フットサポート完成(左)	1	枚	1		座幅:400、420	
	X-PF04-021R	MAタイプ(Lサイズ穴) φ15.9用フットサポート完成(右)	1	枚	1			
	X-PF04-022L	MAタイプ(Mサイズ穴) φ15.9用フットサポート完成(左)	1	枚	1		座幅:380	
	X-PF04-022R	MAタイプ(Mサイズ穴) φ15.9用フットサポート完成(右)	1	枚	1			
3	X-PG01-002L	樹脂スイングアウト用 レッグベルト(左)	1	本	1			
	X-PG01-002R	樹脂スイングアウト用 レッグベルト(右)	1	本	1			
4	X-PG01-020	φ20用 レッグベルトホルダー	1	個	2		左右共通、ホルト・ナット付	
5	X-PG01-005L	樹脂一体型スイングアウトユニット【黒レバー】(左)	1	個	1			
	X-PG01-005R	樹脂一体型スイングアウトユニット【黒レバー】(右)	1	個	1			
		↑ ⑥固定ボルトが付属します。						
6	X-PG01-006	樹脂一体型スイングアウトユニット用固定ボルトセット	1	本	4		ボルト1本、ナット1個	
7	X-WA83-007	REM-101用 フット・レッグサポートパイプ	1	本	2		左右共通、ホルト・ナット付	
9	X-PG01-017L	X φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(左)	1	個	1		販売終了 φ22用	
	X-PG01-017R	X φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(右)	1	個	1			
	↑ ⑩固定ボルト、⑪コの字金具セット(標準A)が付属します							
10	X-PG01-011	X 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】用固定ボルト	1	本	2		販売終了	
11	X-PG01-012	X 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット コの字金具セット【標準A】	1	個	2		販売終了	
12	X-WA81-018-00R01	X REMスイングアウト用 レッグベルトカバー R-1	1	枚	2		販売終了	
	X-WA81-018-00R02	X REMスイングアウト用 レッグベルトカバー R-2	1	枚	2			
	X-WA81-018-00R03	X REMスイングアウト用 レッグベルトカバー R-3	1	枚	2			
	X-WA81-018-00E01	REMスイングアウト用 レッグベルトカバー E-1	1	枚	2		代替品	
	X-WA81-018-00E02	REMスイングアウト用 レッグベルトカバー E-2	1	枚	2			
	X-WA81-018-00E03	REMスイングアウト用 レッグベルトカバー E-3	1	枚	2			
14	X-WA83-014L	X 旧REM-100用スイングアウトフット・レッグサポート(左)	----	----	----		販売終了	
	X-WA83-014R	X 旧REM-100用スイングアウトフット・レッグサポート(右)	----	----	----		販売終了	
15	X-WA83-015L	X MAタイプ クランプ式 φ15.9用フットサポート完成(左)	----	----	----		販売終了	
	X-WA83-015R	X MAタイプ クランプ式 φ15.9用フットサポート完成(右)	----	----	----		販売終了	
16	X-PG01-014L	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【C】(左)	1	個	1			
	X-PG01-014R	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【C】(右)	1	個	1			
		↑ 固定ボルト、コの字金具を含んだセットです。						
注記								