


2019/7/22修正F

機種名/品名		NEXT-51B 車いす				ページ	XTC- WC05B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	本体フレーム	---	---	---	---	
2	X-WC13-001L	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アームサポート完成(左)	1	個	1		
	X-WC13-001R	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アームサポート完成(右)	1	個	1		
3	X-WC05-003L	NEXT-51/61用 スイングアウト完成(左) フットサポート(L)付	1	個	1		座幅:400、420
	X-WC05-003R	NEXT-51/61用 スイングアウト完成(右) フットサポート(L)付	1	個	1		⑬レッグベルト付
	X-WC05-013L	NEXT-51/61用 スイングアウト完成(左) フットサポート(M)付	1	個	1		座幅:380
	X-WC05-013R	NEXT-51/61用 スイングアウト完成(右) フットサポート(M)付	1	個	1		⑬レッグベルト付
4	X-WC37-006	NEXT用 6インチPUアジャスタブルキャスタセット	1	個	2		
キャスタ輪	X-WC37-010	NEXT用 6インチPUキャスタ輪セット	1	個	2		
5	X-WC37-002	キャスタケースキャップ[N]	1	個	2		
6	X-WC38-001L	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(左)	1	個	1		ボルト付
	X-WC38-001R	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(右)	1	個	1		
7	X-WC38-005L	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Bタイプ)(左)	1	個	1		ボルト付
	X-WC38-005R	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Bタイプ)(右)	1	個	1		プレート黒色
8	X-WC31-022L	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1		ワイヤー無
	X-WC31-022R	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1		
	X-WC05-004L	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左) ワイヤーNX02付	1	本	1		ワイヤー有
	X-WC05-004R	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右) ワイヤーNX02付	1	本	1		
↑ 標準はエアータイヤ仕様となります。							
タイヤなど	X-WC31-032	22×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2		
	X-WC31-042	22×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		スーパーバルブセット付
	X-WC31-052	22×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2		スーパーバルブセット付
	X-WC35-007	NEXTブレーキワイヤー NX02	1	本	2		
9	X-PA01-007	NEXTグリップ	1	本	2		接着剤必要
↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。							
10	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2		
11	X-WC01-010-38000	NEXT標準用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 380幅	1	枚	1		
	X-WC01-010-40000	NEXT標準用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 400幅	1	枚	1		
	X-WC01-010-42000	NEXT標準用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 420幅	1	枚	1		
12	X-WC01-013-00000	NEXT用 背張り調整シート	1	枚	1		
13	X-WC03-012L	NEXTスイング用 レッグベルト(左)	1	本	1		
	X-WC03-012R	NEXTスイング用 レッグベルト(右)	1	本	1		
注記							

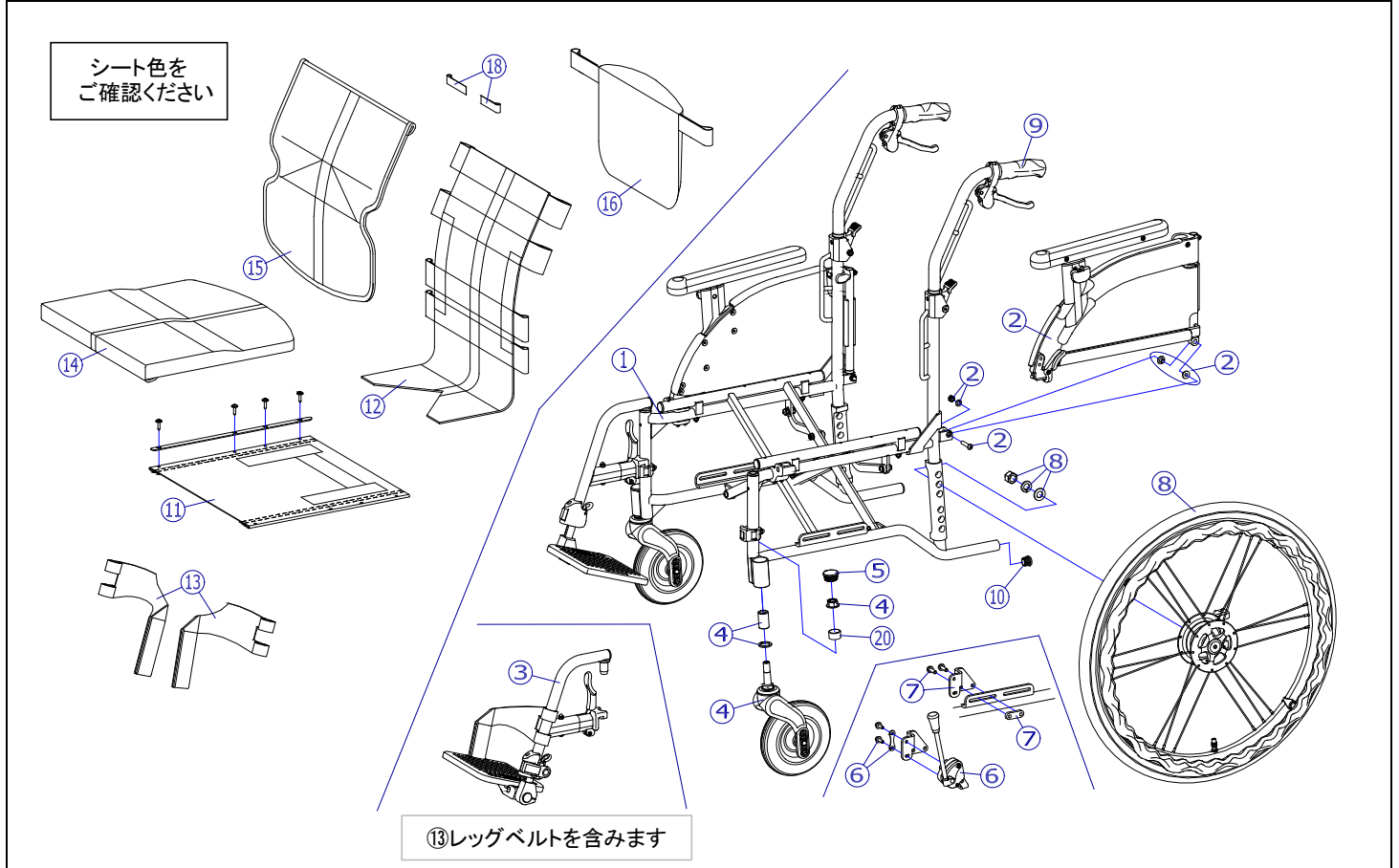

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
14	X-WC03-013-38F01	NEXT用 座立体クッション 380幅 F-1	1	枚	1		
	X-WC03-013-38F02	NEXT用 座立体クッション 380幅 F-2	1	枚	1		
	X-WC03-013-38F03	NEXT用 座立体クッション 380幅 F-3	1	枚	1		
	X-WC03-013-38F04	NEXT用 座立体クッション 380幅 F-4	1	枚	1		
	X-WC03-013-40F01	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-1	1	枚	1		
	X-WC03-013-40F02	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-2	1	枚	1		
	X-WC03-013-40F03	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-3	1	枚	1		
	X-WC03-013-40F04	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-4	1	枚	1		
	X-WC03-013-42F01	NEXT用 座立体クッション 420幅 F-1	1	枚	1		
	X-WC03-013-42F02	NEXT用 座立体クッション 420幅 F-2	1	枚	1		
	X-WC03-013-42F03	NEXT用 座立体クッション 420幅 F-3	1	枚	1		
	X-WC03-013-42F04	NEXT用 座立体クッション 420幅 F-4	1	枚	1		
15	X-WC01-016-40F01	NEXT用 背カバーシート F-1	1	枚	1		
	X-WC01-016-40F02	NEXT用 背カバーシート F-2	1	枚	1		
	X-WC01-016-40F03	NEXT用 背カバーシート F-3	1	枚	1		
	X-WC01-016-40F04	NEXT用 背カバーシート F-4	1	枚	1		
16	X-WC01-017	NEXT用 後付ポケット	1	枚	1		
18	X-WC01-018	NEXT用 ファイヤーホルダー(2個セット)	1	個	1		2個セット
シートセット	X-WC03-019-38F01	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 380幅 F-1	1	個	1		⑭、⑮、⑯のセット
	X-WC03-019-38F02	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 380幅 F-2	1	個	1		
	X-WC03-019-38F03	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 380幅 F-3	1	個	1		
	X-WC03-019-38F04	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 380幅 F-4	1	個	1		
	X-WC03-019-40F01	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-1	1	個	1		⑭、⑮、⑯のセット
	X-WC03-019-40F02	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-2	1	個	1		
	X-WC03-019-40F03	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-3	1	個	1		
	X-WC03-019-40F04	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-4	1	個	1		
	X-WC03-019-42F01	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 420幅 F-1	1	個	1		⑭、⑮、⑯のセット
	X-WC03-019-42F02	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 420幅 F-2	1	個	1		
	X-WC03-019-42F03	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 420幅 F-3	1	個	1		
	X-WC03-019-42F04	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 420幅 F-4	1	個	1		
20	X-WC37-014	NEXT用 キャスタブロックカラー	1	個	2		

注記	
----	--