


2019/7/22修正E

機種名/品名		NEXT-50B 車いす				ページ	XTC- WC07B	
番号	品番	品名	注文単位		一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	本体フレーム	---	---	---	---	---	
2	X-WC14-001L	NEXT低床跳ね上げ高さ調整用 アームサポート完成(左)	1	個	1			
	X-WC14-001R	NEXT低床跳ね上げ高さ調整用 アームサポート完成(右)	1	個	1			
3	X-WC07-003L	NEXT-50/60用 シングアウト完成(左) フットサポート(L)付	1	個	1			座幅:400、420 ⑬レッグベルト付
	X-WC07-003R	NEXT-50/60用 シングアウト完成(右) フットサポート(L)付	1	個	1			
	X-WC07-013L	NEXT-50/60用 シングアウト完成(左) フットサポート(M)付	1	個	1			座幅:380 ⑬レッグベルト付
	X-WC07-013R	NEXT-50/60用 シングアウト完成(右) フットサポート(M)付	1	個	1			
4	X-WC37-008	NEXT用 6インチPUショートアジャスタブルキャスタセット	1	個	2			
キャスタ輪	X-WC37-010	NEXT用 6インチPUキャスタ輪セット	1	個	2			
5	X-WC37-002	キャスタケースキャップ【N】	1	個	2			
6	X-WC38-001L	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(左)	1	個	1			ボルト付
	X-WC38-001R	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(右)	1	個	1			
7	X-WC38-007L	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Cタイプ)(左)	1	個	1			ボルト付 プレートシルバー
	X-WC38-007R	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Cタイプ)(右)	1	個	1			
8	X-WC31-020L	NEXT用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1			ワイヤー無
	X-WC31-020R	NEXT用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1			
	X-WC01-021L	NEXT用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左) ワイヤーNX02付	1	本	1			ワイヤー有
	X-WC01-021R	NEXT用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右) ワイヤーNX02付	1	本	1			
		↑ 標準はエアータイヤ仕様となります。						
タイヤ など	X-WC31-030	20×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-040	20×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			スーパーバルブセット付
	X-WC31-050	20×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			スーパーバルブセット付
	X-WC35-007	NEXTブレーキワイヤー NX02	1	本	2			
9	X-PA01-007	NEXTグリップ	1	本	2			接着剤必要
10	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2			
注記								

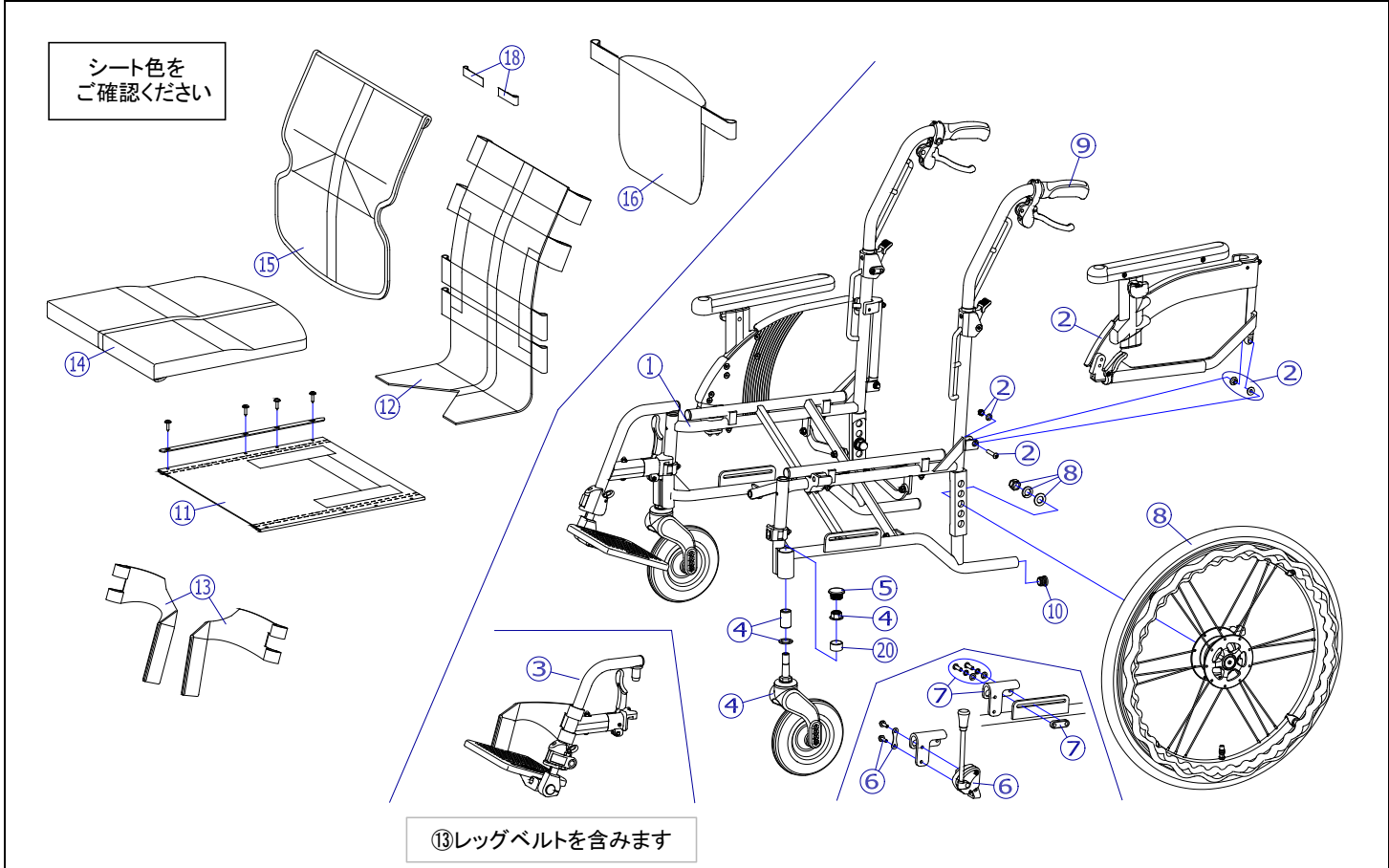

③

機種名／品名		NEXT-50B 車いす				ページ	XTC- WC07D
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
11	X-WC01-020-40000	NEXT低床用 座ベースシートセット(芯金・シートビス付) 400幅	1 枚	1			
12	X-WC01-013-00000	NEXT用 背張り調整シート	1 枚	1			
13	X-WC03-012L	NEXTスイング用 レッグベルト(左)	1 本	1			
	X-WC03-012R	NEXTスイング用 レッグベルト(右)	1 本	1			
14	X-WC03-013-40F01	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-1	1 枚	1			
	X-WC03-013-40F02	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-2	1 枚	1			
	X-WC03-013-40F03	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-3	1 枚	1			
	X-WC03-013-40F04	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-4	1 枚	1			
15	X-WC01-016-40F01	NEXT用 背カバーシート F-1	1 枚	1			
	X-WC01-016-40F02	NEXT用 背カバーシート F-2	1 枚	1			
	X-WC01-016-40F03	NEXT用 背カバーシート F-3	1 枚	1			
	X-WC01-016-40F04	NEXT用 背カバーシート F-4	1 枚	1			
16	X-WC01-017	NEXT用 後付ポケット	1 枚	1			
18	X-WC01-018	NEXT用 ワイヤホルダー(2個セット)	1 個	1			2個セット
シート セット	X-WC03-019-40F01	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-1	1 個	1			⑭、⑮、⑯のセット
	X-WC03-019-40F02	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-2	1 個	1			
	X-WC03-019-40F03	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-3	1 個	1			
	X-WC03-019-40F04	NEXT用 立体クッション・カバーシートセット(ポケット付) 400幅 F-4	1 個	1			
20	X-WC37-014	NEXT用 キャスタブロックカラー	1 個	2			
注記							