


適応機種：NEXT-51B、61B、52B、62B

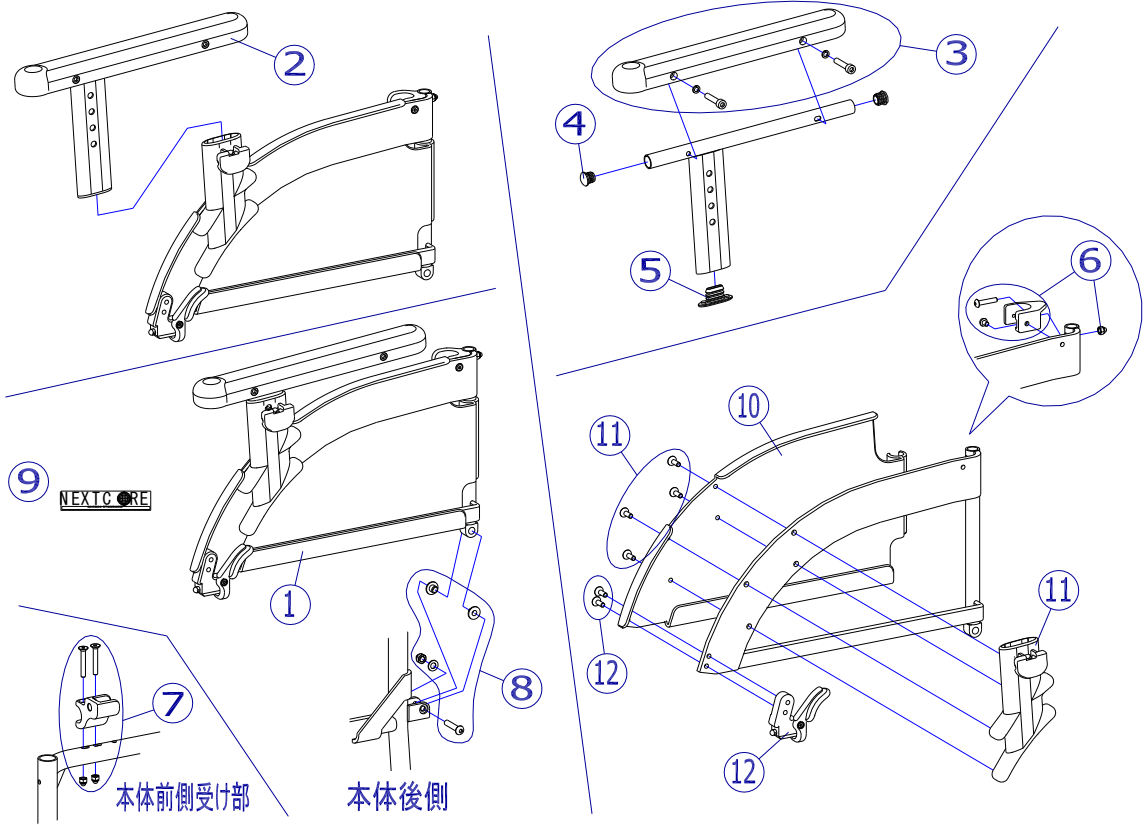

2020/3/13修正C

機種名／品名		NEXTシリーズ アームサポート②				ページ	XTC- WC13B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-WC13-001L	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アームサポート完成(左)	1	個	1			
	X-WC13-001R	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アームサポート完成(右)	1	個	1			
↑ ②肘掛け、③支点ボルトが付属します。								
2	X-WC13-002L	NEXT高さ調整用 肘掛セット(左)	1	個	1			
	X-WC13-002R	NEXT高さ調整用 肘掛セット(右)	1	個	1			
3	X-PA02-008L	NEXTアームサポートパッド(左)	1	本	1		ボルト付	
	X-PA02-008R	NEXTアームサポートパッド(右)	1	本	1			
4	X-PA01-103	5分用中栓	1	個	4			
5	X-WC13-005	X-NEXT高さ調整肘掛用 上下パイプ下部楕円キャップ	4	個	2		X-WA24-016に統一	
	X-WA24-016	高さ調整肘掛上下パイプ用下部楕円キャップ	1	個	2			
6	X-WC13-006L	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アームサポート部後方ガイドセット(左)	1	個	1			
	X-WC13-006R	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アームサポート部後方ガイドセット(右)	1	個	1			
7	X-WC12-007L	NEXT跳ね上げ用 前側受け金具セット(左)	1	個	1			
	X-WC12-007R	NEXT跳ね上げ用 前側受け金具セット(右)	1	個	1			
8	X-WC12-008	NEXT跳ね上げ用 支点ボルトセット	1	本	2			
9	X-WC11-010	NEXT CORE ステッカー	1	枚	2			
10	X-WC13-010L	NEXT跳ね上げ高さ調整用 側板(左)	1	枚	1			
	X-WC13-010R	NEXT跳ね上げ高さ調整用 側板(右)	1	枚	1			
11	X-WC13-011L	NEXT用 肘掛上下ユニットセット(左)	1	個	1			
	X-WC13-011R	NEXT用 肘掛上下ユニットセット(右)	1	個	1			
12	X-WC13-012L	NEXT跳ね上げ高さ調整用 肘掛ロックレバーセット(左)	1	個	1			
	X-WC13-012R	NEXT跳ね上げ高さ調整用 肘掛ロックレバーセット(右)	1	個	1			
注記								