

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-WC23-001L	NEXT用 スイングアウトフット・レッグ 姉 [®] -ト(左)	1 個	1		
1	X-WC23-001R	NEXT用 スイングアウトフット・レッグ 姉 [®] -ト(右)	1 個	1		
1	X-WC23-011L	NEXT低床用 スイングアウトフット・レッグ 姉 [®] -ト(左)	1 個	1		
1	X-WC23-011R	NEXT低床用 スイングアウトフット・レッグ 姉 [®] -ト(右)	1 個	1		
1	X-WC23-021L	NEXT高床用 スイングアウトフット・レッグ 姉 [®] -ト(左)	1 個	1		
1	X-WC23-021R	NEXT高床用 スイングアウトフット・レッグ 姉 [®] -ト(右)	1 個	1		
1	X-WC23-101L	NEXT用 スイングアウトフット・レッグ 姉 [®] -トII(左)	1 個	1		
1	X-WC23-101R	NEXT用 スイングアウトフット・レッグ 姉 [®] -トII(右)	1 個	1		
1	X-WC23-111L	NEXT低床用 スイングアウトフット・レッグ 姉 [®] -トII(左)	1 個	1		
1	X-WC23-111R	NEXT低床用 スイングアウトフット・レッグ 姉 [®] -トII(右)	1 個	1		
1	X-WC23-121L	NEXT高床用 スイングアウトフット・レッグ 姉 [®] -トII(左)	1 個	1		
1	X-WC23-121R	NEXT高床用 スイングアウトフット・レッグ 姉 [®] -トII(右)	1 個	1		
3	X-WC21-001L	NEXTフット姉 [®] -ト固定部品セット(左)	1 個	1		
3	X-WC21-001R	NEXTフット姉 [®] -ト固定部品セット(右)	1 個	1		
3	X-WC21-001L	NEXTフット姉 [®] -ト固定部品セット(左)	1 個	1		
3	X-WC21-001R	NEXTフット姉 [®] -ト固定部品セット(右)	1 個	1		
4	X-WC23-004	NEXTスイング用 旋回支点セット	1 個	2		
4	X-WC23-004	NEXTスイング用 旋回支点セット	1 個	2		
5	X-WC23-105L	【GC】スイング用 ロックバ [®] -部品セット(左)	1 個	1		
5	X-WC23-105R	【GC】スイング用 ロックバ [®] -部品セット(右)	1 個	1		
5	X-WC23-005L	NEXTスイング用 ロックバ [®] -部品セット(左)	1 個	1		
5	X-WC23-005R	NEXTスイング用 ロックバ [®] -部品セット(右)	1 個	1		
6	X-WC23-006	NEXTスイング用 旋回支点受け(本体側)	1 個	2		
7	X-WC23-007L	NEXTスイング用 ロック受け部品セット(本体側)(左)	1 個	1		


機種名/品名

NEXTシリーズ フット・レッグサポート①

区分

XTC-WC23

- 機種により ①スイングアウトフット・レッグサポートの寸法が異なります。
 (標準) 採用機種 : NEXT-31B、41B、51B、61B
 低床用 採用機種 : NEXT-50B、60B
 高床用 採用機種 : NEXT-52B、62B

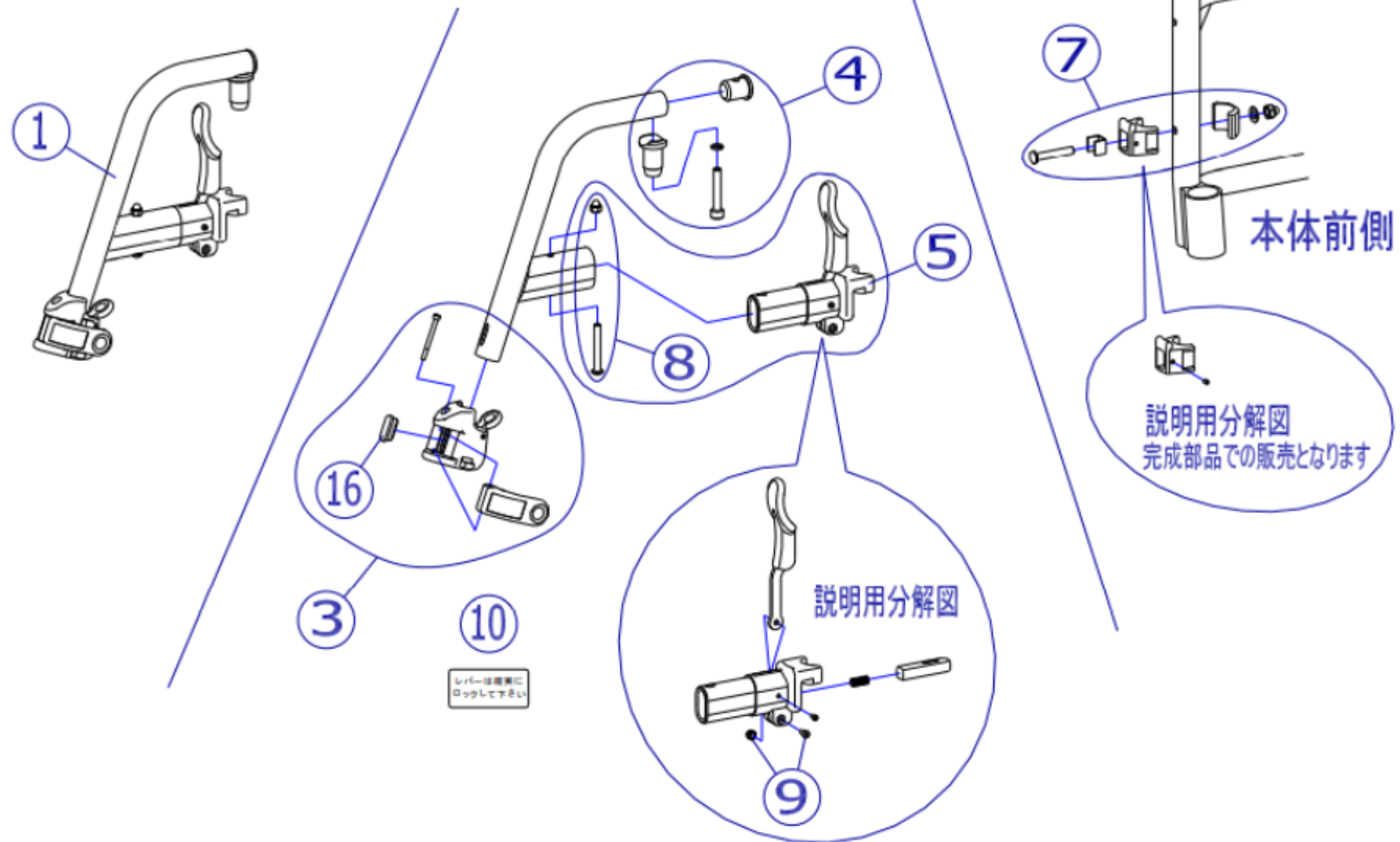

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
7	X-WC23-007R	NEXTスイング用 ロック受け部品セット(本体側)(右)	1 個	1		
7	X-WC23-107L	【GC】スイング用 ロック受け部品セット(本体側)(左)	1 個	1		
7	X-WC23-107R	【GC】スイング用 ロック受け部品セット(本体側)(右)	1 個	1		
8	X-WC23-008	NEXTスイング用 ロックバネ部品固定ネジセット	1 本	2		M5×40、爪付袋ナット
8	X-WC23-008	NEXTスイング用 ロックバネ部品固定ネジセット	1 本	2		M5×40、爪付袋ナット
9	X-WC23-009	NEXTスイング用 ロックバネ-支点ネジセット	1 本	2		M4×15、袋ナット
9	X-WC23-009	NEXTスイング用 ロックバネ-支点ネジセット	1 本	2		M4×15、袋ナット
10	X-WC21-010	NEXTクランプバネ-ロッキングール	1 枚	2		左右共通
10	X-WC21-010	NEXTクランプバネ-ロッキングール	1 枚	2		左右共通
16	X-WC21-016	NEXT加圧クランプ押さえカー	1 個	2		
16	X-WC21-016	NEXT加圧クランプ押さえカー	1 個	2		