


機種名／品名		<b>NEXTシリーズ 自走用車輪</b>				ページ	XTC- WC31B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-WC31-020L	NEXT用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-WC31-020R	NEXT用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1			
	X-WC31-022L	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1			
	X-WC31-022R	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1			
	X-WC31-024L	NEXT用 24×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1			
	X-WC31-024R	NEXT用 24×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1			
	↑ ⑩が付属します。標準はエアータイヤ仕様となります。							
	1	X-WC31-020L-HB	NEXT用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット ハイブリッド(左)	1	本	1		ワイヤー無
		X-WC31-020R-HB	NEXT用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット ハイブリッド(右)	1	本	1		
		X-WC31-022L-HB	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット ハイブリッド(左)	1	本	1		
		X-WC31-022R-HB	NEXT用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット ハイブリッド(右)	1	本	1		
X-WC31-024L-HB		NEXT用 24×1-1/4軽量ドラム車輪セット ハイブリッド(左)	1	本	1			
X-WC31-024R-HB		NEXT用 24×1-1/4軽量ドラム車輪セット ハイブリッド(右)	1	本	1			
↑ 固定用部品(ナットなど)が付属します。 ※爪間は15mmを標準とさせていただきます。								
2	X-WC31-030	20×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-032	22×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-034	24×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2			
3	---	20×1-1/4 チューブ(NEXT用ロングバルブ仕様)のみ	-	-	-		設定無	
	---	22×1-1/4 チューブ(NEXT用ロングバルブ仕様)のみ	-	-	-			
	---	24×1-1/4 チューブ(NEXT用ロングバルブ仕様)のみ	-	-	-			
4	X-WC31-080	20×1-1/4 フラップ(NEXT用ハードタイプ)のみ	1	本	2			
	X-WC31-082	22×1-1/4 フラップ(NEXT用ハードタイプ)のみ	1	本	2			
	X-WC31-084	24×1-1/4 フラップ(NEXT用ハードタイプ)のみ	1	本	2			
5	X-WC31-040	20×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-042	22×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-044	24×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			
	↑ ⑬スーパーバルブセットが付属します。							
	X-WC31-140	20×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用) 虫ゴム	1	本	2			
	X-WC31-142	22×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用) 虫ゴム	1	本	2			
X-WC31-144	24×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用) 虫ゴム	1	本	2				
↑ ⑭虫ゴムバルブセットが付属します。								
注記	次ページへ続く							

2019/11/22修正

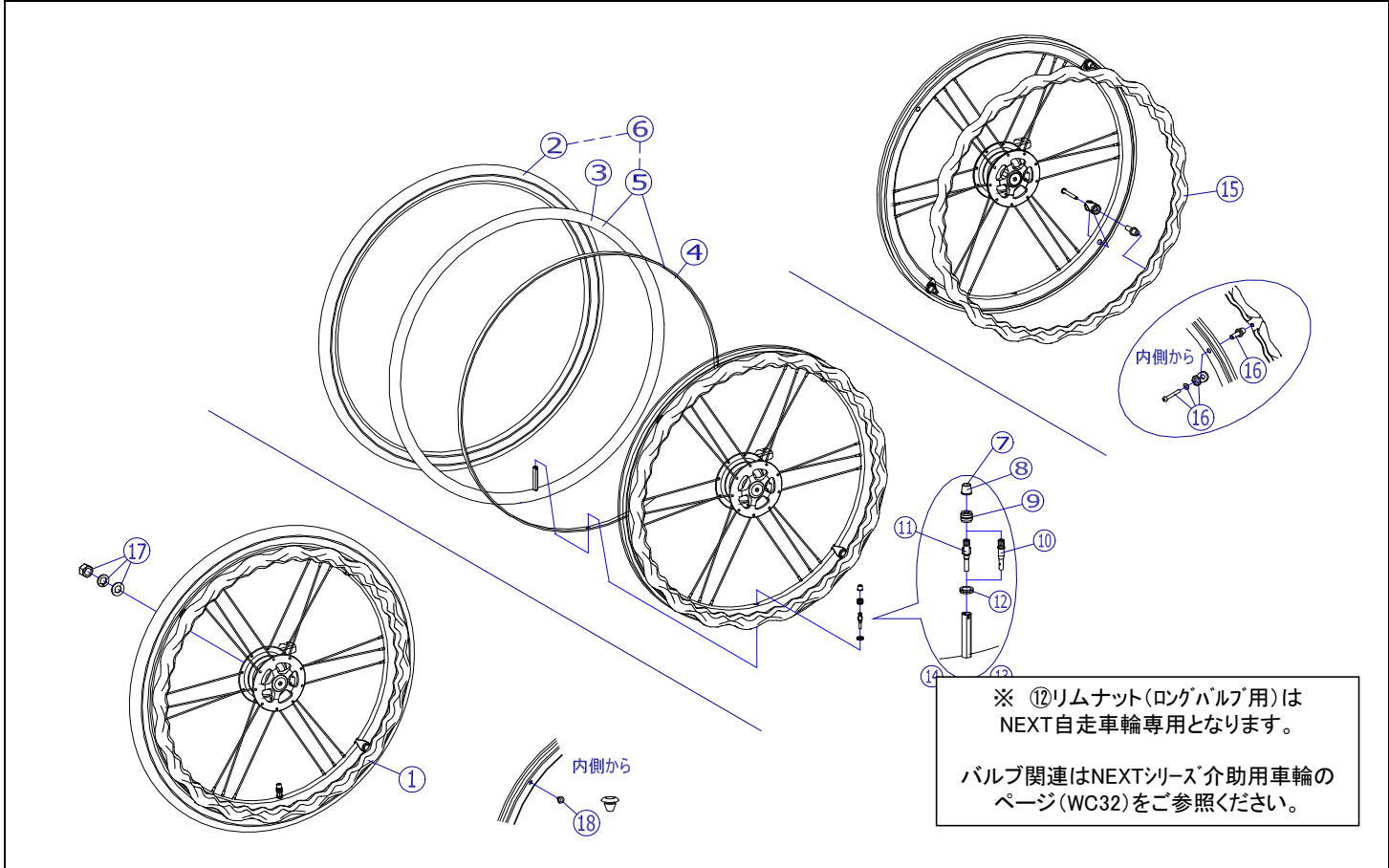

③

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
6	X-WC31-050	20×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-052	22×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-054	24×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			
		↑⑬スーパーバルブセットが附属します。						
	X-WC31-150	20×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用) 虫ゴム	1	本	2			
	X-WC31-152	22×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用) 虫ゴム	1	本	2			
	X-WC31-154	24×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用) 虫ゴム	1	本	2			
	↑⑭虫ゴムバルブセットが附属します。							
13	X-WC31-013	スーパーバルブセット(ロングバルブ用)	1	個	2			
14	X-PD02-014	虫ゴムバルブセット	1	個	2			
15	X-WC31-060	NEXT用 20インチハンドリム	1	本	2		ボルト⑯は 付属しません。	
	X-WC31-062	NEXT用 22インチハンドリム	1	本	2			
	X-WC31-064	NEXT用 24インチハンドリム	1	本	2			
16	X-WC31-016	NEXT用 ハンドリム固定ボルト(4本セット) 標準爪間15mm	1	個	2			
	X-WC31-071	NEXT用 ハンドリム固定ボルト(4本セット) オプション爪間20mm	1	個	2			
	X-WC31-072	NEXT用 ハンドリム固定ボルト(4本セット) オプション爪間25mm	1	個	2			
17	X-WC31-017	車輪固定袋ナットセット	1	個	2		平W, SW付 / 黒	
18	X-WC31-018	NEXTリム用 水抜き穴ゴムキャップ(2個セット)	1	個	2			
9	---	トップナット	-	-	-		セットでの販売となります	
12	---	リムナット	-	-	-		セットでの販売となります	
注記								