


番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
-	X-PD03-002	12×1-3/8 タイヤのみ	1本	2		
-	X-WC60-011	4インチキャスター【N】セット	1個	2		
-	X-PD03-005	12×1-3/8 チューブ+フリップセット	1本	2		
-	X-PD03-006	12×1-3/8 タイヤ+チューブ+フリップセット	1本	2		
-	X-PD07-002	16×1-3/8 タイヤのみ	1本	2		
-	X-PD07-005	16×1-3/8 チューブ+スハ-ハ-ルセット	1本	2		
-	X-PD07-006	16×1-3/8 タイヤ+チューブセット	1本	2		
-	X-WC35-022	NEXTフレームキット NXL02	1本	2		81B、80B共用
-	X-WC03-019-40F01	NEXT用 立体クッション+カバーシートセット(カバー付) 400幅 F-1	1個	1		④+⑤+⑥
-	X-WC03-019-40F02	NEXT用 立体クッション+カバーシートセット(カバー付) 400幅 F-2	1個	1		④+⑤+⑥
-	X-WC03-019-40F03	NEXT用 立体クッション+カバーシートセット(カバー付) 400幅 F-3	1個	1		④+⑤+⑥
-	X-WC03-019-40F04	NEXT用 立体クッション+カバーシートセット(カバー付) 400幅 F-4	1個	1		④+⑤+⑥
1	---	本体フレーム	---	---		
2	X-WC54-001L	NEXT6輪介助用 跳ね上げ高さ調整アームセット完成(左)	1個	1		
2	X-WC54-001R	NEXT6輪介助用 跳ね上げ高さ調整アームセット完成(右)	1個	1		
3	X-WC55-002L	NEXT6輪用 フットプレート完成(左)	1個	1		180×150
3	X-WC55-002R	NEXT6輪用 フットプレート完成(右)	1個	1		180×150
4	X-WC60-002	NEXT6輪用 キャスター完成(フロントタイヤ)	1個	2		81B用
4	X-WC60-003	NEXT6輪用 キャスター完成(フロントタイヤ)	1個	2		80B用
5	X-WC60-004	NEXT6輪用 キャスター完成(リアタイヤ)	1個	2		
6	X-WC38-001L	NEXT用 ミニタックプレートセット(左)	1個	1		
6	X-WC38-001R	NEXT用 ミニタックプレートセット(右)	1個	1		
7	X-WC38-007L	NEXT用 ミニタック調整プレート(Cタイプ)(左)	1個	1		
7	X-WC38-007R	NEXT用 ミニタック調整プレート(Cタイプ)(右)	1個	1		

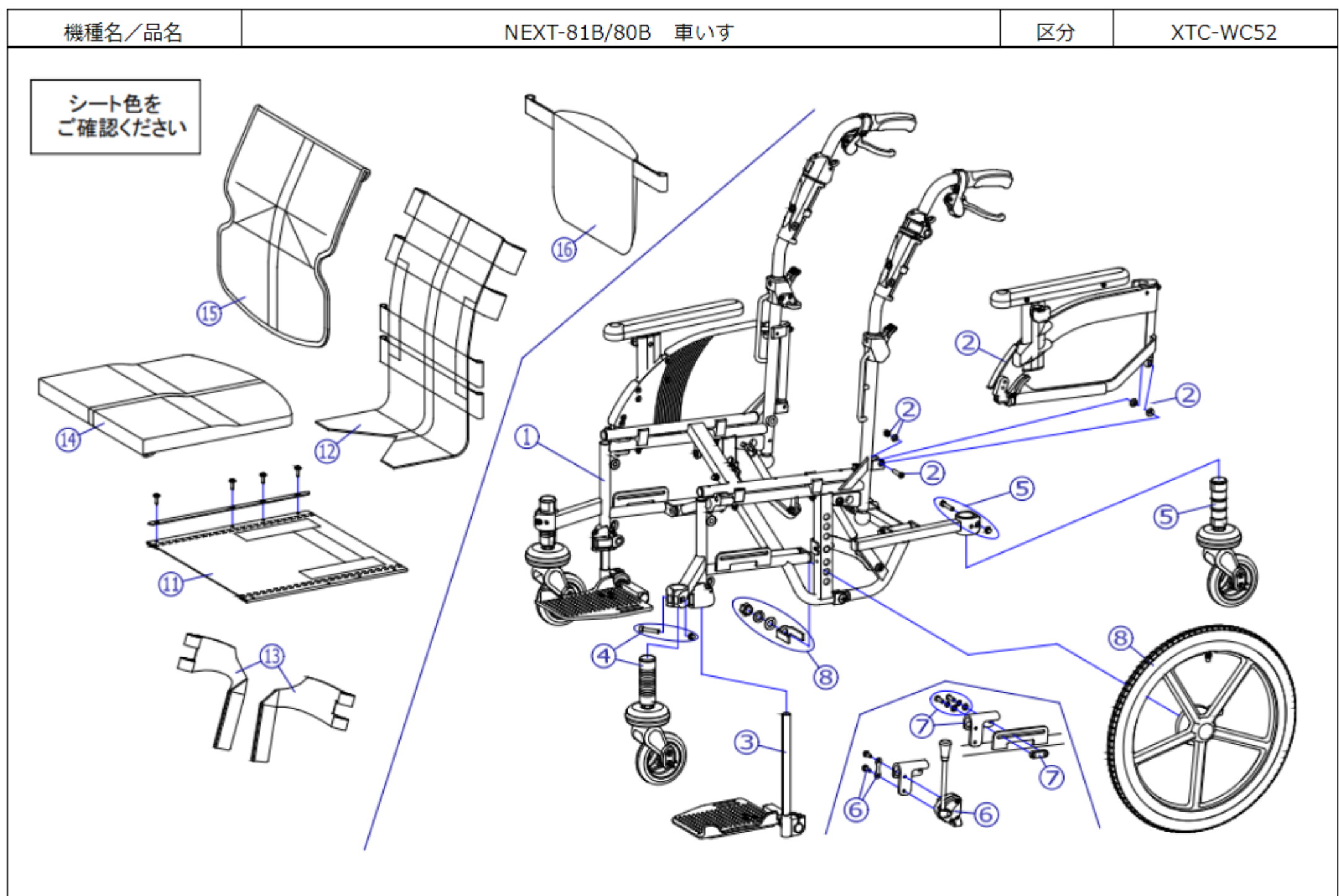

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
8	X-WC58-020L	NEXT6輪用 12×1-3/8"φ車輪セット(左)	1本	1		80B用(クイック無)
8	X-WC58-020R	NEXT6輪用 12×1-3/8"φ車輪セット(右)	1本	1		80B用(クイック無)
8	X-WC58-021L	NEXT6輪用 12×1-3/8"φ車輪セット(左) クイック-NXL02付	1本	1		80B用
8	X-WC58-021R	NEXT6輪用 12×1-3/8"φ車輪セット(右) クイック-NXL02付	1本	1		80B用
8	X-WC58-022L	NEXT6輪用 16×1-3/8"φ車輪セット(左)	1本	1		81B用(クイック無)
8	X-WC58-022R	NEXT6輪用 16×1-3/8"φ車輪セット(右)	1本	1		81B用(クイック無)
8	X-WC58-023L	NEXT6輪用 16×1-3/8"φ車輪セット(左) クイック-NXL02付	1本	1		81B用
8	X-WC58-023R	NEXT6輪用 16×1-3/8"φ車輪セット(右) クイック-NXL02付	1本	1		81B用
11	X-WC01-020-40000	NEXT低床用 座墊-シートセット(芯金・シート付) 400幅	1枚	1		
12	X-WC01-013-00000	NEXT用 背張り調整シート	1枚	1		
13	X-WC03-012L	NEXTスイック用 レッグレスト(左)	1本	1		
13	X-WC03-012R	NEXTスイック用 レッグレスト(右)	1本	1		
14	X-WC03-013-40F01	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-1	1枚	1		
14	X-WC03-013-40F02	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-2	1枚	1		
14	X-WC03-013-40F03	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-3	1枚	1		
14	X-WC03-013-40F04	NEXT用 座立体クッション 400幅 F-4	1枚	1		
15	X-WC01-016-40F01	NEXT用 背加圧シート F-1	1枚	1		
15	X-WC01-016-40F02	NEXT用 背加圧シート F-2	1枚	1		
15	X-WC01-016-40F03	NEXT用 背加圧シート F-3	1枚	1		
15	X-WC01-016-40F04	NEXT用 背加圧シート F-4	1枚	1		
16	X-WC01-017	NEXT用 後付バック	1枚	1		