


適応機種：NEXT-80B、81B

この図は左側です

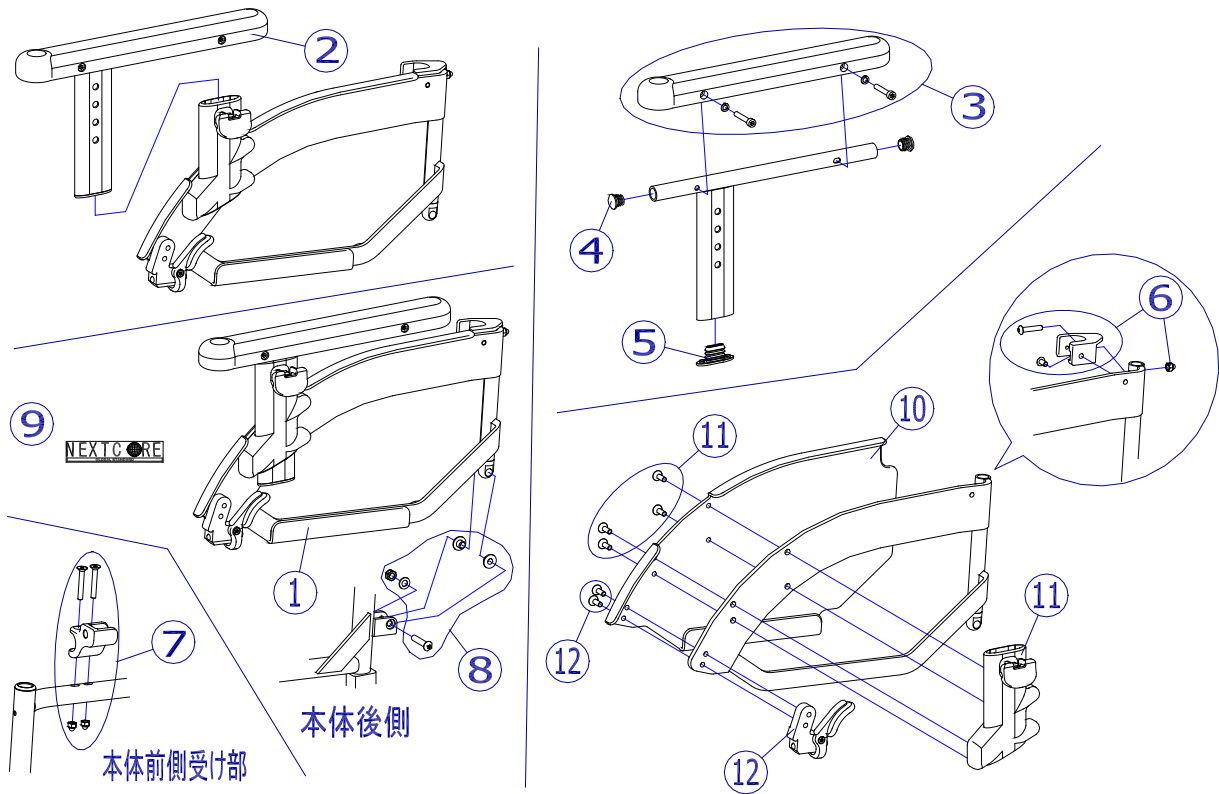

機種名／品名		NEXT6輪シリーズ アームサポート②				ページ	XTC- WC54B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-WC54-001L	NEXT6輪介助用 跳ね上げ高さ調整アームサポート完成(左)	1	個	1			
	X-WC54-001R	NEXT6輪介助用 跳ね上げ高さ調整アームサポート完成(右)	1	個	1			
↑ ②肘掛け、③支点ボルトが付属します。								
2	X-WC13-002L	NEXT高さ調整用 肘掛セット(左)	1	個	1			
	X-WC13-002R	NEXT高さ調整用 肘掛セット(右)	1	個	1			
3	X-PA02-008L	NEXTアームサポートパッド(左)	1	本	1			
	X-PA02-008R	NEXTアームサポートパッド(右)	1	本	1			
4	X-PA01-103	5分用中柱	1	個	4			
5	X-WA24-016	高さ調整肘掛上下パイプ用下部楕円キャップ	1	個	2			
6	X-WC13-006L	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アームサポート部後方ガイドセット(左)	1	個	1			
	X-WC13-006R	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アームサポート部後方ガイドセット(右)	1	個	1			
7	X-WC12-007L	NEXT跳ね上げ用 前側受け金具セット(左)	1	個	1			
	X-WC12-007R	NEXT跳ね上げ用 前側受け金具セット(右)	1	個	1			
8	X-WC12-008	NEXT跳ね上げ用 支点ボルトセット	1	本	2			
9	X-WC11-010	NEXT CORE ステッカー	1	枚	2			
10	X-WC53-010L	X-NEXT6輪用 高さ調整式側板(左)	1	枚	1		X-WC14-010L/RIに統一	
	X-WC53-010R	X-NEXT6輪用 高さ調整式側板(右)	1	枚	1			
	X-WC14-010L	NEXT低床跳ね上げ高さ調整用 側板(左)	1	枚	1			
	X-WC14-010R	NEXT低床跳ね上げ高さ調整用 側板(右)	1	枚	1			
11	X-WC14-011L	NEXT低床用 肘掛上下ユニットセット(左)	1	個	1			
	X-WC14-011R	NEXT低床用 肘掛上下ユニットセット(右)	1	個	1			
12	X-WC13-012L	NEXT跳ね上げ高さ調整用 肘掛ロックレバーセット(左)	1	個	1			
	X-WC13-012R	NEXT跳ね上げ高さ調整用 肘掛ロックレバーセット(右)	1	個	1			
注記								